

PHILIPS

OptiChamber Diamond

Chambre d'inhalation compacte

OptiChamber Diamond contribue à administrer
le médicament là où il est nécessaire, dans vos poumons

Suivez attentivement ces instructions et lisez également le mode d'emploi situé à l'intérieur de la boîte de l'OptiChamber Diamond.



1 Retirez les capuchons de l'aérosol-doseur et de la chambre Diamond. Recherchez la présence de corps étrangers dans la chambre et retirez-les.



2 Insérez l'embout buccal de votre aérosol-doseur dans l'arrière de la chambre Diamond.



3 Si vous utilisez un masque, placez le masque sur l'extrémité de l'embout buccal et tournez-le doucement jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.



4 Agitez la chambre et aérosol-doseur selon les instructions de celui-ci.



5 Placez et fermez vos lèvres autour de l'embout buccal. Expirez. Pulvériser une bouffée de médicament dans la chambre et inspirez immédiatement, lentement et profondément.



6 Si l'alerte de débit « sifflement » sonne, inspirez plus lentement. Retenez votre respiration pendant 8 secondes ou comme indiqué par votre professionnel de la santé, puis expirez.




7 Ou si vous utilisez un masque, appuyez et maintenez-le sur votre bouche et votre nez. Pulvériser une bouffée de médicament dans la chambre et maintenez le masque en place pendant 5 – 6 respirations.



8 La valve expiratoire s'ouvrira lorsque vous expirez et vous permettra de comptabiliser facilement les respirations.

Nettoyage hebdomadaire de votre chambre et de votre masque

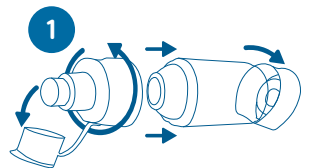


1 Retirez le capuchon, faites pivoter l'embout buccal pour le retirer, ôtez le capuchon situé sur l'extrémité et retirez le masque (le cas échéant).




2 **Chambre** : agitez les pièces dans de l'eau chaude savonneuse additionnée de détergent liquide pendant 1 minute puis laissez-les tremper pendant 10 minutes.

Masque : agitez-le dans de l'eau chaude savonneuse pendant 2 minutes ou laissez-le tremper pendant 10 minutes.

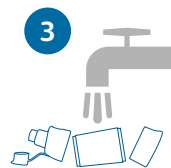

3 Rincez les pièces à l'eau claire et chaude et laissez-les sécher à l'air.

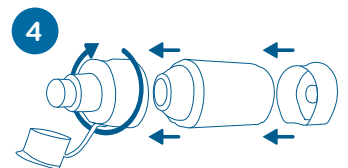

4 Réassemblez la chambre et stockez-la dans un endroit propre et sec.

