


Sådan bruger du din spacer

Forstøverkamre (også kaldet spacer) anvendes sammen med inhalatoren og gør det nemmere at få medicinen ned i lungerne. De kan bruges af mennesker i alle aldre. Tucker bruger altid en spacer med sin inhalator. Husk at have en voksen til at hjælpe dig med at bruge og rengøre spaceren.

Klargøring

- 1 Tag hættten af inhalatoren, og sæt mundstykket i åbningen ved spacerens gummiende.

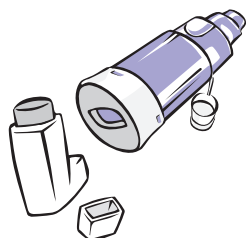

Hvis du bruger ansigtsmaske

– Anbring den sikkert på mundstykket.



- 2 Ryst inhalatoren og spaceren 4-5 gange.

- 3 Sæt spaceren op til munden, luk helt tæt omkring det med læberne, og pust ud.




Sådan tager du medicinen

- 4 Når du begynder at trække vejret langsomt ind gennem munden, trykker du ned på inhalatoren én gang.

- 5 Bliv ved med at trække vejret ind langsomt og så dybt, du kan.

- 6 Hold vejret, tæl til 10, og pust ud.

- 7 Hvis lægen siger, at du skal tage et pust mere, skal du gøre det.

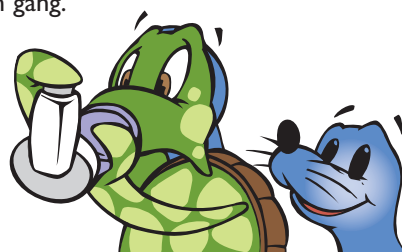

Hvis du bruger ansigtsmaske

– Tryk, og hold den hen over næse og mund. Sprøjt et pust medicin ind i kammeret, og træk vejret ind og ud gennem munden, i alt 6 vejrtrækninger.




Rengøring af kammeret

- 1 Vask spaceren en gang om ugen.

- 2 Fjern hættten over mundstykket.



- 3 Drej mundstykket, og løft det af.

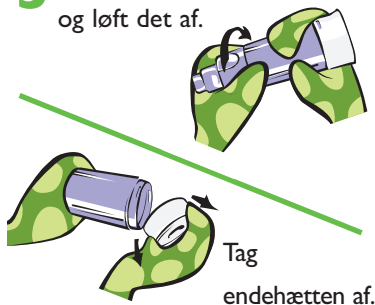

- 4 Sæt delene i blød i varmt sæbevand i 10 minutter.



- 5 Skyl med rent vand, og lad dem lufttørre.

- 6 Sæt delene sammen igen, og læg dem et tørt og sikkert sted.

**Philips Healthcare er en del af
Royal Philips**

Kontakt os

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Asien
+49 7031 463 2254

Europa, Mellemøsten, Afrika
+49 7031 463 2254

Philips Danmark SRC
-45 39771700

Latinamerika
+55 11 2125 0744

Nordamerika
+1 425 487 7000
+1 800 285 5585 (gratis, kun USA)

Respironics Respiratory Drug
Delivery (UK) Ltd
Chichester Business Park, City Fields Way
Tangmere, Chichester PO20 2FT
Storbritannien

Kundeservice
+1 724 387 4000
+1 800 345 6443 (gratisnummer, kun USA)

Philips Respironics Asien og Stillehavet
+65 6882 5282

Philips Respironics Australien
+61 (2) 9947 0440
+1300 766 488 (gratisnummer, kun
Australien)

Philips Respironics Kina
+86 400 828 6665
+86 800 828 6665

Philips Respironics Tyskland
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics Frankrig
+33 2 51 89 36 00

Philips Respironics Italien
+39 039 203 1

Philips Respironics Sverige
+46 8 120 45 900

Philips Respironics Schweiz
+41 6 27 45 17 50

Philips Respironics Storbritannien
+44 800 1300 845

www.philips.com/respironics

Respironics, Sami the Seal og Tucker the Turtle er varemærker
tilhørende Koninklijke Philips N.V. og dennes datterselskaber.
Alle rettigheder forbeholdes.



Se mere på www.philips.com/asthma



© 2018 Koninklijke Philips N.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Philips Healthcare forbeholder sig retten til at foretage ændringer i specifikationer og/eller ophøre et hvilket som helst produkt på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel eller forpligtelse og vil ikke have ansvaret for nogen følger på grund af anvendelsen af denne publikation.

KS 7/26/18 PN1551905