

Pålidelig inhalationsbehandling

OptiChamber Diamond hjælper dig med at få din inhalationsmedicin helt ned i lungerne, der hvor det virker.

Følg disse instruktioner, og læs også brugsvejledningen i æsken som følger med din OptiChamber Diamond.



1 Fjern hæfterne fra både inhalationsmedicinen samt din OptiChamber Diamond. Hvis der er nogen form for fremmedlegemer i kammeret, skal disse fjernes før brug.



2 Indsæt mundstykket fra din inhalationsmedicin i den flexible del på OptiChamber Diamond



3 Hvis det er nødvendigt med en maske, placer da masken på din OptiChamber Diamond i modsatte ende af kammeret, og vrid let så masken sidder tæt og stabilt.



4 Ryst din OptiChamber Diamond.



5 Slut læberne tæt omkring mundstykket. Pust ud. Tryk én gang på inhalationsmedicinen og tag 2-5 indåndinger.*



6 Hvis OptiChamber Diamond 'fløjter' under indånding. Træk da vejret roligere. Hold vejret i op til 8 sekunder, og ånd derefter ud.



7 Hvis du benytter en maske, skal denne placeres tæt omkring næse og mund. Tryk én gang på inhalationsmedicinen og tag 2-5 indåndinger.*



8 Når du trækker vejret vil en udåndningsventil åbne sig så du bedre kan følge din inhalationsbehandling.

*Hvis din læge har ordineret mere end ét pust, vent da ca. 1 minut og gentag herefter trin 4-8.