



System One BiPAP Auto

Philips RespiPAP

## Setup – Einstellungen


Beenden	Erinnerung
Info	Setup

Unter der Auswahl Setup im klinischen Menü finden Sie folgende Einstellmöglichkeiten:

<b>Modus</b>	<b>Auto Bi-Level</b> <b>Bi-Level</b> <b>CPAP</b>	Therapiemodus
<b>Nur im Auto Bi-Level Modus</b>		
<b>Max IPAP</b>	<b>(minEPAP+3) – 25.0</b>	Maximaler IPAP, einstellbar von Min EPAP+3 bis 25 mbar
<b>Min EPAP</b>	<b>4.0 – (maxIPAP-3)</b>	Minimaler EPAP, einstellbar von 4 bis Max IPAP-3 mbar
<b>Max PS</b>	<b>3 – 8</b> <b>maxIPAP – minEPAP</b>	Maximale Druckunterstützung, einstellbar von 3 bis 8 mbar oder Differenz von Max IPAP - Min EPAP, falls geringer als 8 mbar
<b>IPAP</b>	<b>(EPAP) – 25.0</b>	25 mbar bei Bi-Level Modus
<b>EPAP</b>	<b>4.0 – (IPAP)</b>	IPAP bei Bi-Level Modus
<b>CPAP Druck</b>	<b>4.0 – 20.0</b>	Im CPAP Modus
<b>Flex-Typ</b>	<b>Kein Flex</b> <b>C-Flex</b> <b>C-Flex+</b> <b>Kein Flex</b> <b>C-Flex</b> <b>Bi-Flex</b>	im CPAP Modus im Bi-Level und Auto Bi-Level Modus
<b>Flex</b>	<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b>	Flex-Stufe einstellbar
<b>Flex Sperre</b>	<b>EIN</b> <b>AUS</b>	„Ein“ sperrt die Einstellung der Flex-Stufe im Patientenmenü Setup.
<b>Anstiegszeit</b>	<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b>	Bei Bi-Level und Auto Bi-Level Modus wenn Flex deaktiviert: Anstiegszeit von 1 bis 3 einstellbar: 1 entspricht 200 ms, 2 entspricht 300 ms, 3 entspricht 400 ms.
<b>Anstiegszeit sperren</b>	<b>EIN</b> <b>AUS</b>	„Ein“ sperrt die Einstellung der Anstiegszeit im Patientenmenü Setup.
<b>Schlauchtyp</b>	<b>15</b> <b>22</b>	Verwendeten Schlauchtyp einstellen: 15 mm oder 22 mm (Standard). Der jeweilige Schlauchwiderstand wird vom Gerät kompensiert.
<b>Schlauchtyp sperren</b>	<b>EIN</b> <b>AUS</b>	„Ein“ sperrt die Einstellung des Schlauchtyps im Patientenmenü Setup.
<b>System One Widerstandkontrolle</b>	<b>0</b> <b>X1</b> <b>X2</b> <b>X3</b> <b>X4</b> <b>X5</b>	Einstellung, um bei Spezialmasken den Maskenwiderstand zu kompensieren. 0 für Standardmasken.
<b>System One sperren</b>	<b>EIN</b> <b>AUS</b>	„Ein“ sperrt die Widerstandkontrolle im Patientenmenü Setup.
<b>Rampendauer</b>	<b>0:00 – 0:45</b>	Dauer der Einschlaframpe von 0 (aus) bis 45 Minuten. Wird nicht angezeigt, falls CPAP oder EPAP nur auf 4 mbar eingestellt ist.
<b>Rampenstart</b>	<b>4.0 – (minEPAP/CPAP pres)</b>	Druck, bei dem die Einschlaframpe beginnt. Wird nicht angezeigt, wenn die Rampendauer 0 ist.
<b>Nur bei angeschlossenem Befeuchter</b>		
<b>System One Befeuchtung</b>	<b>EIN</b> <b>AUS</b>	„Ein“ für automatische Steuerung der Befeuchterleistung über Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur. „Aus“ für eine konstante Heizleistung.
<b>Luftbefeuchter</b>	<b>0</b> <b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b>	Definiert die Einstellung des Befeuchters beim Therapiestart. Stufen 1 bis 5 entsprechen einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70 bis 95%. Stufen C1 bis C5 (System One Befeuchtersteuerung aus) für konstante Heizleistung.
<b>Einschaltautomatik</b>	<b>EIN</b> <b>AUS</b>	Therapiegerät schaltet sich automatisch durch Atmen am Gerät ein.
<b>Abschaltautomatik</b>	<b>EIN</b> <b>AUS</b>	Therapiegerät schaltet sich automatisch nach einer gewissen Zeit ab, wenn die Maske abgesetzt wird.
<b>Maskenalarm</b>	<b>EIN</b> <b>AUS</b>	Bei großem Leck Maskenalarm im Display und akustisches Alarmsignal.
<b>Nur im Auto Bi-Level Modus</b>		
<b>Maskentest</b>	<b>EIN</b> <b>AUS</b>	„Ein“ erlaubt dem Patienten den Sitz der Maske vor der Therapie über eine Messung der Leckage zu überprüfen.
<b>Beleuchtung Rampe</b>	<b>EIN</b> <b>AUS</b>	„Ein“: Die Rampentaste und Befeuchterstufen sind während der Therapie gedimmt beleuchtet.
<b>AHI/Leck/CSR zeigen</b>	<b>EIN</b> <b>AUS</b>	„Ein“ ermöglicht eine Abfrage von AHI/Leck/CSR durch den Patienten im Menü Info.
<b>Nur im Auto Bi-Level Modus</b>		
<b>Split-Night</b>	<b>AUS</b> <b>120</b> <b>180</b> <b>240</b>	Split-Night Modus: Die erste Hälfte der Nacht wird BiPAP-Therapie abgegeben, die zweite Hälfte der Nacht BiPAP-Auto-Therapie. Dauer der ersten Nachthälfte 120, 180 oder 240 Minuten.
<b>SPRACHE</b>	<b>EN</b> <b>DE</b> <b>FR</b> <b>ES</b> <b>IT</b> <b>BR</b> <b>0</b>	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch. 0 für Symbole.
<b>Zurück</b>	<b>Zurück</b>	Zurück ins Hauptmenü für den klinischen Benutzer.

Dieses Taschenhandbuch ersetzt nicht das vollständige Handbuch. Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie bitte den Handbüchern der jeweiligen Geräte.

# BEDIENELEMENTE

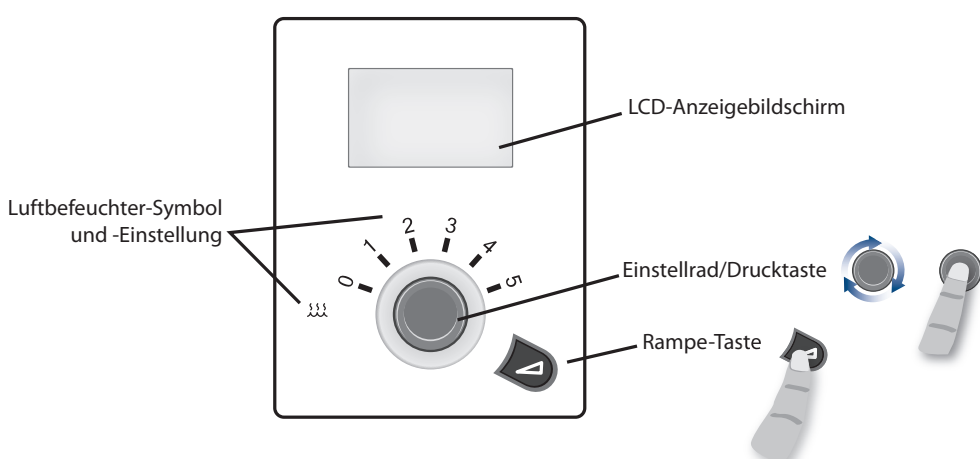

# PATIENTENMENÜ

Therapie	Flex
Info	Setup

## Therapie

Startet die Therapie durch Druck auf das Einstellrad. Grundstellung des Menüs.



**Hinweis:** Falls der Patient den Menüknopf versehentlich verdreht, springt System One nach 10 Sek. ohne Aktivität automatisch zurück in das Patientenmenü zu „Therapie“. Der Patient kann durch Drücken des Einstellrads wie gewohnt die Therapie starten.

Therapie	Flex
Info	Setup

## Flex

Einstellungen zu Flex und Flex-Demo Modus.

Therapie	Flex
Info	Setup

## Info

Abfrage von Therapiestunden und Historie wichtiger Therapieparameter (falls vom klinischen Betreuer für den Patienten freigegeben).

Therapie	Flex
Info	Setup

## Setup

Für den Patienten freigegebene weitere Therapieeinstellungen.

Therapie	Flex
Info	Setup

## Abfrage der Therapiestunden

Am Gerätedisplay können vom Patienten die Therapiestunden wie folgt ausgelesen werden: Im Patientenmenü Info auswählen.



Im Menü Info den Menüpunkt Abfrage wählen.



Im Menü Abfrage werden die Therapiestunden angezeigt.

## Maskentest

Nur im Modus Auto-Bi-Level.

Der Maskentest ermöglicht dem Patienten den korrekten Sitz seiner Maske vor der Therapie selbst zu überprüfen. Diese Funktion muss vom klinischen Betreuer für den Patienten freigegeben sein.

Drückt man die Rampe-Taste (siehe Bedienfeld) wenn das Gerät noch keinen Therapedruck abgibt, startet der Maskentest. Das Gerät gibt für 40 Sek. einen Testdruck ab. Am Ende des Tests gibt ein Häkchen im Display einen guten Sitz der Maske an. Ein Kreuz deutet auf einen noch zu verbessernden Sitz der Maske hin.



Guter Maskensitz



Zu verbessernder Maskensitz

# KLINISCHES MENÜ

Therapie	Flex
Info	Setup

## Therapieparameter einstellen

Wechsel in das klinische Menü zum Einstellen von Therapieparametern:

Im Patientenmenü den Menüpunkt Setup anwählen (dunkel hinterlegt).

Dann Drehkopf und Rampe-Taste gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt halten und doppelten Piepton abwarten.

Beenden	Erinnerung
Info	Setup

Diese Einstellungen stehen im klinischen Menü zur Auswahl.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern oder die Herstellung zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen. Hinweis: Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die vollständige Bedienungsanleitung, die dem Gerät beiliegt.

Gedruckt in Deutschland. MCI 4104085 FEBRUAR 2011