

# System One PATIENTENMENÜ

Therapie	Flex
Info	Setup

## Therapie



Startet die Therapie durch Druck auf das Einstellrad. Grundstellung des Menüs.

**Hinweis:** Falls der Patient den Menüknopf versehentlich verdreht, springt System One nach 10 Sek. ohne Aktivität automatisch zurück in das Patientenmenü zu „Therapie“. Der Patient kann durch Drücken des Einstellrads wie gewohnt die Therapie starten.

Therapie	Flex
Info	Setup

## Flex

Einstellungen zu Flex und Flex-Demo Modus.

Therapie	Flex
Info	Setup

## Info

Abfrage von Therapiestunden und Historie wichtiger Therapieparameter (falls vom klinischen Betreuer für den Patienten freigegeben).

Therapie	Flex
Info	Setup

## Setup

Für den Patienten freigegebene weitere Therapieeinstellungen.

Therapie	Flex
Info	Setup

## Abfrage der Therapiestunden

Am Gerätedisplay können vom Patienten die Therapiestunden wie folgt ausgelesen werden:  
Im Patientenmenü Info auswählen.



Im Menü Info den Menüpunkt Abfrage wählen.



Im Menü Abfrage werden die Therapiestunden angezeigt.

## Maskentest

Nur bei System One REMstar Auto im Auto-CPAP Modus /

Nur bei System One BiPAP Auto im Auto-Bi-Level Modus.

Der Maskentest ermöglicht dem Patienten den korrekten Sitz seiner Maske vor der Therapie selbst zu überprüfen. Diese Funktion muss vom klinischen Betreuer für den Patienten freigegeben sein.



Drückt man die Rampe-Taste wenn das Gerät noch keinen Therapiedruck abgibt, startet der Maskentest. Das Gerät gibt für 40 Sek. einen Testdruck ab. Am Ende des Tests gibt ein Häkchen im Display einen guten Sitz der Maske an. Ein Kreuz deutet auf einen noch zu verbessernden Sitz der Maske hin.



Guter Maskensitz



Zu verbessernder Maskensitz