

PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs



menu



Moniteur Efficia CM Guide Easy Start

Notions essentielles
de mise en service
et configuration

PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs



Guide Easy Start - Efficia CM / 2016 . V01

menu

/cliquer sur le chapitre de votre choix/

Avant-propos
Naviguer dans le guide
Mise en service
Mode configuration
Réglages généraux
Vos suggestions
Index



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs



Avant-propos

Pour une prise en main rapide du moniteur Efficia, Philips met à votre disposition le **Guide Easy Start**. Il vous permettra de découvrir intuitivement les configurations essentielles et vous simplifiera sa mise en service.

Les moniteurs de la gamme Efficia sont performants, fiables et éprouvés. Ils mettent la technologie, la qualité et l'expérience Philips à portée de toutes les équipes soignantes. Ensemble, nous nous engageons à faciliter l'accès à des soins adaptés à travers le monde.

Pour une étude approfondie, vous pouvez vous reporter aux documents livrés avec le matériel (Manuel d'utilisation, Guides techniques).



1

Cliquez sur le logo Philips pour revenir à la page d'accueil du Guide.



2

Avancer ou reculer d'une page.

3

Accès au "Menu Principal" pour sélectionner un chapitre.

Naviguer dans le guide

Comment se déplacer à travers le guide ?

Pour bénéficier d'une expérience optimale, utilisez ce guide en même temps que votre moniteur.



4

Cliquez sur les liens ou vignettes signalés par un "+", afin d'obtenir d'avantage d'informations



5

Utilisez "l'Index" (via le "Menu Principal") pour sélectionner directement un thème



6

Utilisez directement les zones cliquables de l'interface : onglets et menus (voir chapitre "Menus de Configurations")

PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Suiv. >



À réception du moniteur vous disposez des éléments suivants :

Moniteur Efficia CM




Batteries (Option)




Rouleau de papier thermique (Option)




Crochets pour barrière de lit, CM100 et CM120 (Option)

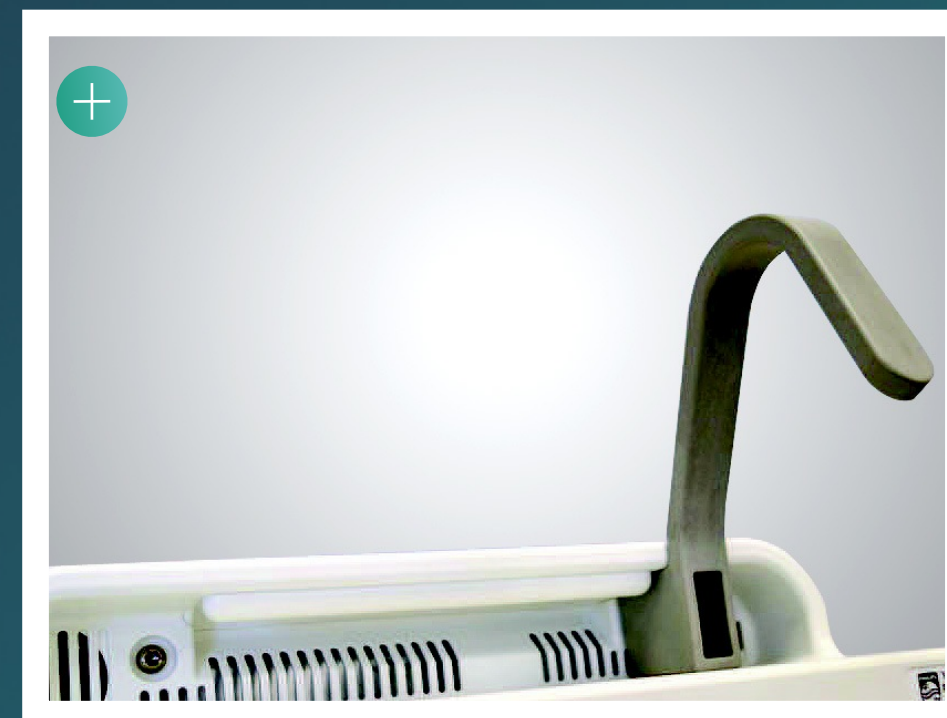

Cordon d'alimentation

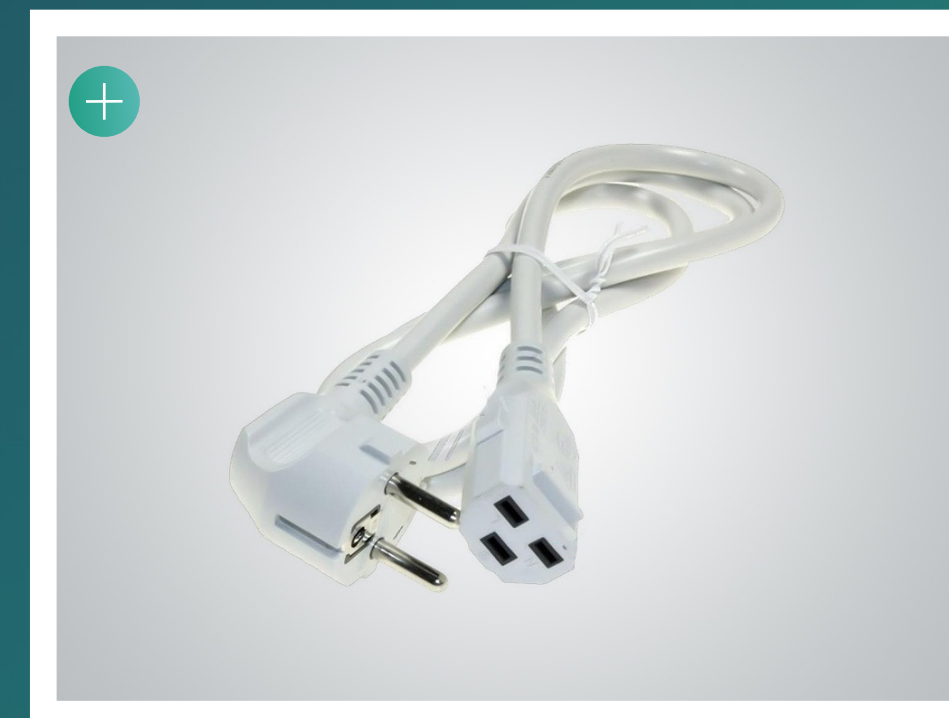

Documentation

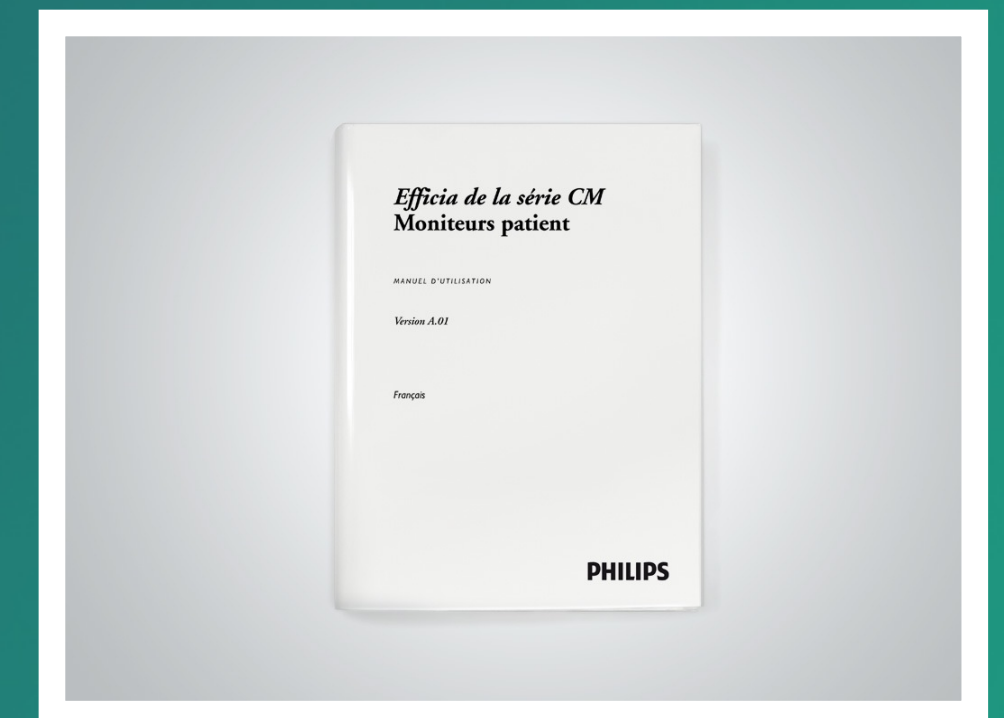

Mise en Service

Voyons ensemble

les 5 étapes de la mise en service du moniteur

- 1 Présentation du moniteur
- 2 Installation des batteries
- 3 Installation du papier thermique
- 4 Installation des crochets
- 5 Démarrage du moniteur

PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Le moniteur Efficia

Il propose une surveillance des paramètres physiologiques à la qualité éprouvée, dont bénéficient chaque année **200 millions de patients à travers le monde.**

Mise en Service Les 5 étapes

- 1** **Présentation du moniteur (1/4)**
moniteur / interface utilisateur / paramètres / connectivité
- 2** Installation des batteries
- 3** Installation du papier thermique
- 4** Installation des crochets
- 5** Démarrage du moniteur




Une gamme de tailles d'écrans jusqu'à 15" (38 cm) et des choix de configurations pour les différentes catégories de patients et environnements de soins.

Solides et fiables, les moniteurs Efficia sont capables de gérer d'importantes sollicitations, des chocs physiques et des interférences électromagnétiques.

Légers et portables pour une utilisation mobile.

La gamme Efficia a été récompensée notamment par l'**IF Design Awards 2015** et le **Red Dot Product Design 2014 et 2015**.

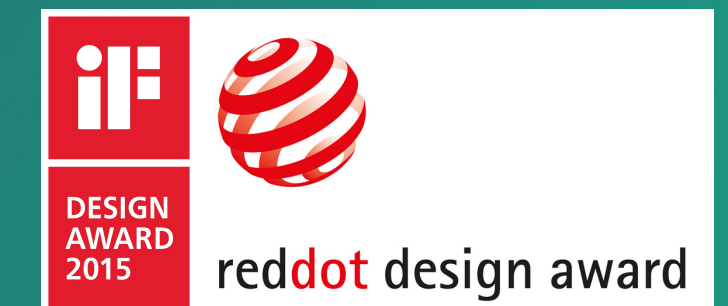

PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs


Mise en Service

Les 5 étapes

- 1 **Présentation du moniteur (2/4)**
moniteur / **interface utilisateur** / paramètres / connectivité
- 2 Installation des batteries
- 3 Installation du papier thermique
- 4 Installation des crochets
- 5 Démarrage du moniteur

L'interface utilisateur

La **qualité d'écran** du moniteur Efficia propose un affichage clair et précis, pour vous donner une **lecture immédiate des données vitales** de vos patients.

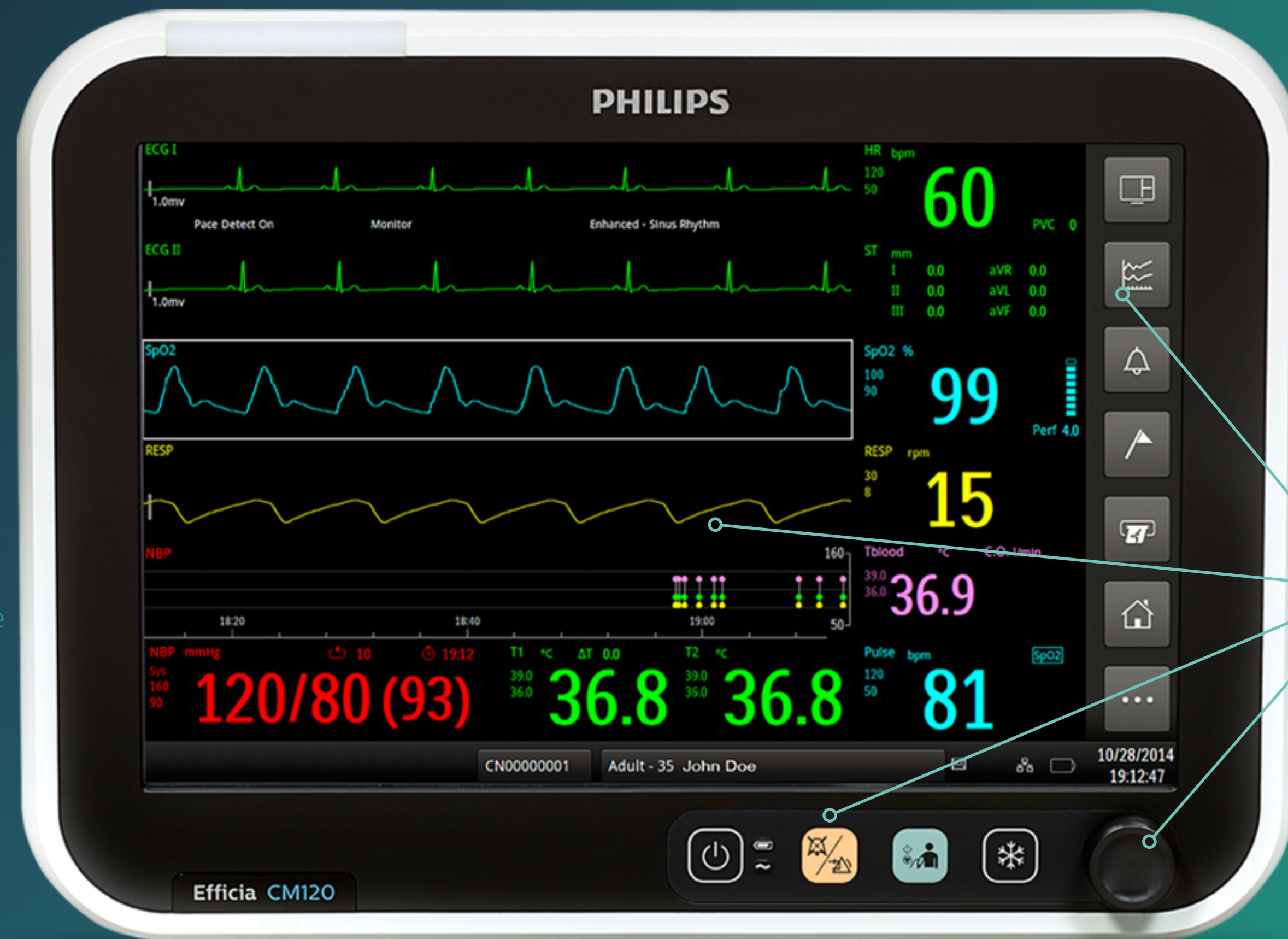

Un écran tactile et des touches d'accès rapide vous permettent une **sélection intuitive** des fonctions essentielles.



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs



Les paramètres patient

Une offre configurable pour la prise en charge des paramètres physiologiques de vos patients. Accès à l'offre étendue d'accessoires et capteurs patients de Philips.

Mise en Service Les 5 étapes

1 Présentation du moniteur (3/4)
moniteur / interface utilisateur / paramètres / connectivité

2 Installation des batteries

3 Installation du papier thermique

4 Installation des crochets

5 Démarrage du moniteur



Autonomie

Deux batteries facilement accessibles permettent **une surveillance continue jusqu'à 12 heures** lors d'un transport ou en cas d'absence d'alimentation électrique (option suivant modèle).

PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs



La connectivité

Connectivité "plug and play" avec le poste central Philips Efficia ou
Connectivité HL7 intégrée pour l'interfaçage avec les systèmes d'information hospitaliers.

Une interface Vidéo VGA pour connexion sur moniteur externe.

Interface configurable Relais « Appel Infirmière »


Ports USB pour l'export et l'import de vos configurations et un interfaçage RS232 (nécessite un convertisseur)

Synchro ECG

Alimentation

Mise en Service Les 5 étapes

- 1 Présentation du moniteur (4/4)**
moniteur / interface utilisateur / paramètres / **connectivité**
- 2 Installation des batteries
- 3 Installation du papier thermique
- 4 Installation des crochets
- 5 Démarrage du moniteur

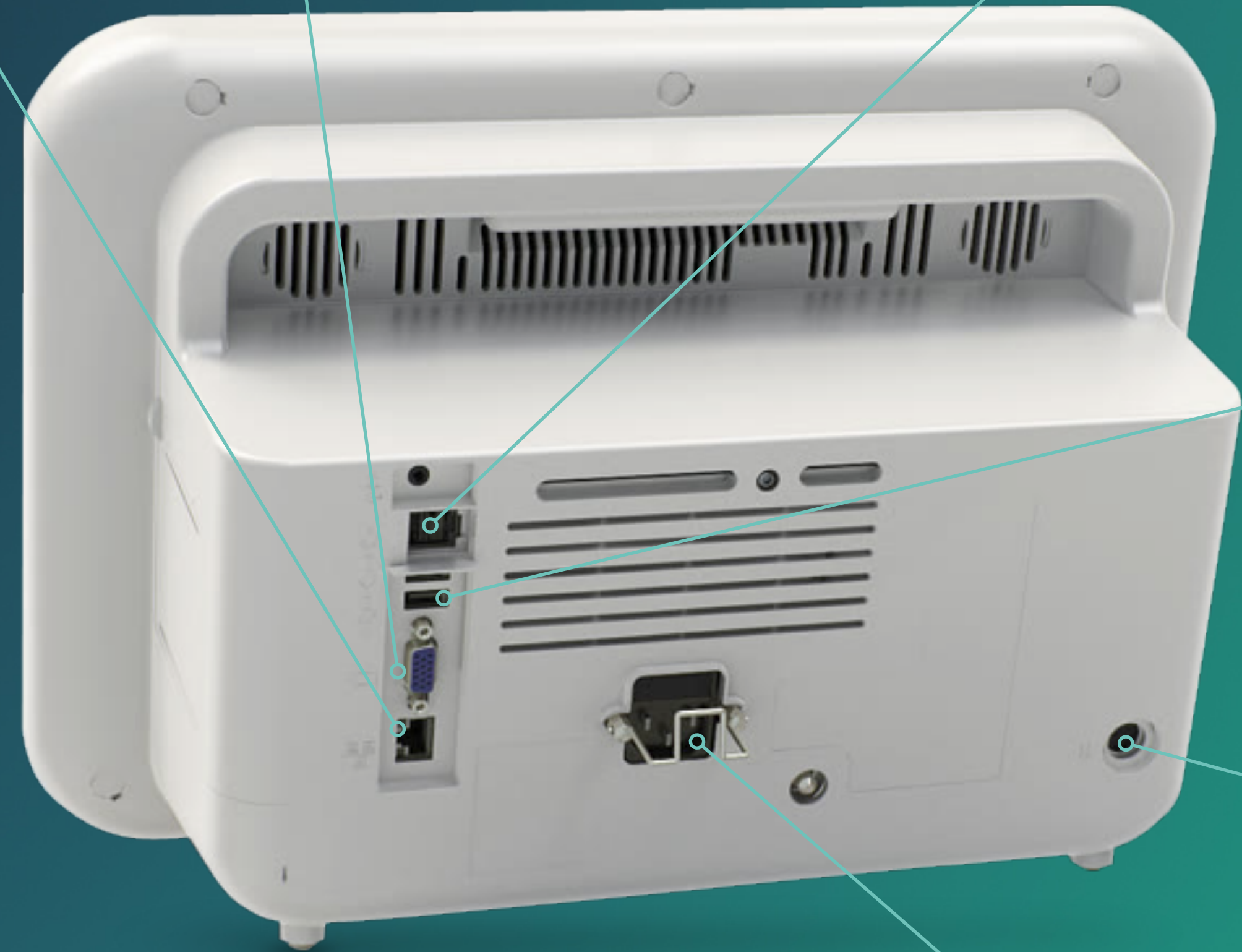

PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Mise en Service

Les 5 étapes

(Note : optionnel en fonction du modèle et des options retenues)


- 1 Présentation du moniteur
- 2 Installation des batteries**
- 3 Installation du papier thermique
- 4 Installation des crochets
- 5 Démarrage du moniteur

1.A Insérez un tournevis plat dans l'encoche prévue à cet effet, tenez une main sur le couvercle de batterie et faites pivoter légèrement le tournevis pour ouvrir le couvercle.




Encoche

1.B Libérez le verrou de blocage, insérez la ou les batteries.

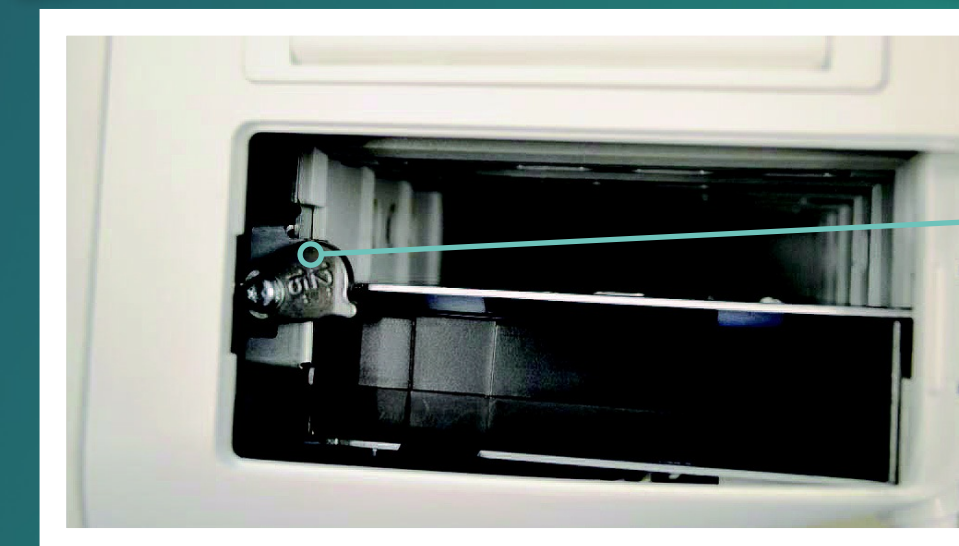

Verrou de blocage

1.C Veillez à maintenir le ruban noir vers le bas lors de l'introduction des batteries.

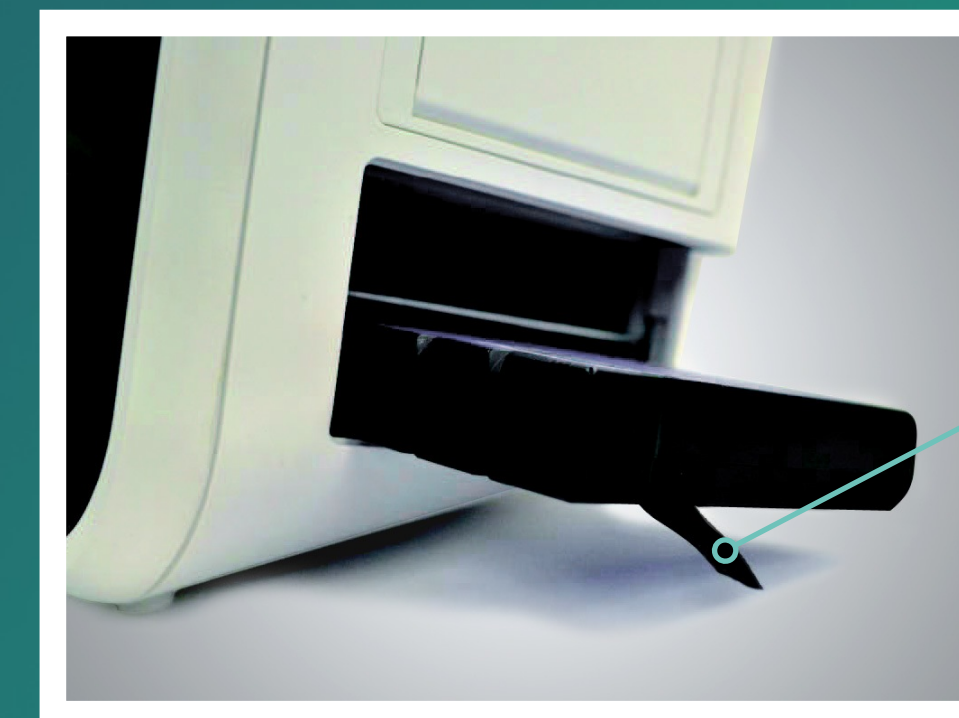

Ruban noir



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs


Mise en Service

Les 5 étapes

(Note : utilisez le papier thermique PHILIPS. Un papier non adapté pourrait endommager l'enregistreur.)


- 1 Présentation du moniteur
- 2 Installation des batteries
- 3 Installation du papier thermique**
- 4 Installation des crochets
- 5 Démarrage du moniteur

2.A Ouvrez l'enregistreur en appuyant sur le bouton situé en partie supérieure gauche de la porte.

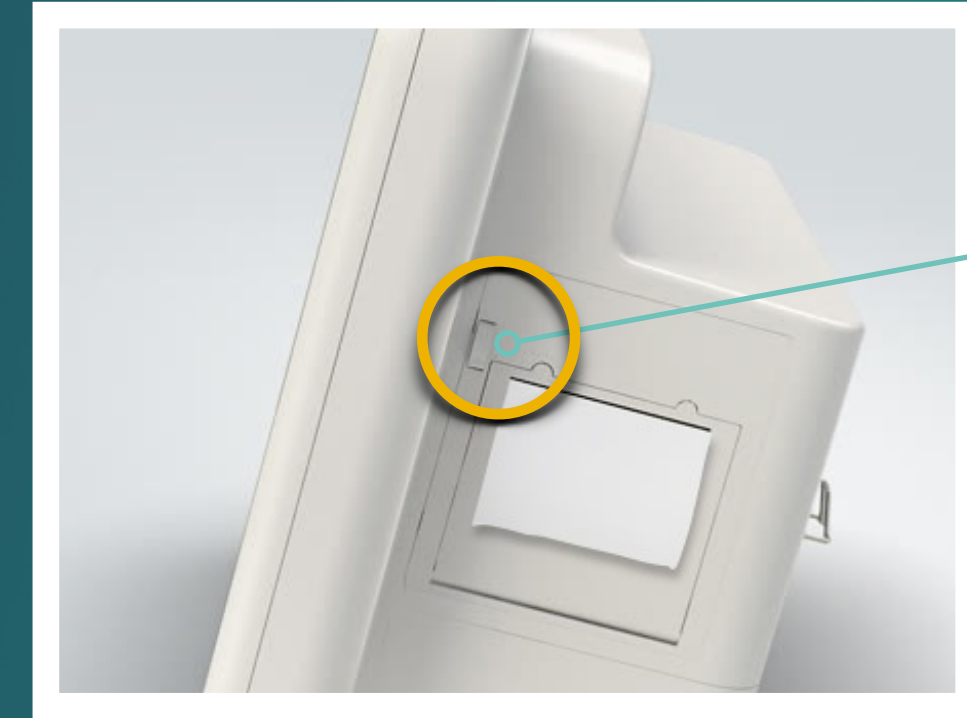


Bouton d'éjection

2.B Introduisez le rouleau dans l'enregistreur, comme indiqué sur la photo, et assurez-vous que le papier soit inséré correctement dans la fente de la porte.

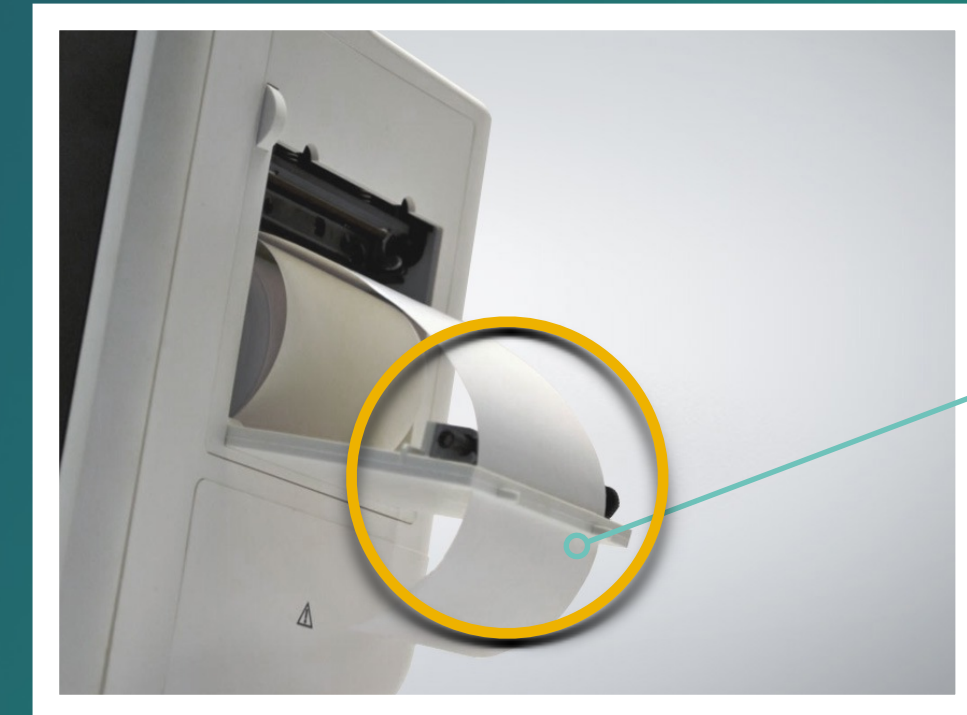

Fente de la porte

2.C Refermez la porte de l'enregistreur et faites un test d'impression en cliquant sur la touche « Enregistrement ». Si aucune donnée n'est imprimée, vérifiez la bonne mise en place du papier.

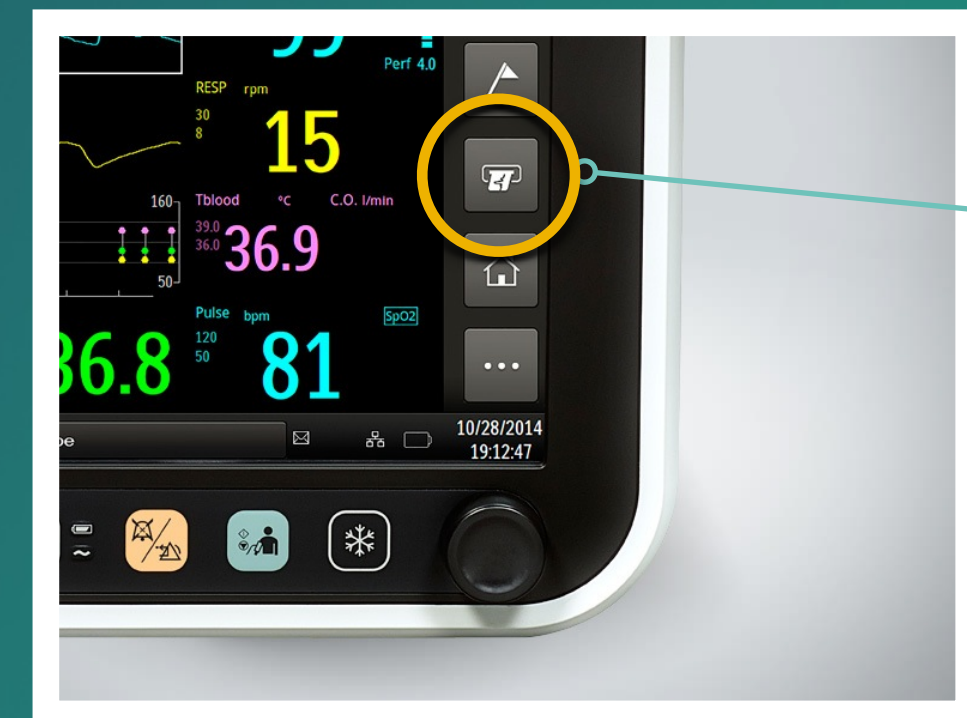

Bouton Enregistrement



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs


Mise en Service

Les 5 étapes

(Note : optionnel en fonction du modèle et des options retenues)

- 1 Présentation du moniteur
- 2 Installation des batteries
- 3 Installation du papier thermique
- 4 Installation des crochets**
- 5 Démarrage du moniteur

3.A Retirez, à l'aide d'un tournevis T20, les 2 vis localisées au-dessous de la poignée à l'arrière du moniteur.

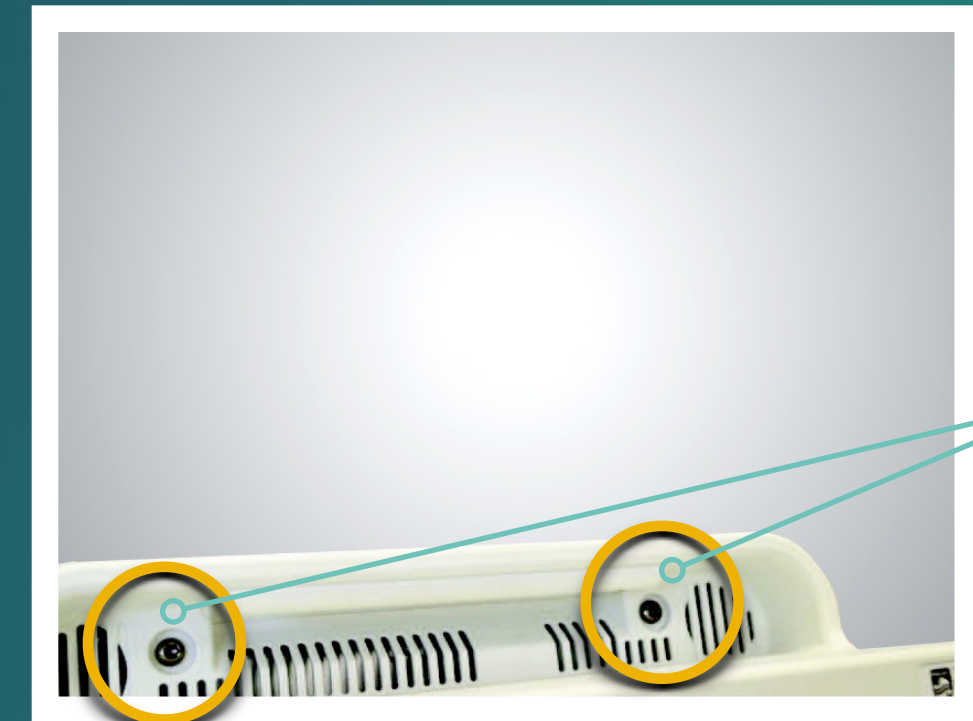

Vis

3.B Insérez les crochets puis repositionnez-les 2 vis.



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Mise en Service

Les 5 étapes

- 1 Présentation du moniteur
- 2 Installation des batteries
- 3 Installation du papier thermique
- 4 Installation des crochets
- 5 Démarrage du moniteur

4.A Connectez le cordon d'alimentation et assurez-vous que l'attache de sécurité est bien positionnée.



Attache de sécurité


4.B Allumez le moniteur en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Le moniteur effectue un auto test.



Zone d'affichage Date/Heure

Bouton Marche/Arrêt

4.C Vous pouvez modifier la date et l'heure en cliquant sur la zone d'affichage en bas de l'écran. N'oubliez pas de valider après votre modification.

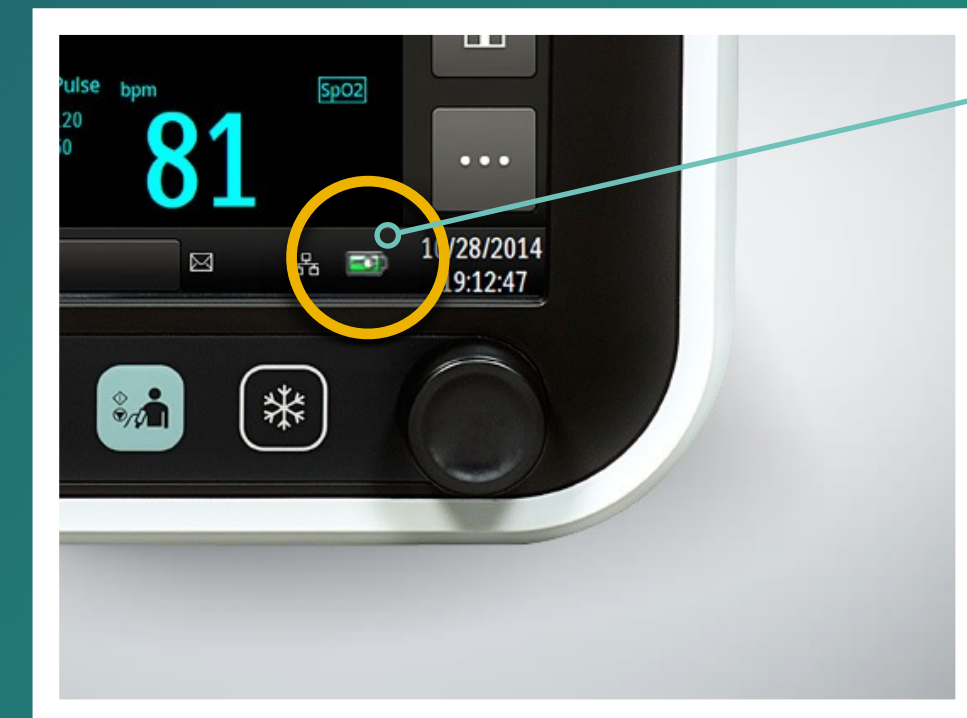

Témoin de charge

4.D Il est recommandé de charger complètement les batteries avant la mise en service. Un témoin de charge est affiché en bas de l'écran.

← Préc.



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Suiv. >



Mode Configuration Introduction

Le moniteur Efficia est un moniteur polyvalent que vous pouvez utiliser dans différents environnements de soins et niveaux de criticité (Adulte, Pédiatrique, Néonatalogie, Urgences, Bloc Opératoire, SSPI, Médecine ...). Chaque environnement peut nécessiter un mode d'utilisation spécifique et donc des réglages par défaut personnalisés.

Le moniteur Efficia est livré avec 3 pré-configurations au choix :

- **OR** (Operating Room) : Bloc Opératoire.
- **ICU** (Intensive Care Unit) : Unité de Soins Intensifs.
- **GW** (General Ward) : Unité de soins conventionnelle.

Ces 3 pré-configurations, que l'on appellera « **Profils** » sont établies pour des patients Adultes.

Les réglages du moniteur propres à ces 3 profils peuvent être modifiés et sauvegardés dans **3 nouveaux profils que vous personnaliserez** selon vos besoins et nommerez comme vous le souhaitez.

PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Mode Configuration Modification



Comment modifier les réglages par défaut dans ces profils ?

- 1 **Passez en revue chaque paramètre** (ECG, PNI, SpO2 ...) et modifiez les réglages cliniques si nécessaire (Exemples : fourchette d'alarmes, type de câble ECG 3 brins ou 5 brins, Intervalle de mesure PNI...) Tous ces réglages sont décrits dans le " Guide Easy Use ".
- 2 Une fois les réglages cliniques modifiés et adaptés à votre profil de surveillance, **passer en Mode configuration puis sauvegardez votre profil** en renommant l'une des 3 pré-configurations.
- 3 **Passez en revue les réglages généraux du Menu Système** et modifiez-les si besoin (cf détails dans le chapitre " Réglages généraux ").
- 4 Une fois ces réglages généraux éventuellement modifiés, **sauvegardez votre profil personnalisé.**
- 5 **Votre moniteur sera alors configuré selon vos besoins** et prêt pour une mise en service clinique.

En pages suivantes, vous trouverez **la procédure pour accéder au Mode Configuration et sauvegarder votre profil.**



PHILIPS

Efficia CM


Moniteurs



Accès Mode Configuration

- 1 Cliquez sur le bouton " ... "
- 2 Cliquez sur le bouton " Clé "
- 3 Sélectionnez l'un des 4 onglets
- 4 Saisissez le mot de passe 215
- 5 Mode configuration
- 6 Sauvegardez votre nouvelle configuration
- 7 Renommez votre profil personnalisé

Première page de boutons de commande

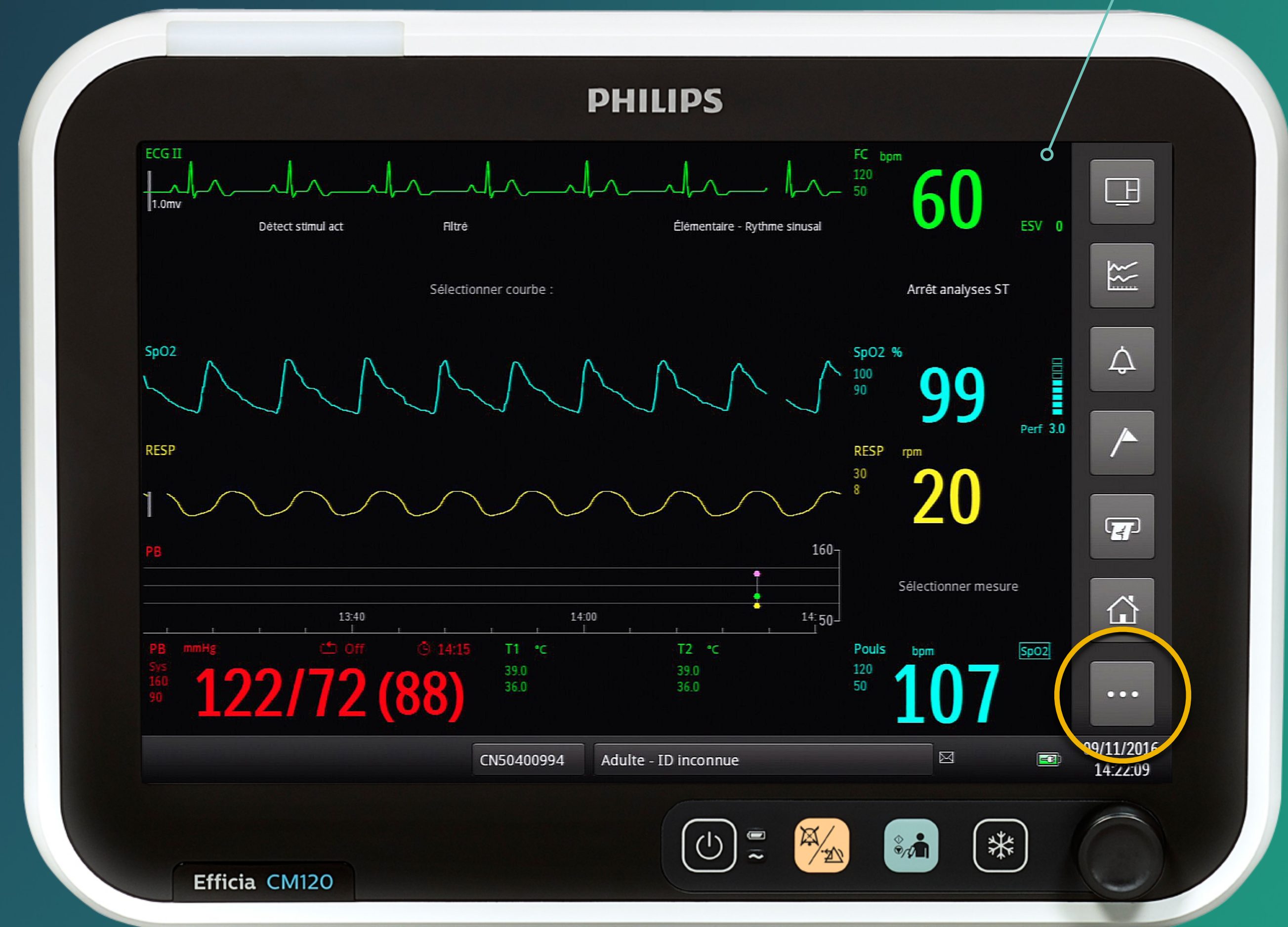

PHILIPS

Efficia CM


Moniteurs



Accès Mode Configuration

- 1 Cliquez sur le bouton "..."
- 2 Cliquez sur le bouton "Clé"
- 3 Sélectionnez l'un des 4 onglets
- 4 Saisissez le mot de passe 215
- 5 Mode configuration
- 6 Sauvegardez votre nouvelle configuration
- 7 Renommez votre profil personnalisé

Deuxième page de boutons de commande

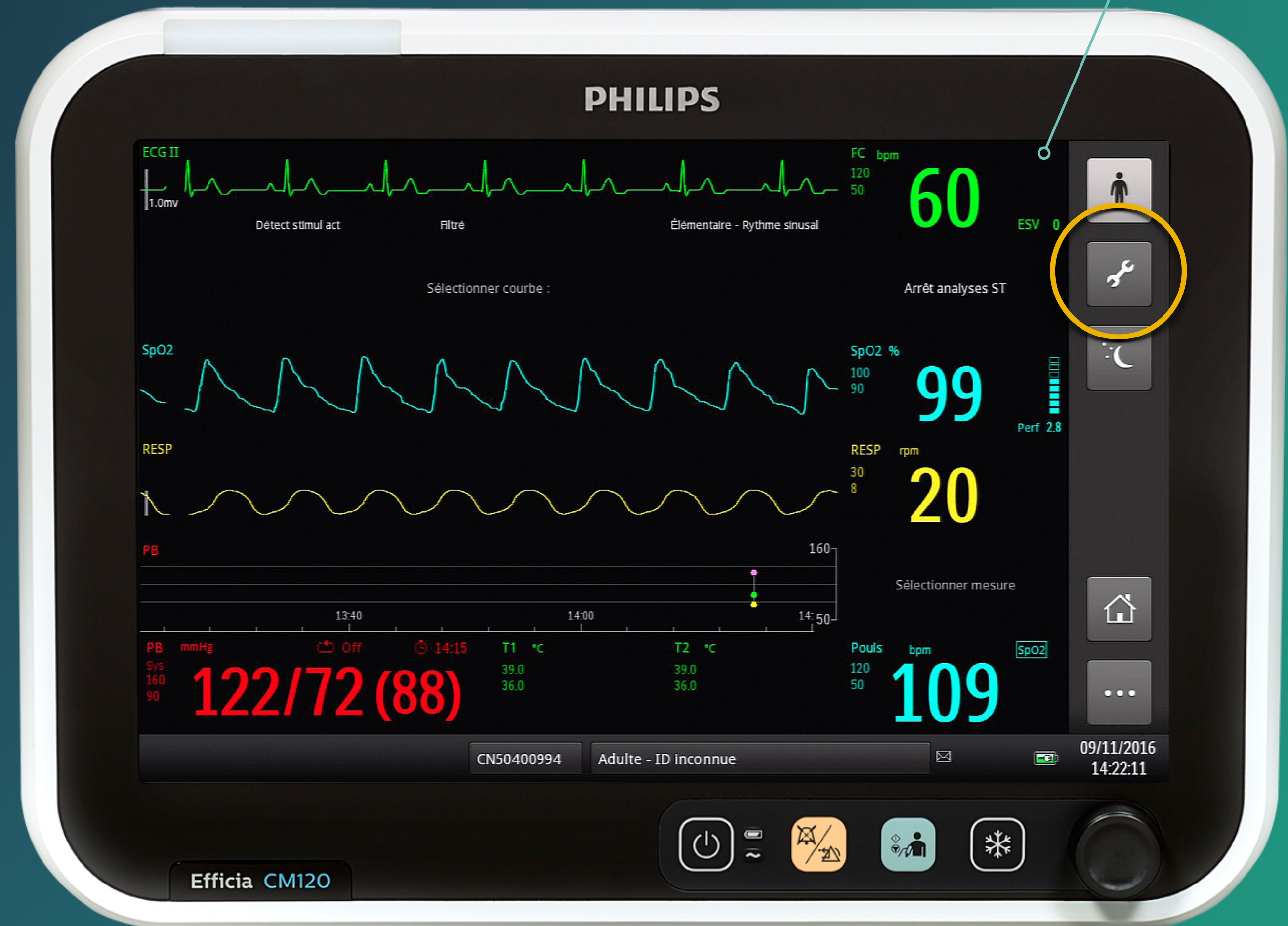

PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs



Accès Mode Configuration

Affichage par défaut de l'onglet Généralité



- 1 Cliquez sur le bouton "..."
- 2 Cliquez sur le bouton "Clé"
- 3 **Sélectionnez l'un des 4 onglets**
- 4 Saisissez le mot de passe 215
- 5 Mode configuration
- 6 Sauvegardez votre nouvelle configuration
- 7 Renommez votre profil personnalisé

PHILIPS

Efficia CM


Moniteurs

Accès Mode Configuration

- 1 Cliquez sur le bouton "..."
- 2 Cliquez sur le bouton "Clé"
- 3 Sélectionnez l'un des 4 onglets
- 4 **Saisissez le mot de passe 215**
- 5 Mode configuration
- 6 Sauvegardez votre nouvelle configuration
- 7 Renommez votre profil personnalisé



Le mot de passe sera nécessaire pour l'accès aux onglets Paramètres alarme, Paramètres PB, Profil et Admin.

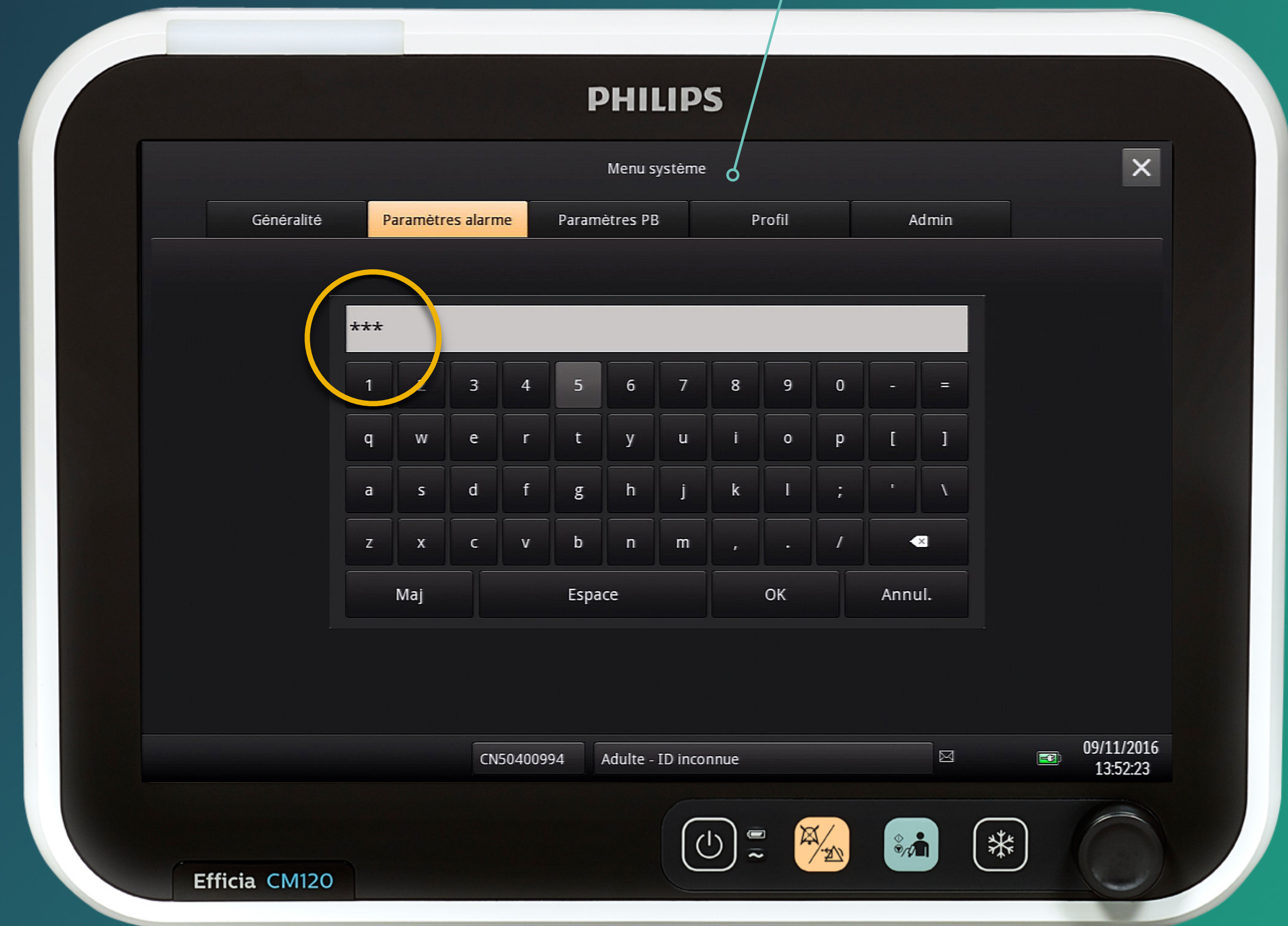

PHILIPS

Efficia CM


Moniteurs



Accès Mode Configuration

- 1 Cliquez sur le bouton "..."
- 2 Cliquez sur le bouton " Clé "
- 3 Sélectionnez l'un des 4 onglets
- 4 Saisissez le mot de passe 215
- 5 **Mode configuration**
- 6 Sauvegardez votre nouvelle configuration
- 7 Renommez votre profil personnalisé

Vous êtes désormais en mode configuration et avez accès aux onglets répertoriant tous les réglages généraux par défaut que vous pouvez personnaliser selon vos besoins.

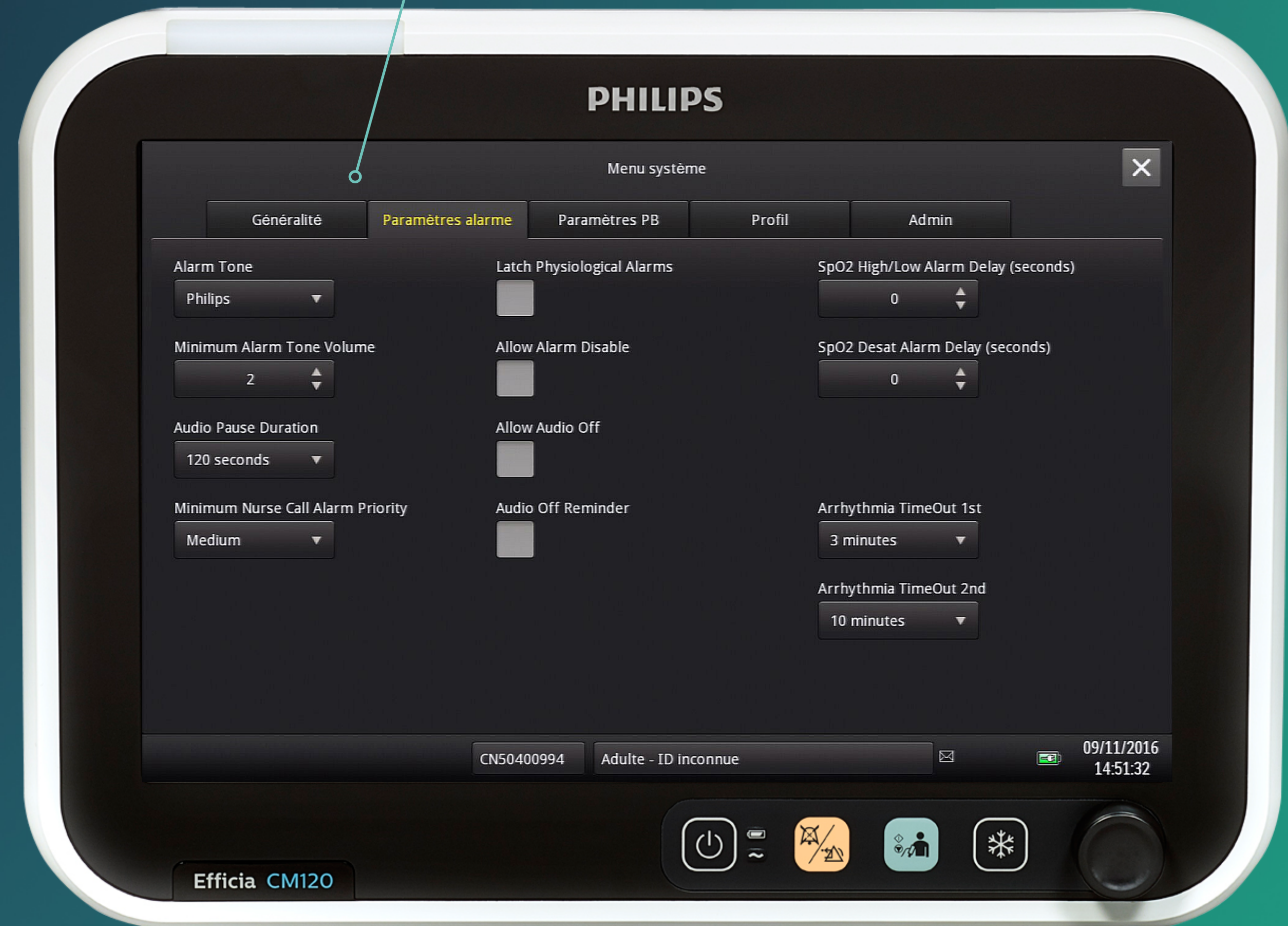

PHILIPS

Efficia CM


Moniteurs



Après avoir modifié les réglages généraux de votre choix, sauvegardez votre nouvelle configuration en cliquant sur l'onglet « Profil » puis « Save Current Settings » pour mémoriser vos réglages.

Accès Mode Configuration

- 1 Cliquez sur le bouton "..."
- 2 Cliquez sur le bouton "Clé"
- 3 Sélectionnez l'un des 4 onglets
- 4 Saisissez le mot de passe 215
- 5 Mode configuration
- 6 **Sauvegardez votre nouvelle configuration**
- 7 Renommez votre profil personnalisé

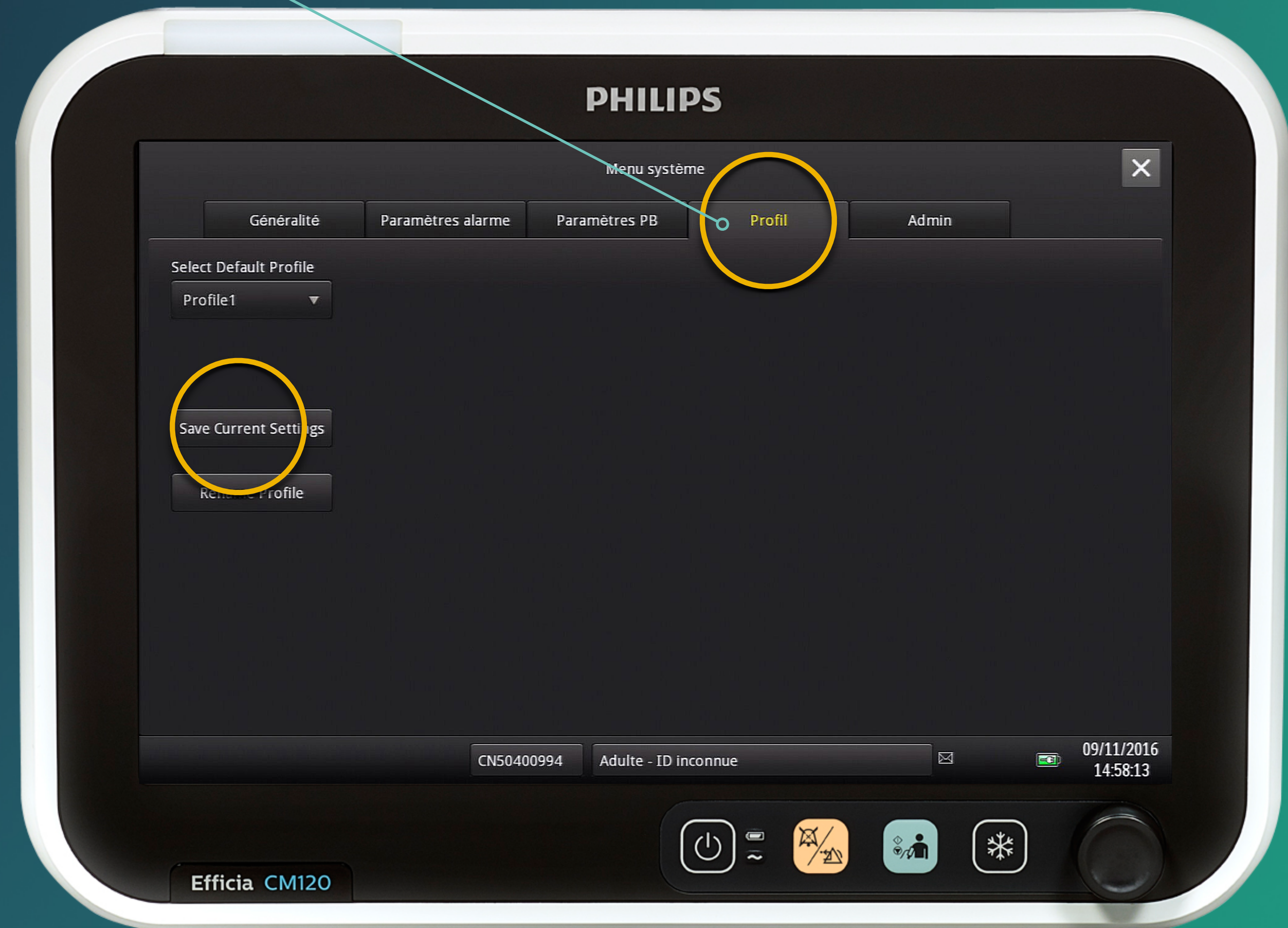

PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs


Accès Mode Configuration

- 1 Cliquez sur le bouton "..."
- 2 Cliquez sur le bouton "Clé"
- 3 Sélectionnez l'un des 4 onglets
- 4 Saisissez le mot de passe 215
- 5 Mode configuration
- 6 Sauvegardez votre nouvelle configuration
- 7 **Renommez votre profil personnalisé**

Sélectionnez l'un des trois profils personnalisables (Profils 1, 2 ou 3). Vous pouvez renommer le profil.

Pour revenir à l'écran de surveillance, il vous suffit de quitter le Menu Système en cliquant sur la croix.

Par sécurité, si vous revenez en Mode Configuration après 1 min il vous faudra ressaisir le mot de passe.

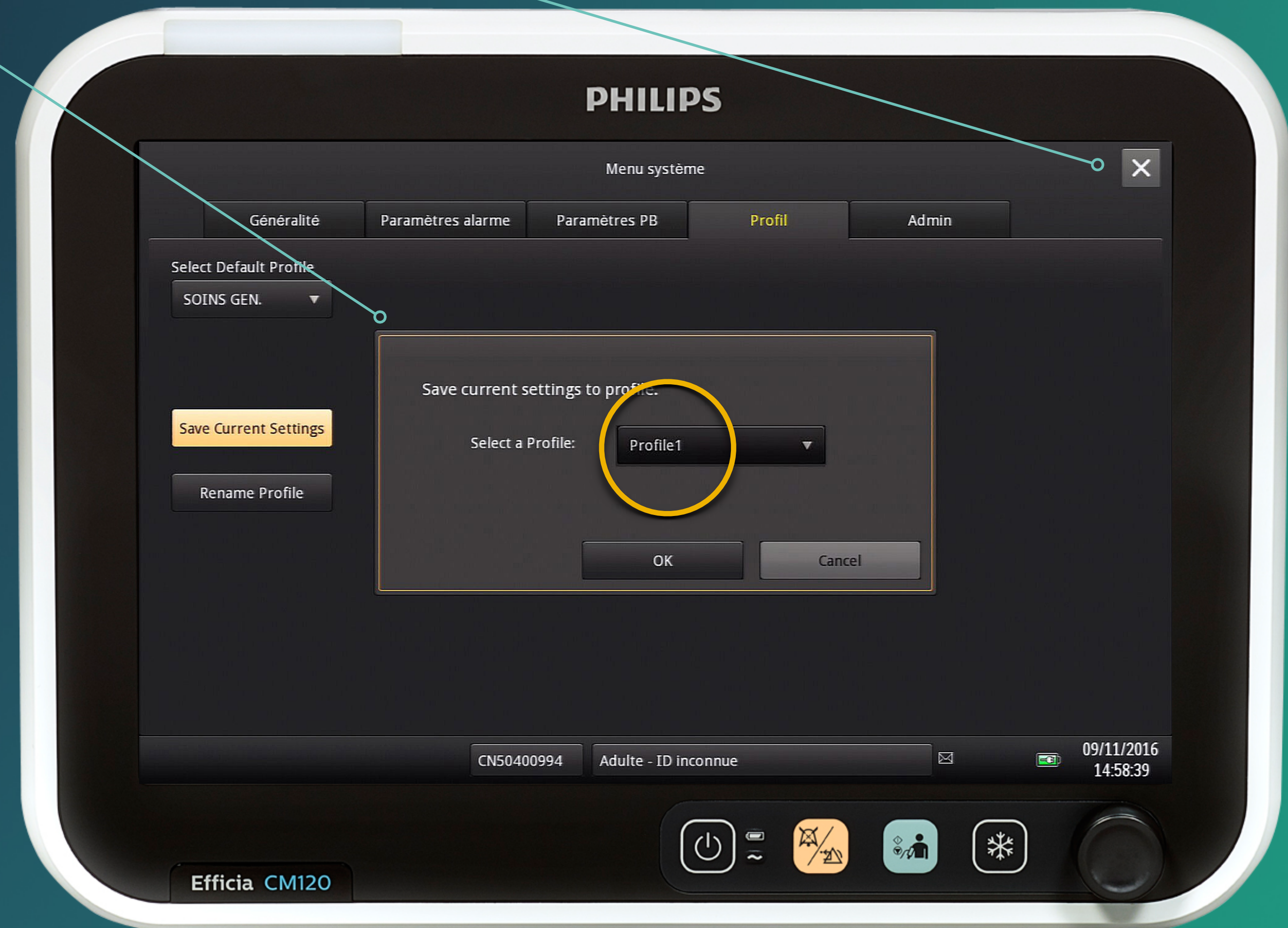

PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Suiv. >



Réglages généraux Navigation

Comment découvrir, dans les pages suivantes les principaux réglages généraux du moniteur Efficia ?

Pour bénéficier d'une expérience optimale, utilisez ce guide en même temps que votre moniteur.


Dans les pages suivantes vous pourrez cliquer sur l'**un des 5 onglets**.

1

2

Vous pourrez également cliquer sur l'**un des sous-menus**.

Certains menus secondaires ne seront pas détaillés (non cliquables).

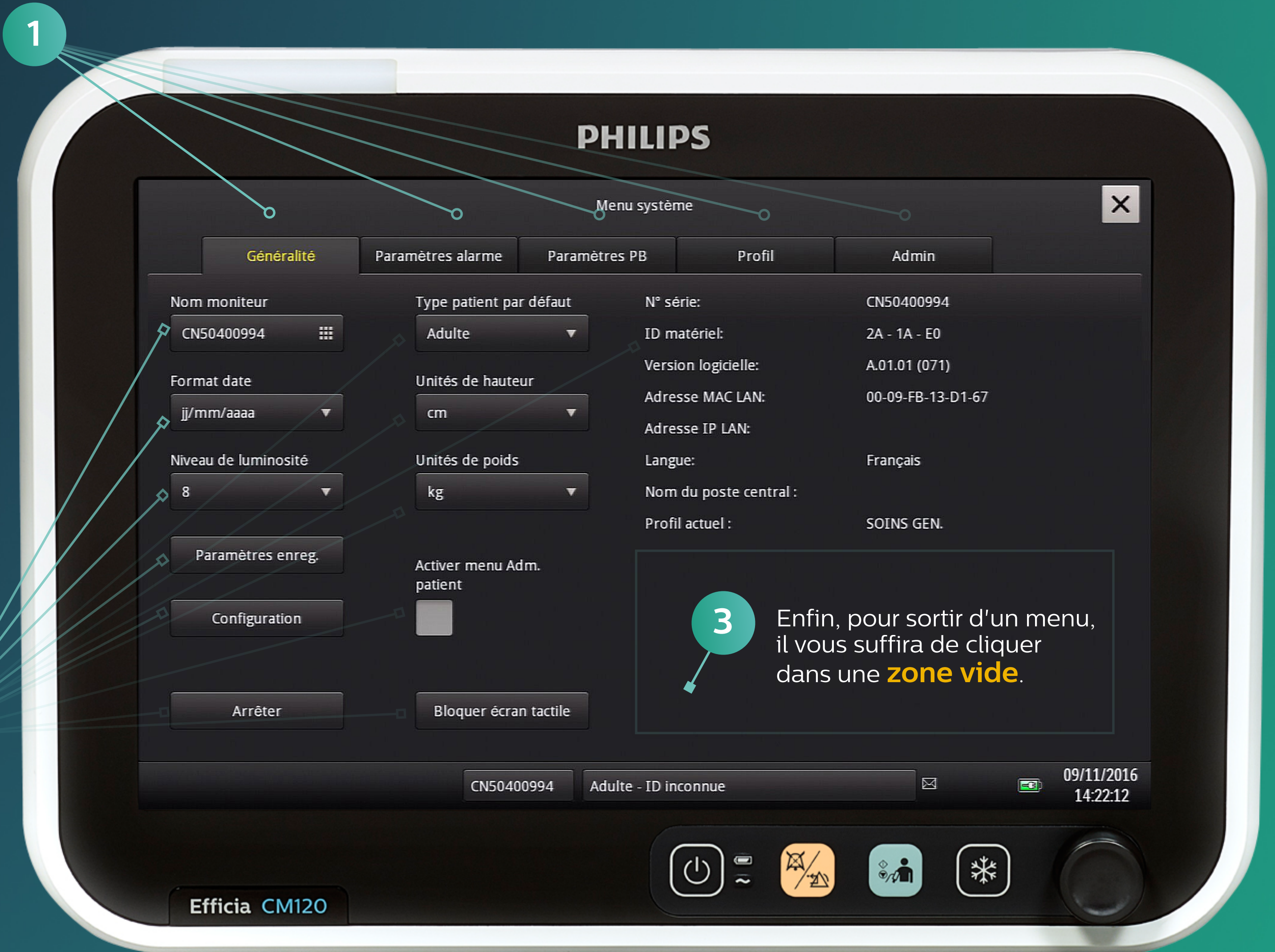

3

Enfin, pour sortir d'un menu, il vous suffira de cliquer dans une **zone vide**.

PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Onglet Généralité

Cliquez librement sur un des sous-menus de l'onglet Généralités pour découvrir ses principaux réglages.



PHILIPS


Efficia CM

Moniteurs

Nom moniteur

Permet de modifier le nom du moniteur.

Vous pouvez choisir le numéro de chambre ou une autre information d'identification, en particulier si le moniteur est connecté au système de surveillance central.

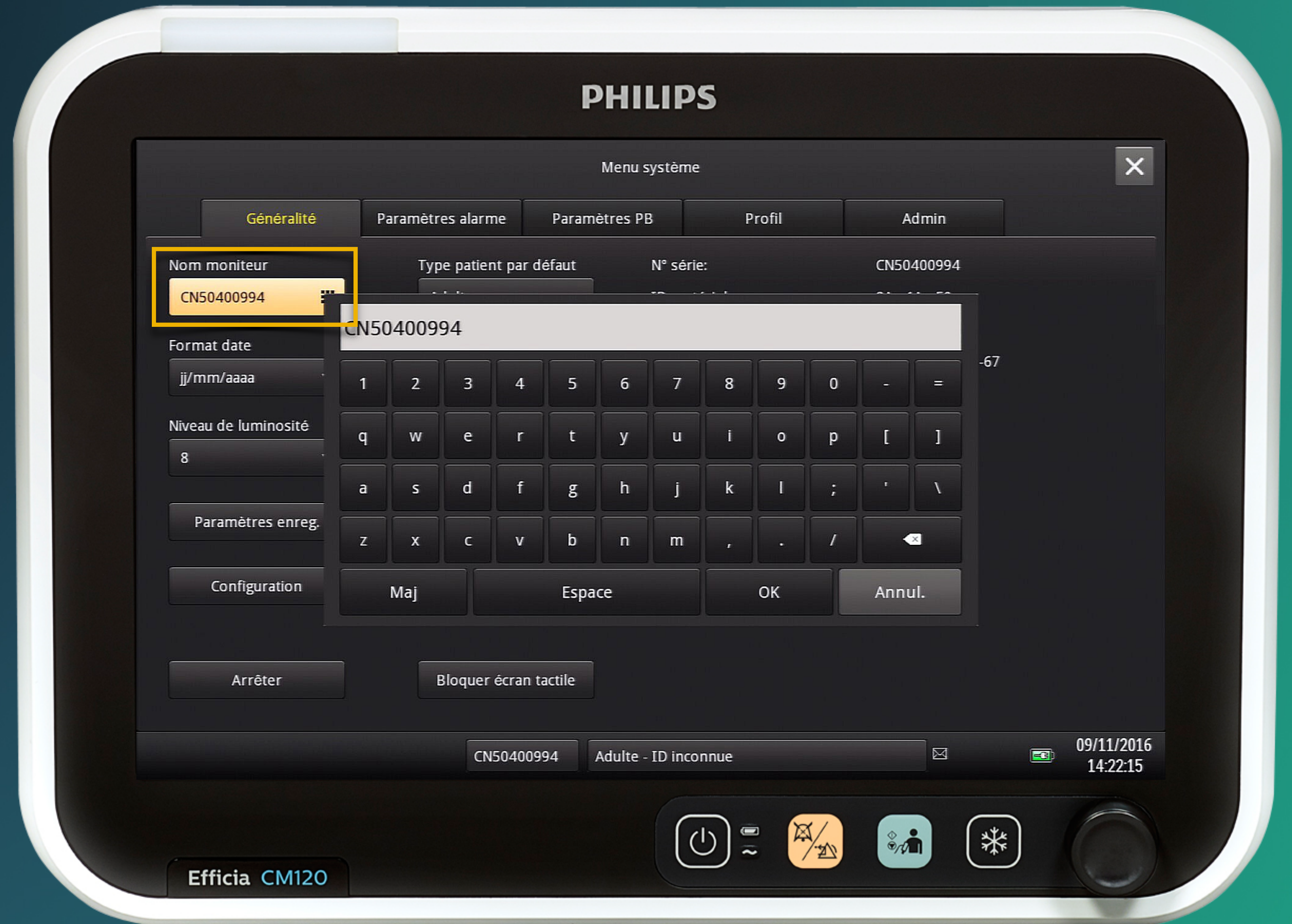

PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Format date

Permet de changer le format de la date.

Les options sont :
mm/jj/aaaa,
jj/mm/aaaa,
aaaa/mm/jj.



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Niveau de luminosité

Permet de régler la luminosité de l'écran.



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Paramètres Enreg.

Permet de configurer les options relatives aux enregistrements sur papier thermique.

Vous pouvez régler les paramètres Vitesse, Gain, Durée, Choix des courbes, etc.




PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Configuration

Présente la configuration matérielle et logicielle du moniteur.

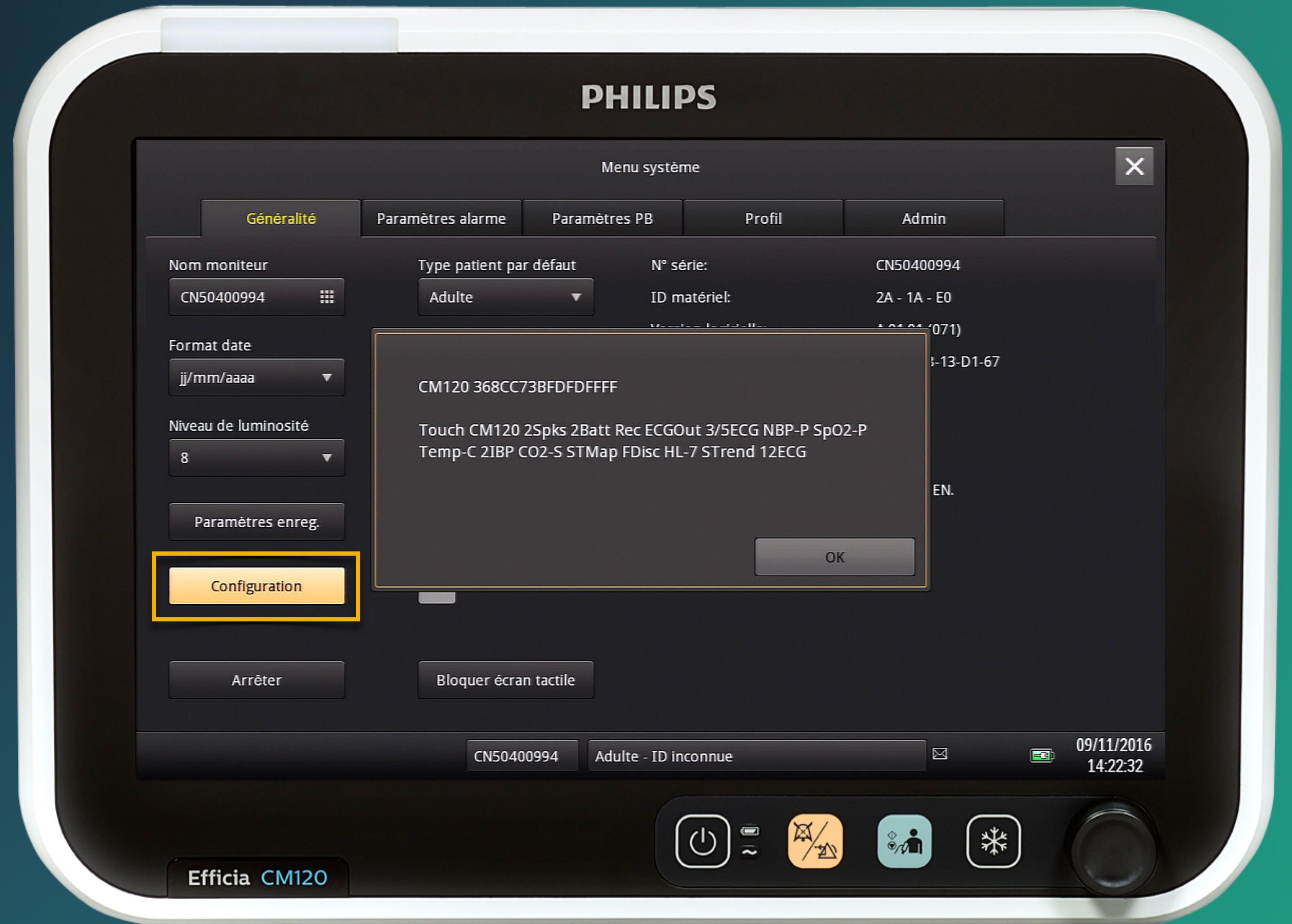

PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Arrêter

Éteint le moniteur.



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Type patient par défaut

Permet de sélectionner la catégorie de patient par défaut.

Lorsque vous commencez la surveillance d'un nouveau patient, la catégorie de patient sélectionnée par défaut sera active et les limites d'alarmes adaptées en conséquence.



Efficia CM120

PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Unités de taille

Permet de sélectionner l'unité de mesure de la taille du patient.

Les options disponibles sont **cm** et **pouce**.



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Unités de poids

Permet de sélectionner l'unité de mesure du poids du patient.

Les options disponibles sont **kg** et **lb**.



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Activer menu Adm. patient

Active l'affichage automatique du menu d'admission à l'allumage du moniteur et sortie de mode veille.

Si Ouverture automatique du menu d'admission.

Si Pas d'ouverture du menu.

+ Voir menu d'admission



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Activer Menu Adm. Patient

Active l'affichage automatique du menu d'admission à l'allumage du moniteur et sortie de mode veille.

Si Ouverture automatique du menu d'admission.

Si Pas d'ouverture du menu.



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Bloquer écran tactile

Permet de verrouiller et déverrouiller l'écran tactile.

Lors d'un nettoyage du moniteur en fonctionnement ou lors d'un transport, vous pouvez bloquer la fonction tactile de l'écran.



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Informations moniteur

Fournit les informations d'identification du moniteur (numéro de série, version logicielle, profil sélectionné...).



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Onglet Alarme

Cliquez librement sur un des sous-menus de l'onglet Alarme pour découvrir ses principaux réglages.



Efficia CM120

PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Alarm Tone

Permet de sélectionner la tonalité d'alarme par défaut du moniteur.

Les choix sont **Philips** et **IEC**.



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Minimum Alarm Tone Volume

Permet de spécifier le volume d'alarme minimum.

Les utilisateurs ne pourront pas diminuer le volume en deçà de la valeur choisie.



Efficia CM120

PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Audio Pause Duration

Permet de choisir la durée
de la Pause Audio Alarme.

Pendant ce mode Pause Audio,
toutes les alarmes sonores sont neutralisées.



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Minimum Nurse Call Alarm Priority

Permet de définir le niveau d'alarme déclenchant le relais d'appel infirmière.

Vous sélectionnez "Low" : toutes les alarmes déclenchent le relais.

Vous sélectionnez "Medium" : seules les alarmes "jaunes" et "rouges" déclenchent le relais.

Vous sélectionnez "High" : seules les alarmes "rouges" déclenchent le relais.



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Latch Physiological Alarms

Permet de sélectionner les modes “alarme bloquée” ou “alarme non bloquée” pour les alarmes physiologiques jaunes.

Si les alarmes physiologiques jaunes seront en mode “alarme bloquée”.

Si les alarmes physiologiques jaunes seront en mode “non bloquée”.

Important

+ En savoir plus sur les alarmes bloquées



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Latch Physiological Alarms

Permet de sélectionner les
“alarme bloquée” ou “alarme
bloquée” pour les alarmes
physiologiques jaunes.

Si les alarmes physiologiques jaunes
seront en mode “alarme bloquée”.

Si les alarmes physiologiques jaunes
seront en mode “non bloquée”.

Important

+ En savoir plus sur les alarmes bloquées




fermer

Important

En savoir plus sur les alarmes bloquées.

En mode alarme bloquée, une validation par l'utilisateur (simple clic sur la touche silence/pause) est nécessaire pour stopper l'alarme visuelle et sonore, même si les conditions d'alarme ont déjà disparu. Il est recommandé de réserver ce mode de fonctionnement aux seules alarmes “rouges”.

Les alarmes rouges (alarmes vitales) sont toujours en mode “alarme bloquée”. Ce réglage n'est pas configurable.

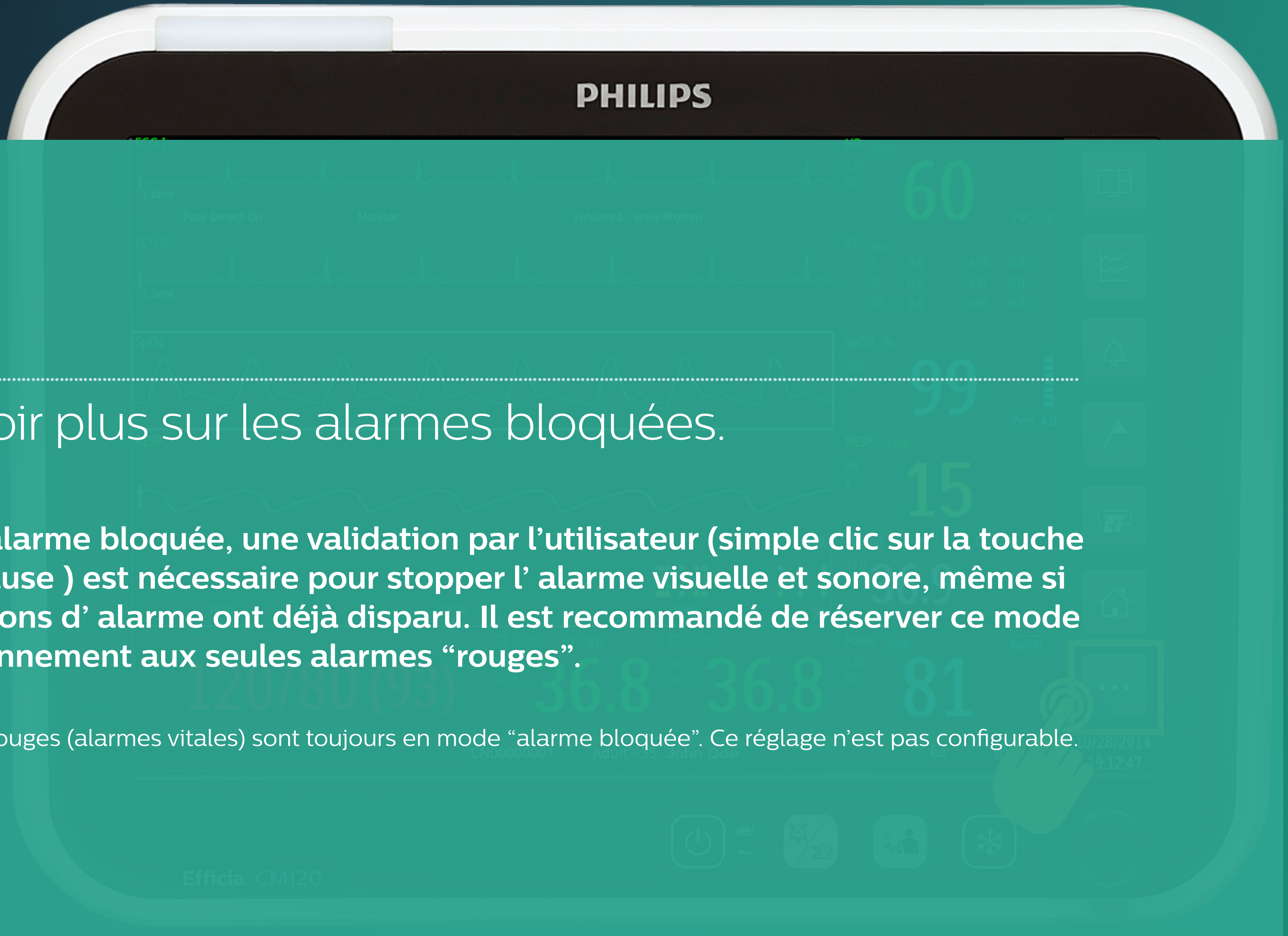

PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Allow Alarm Disable

Permet de définir si l'utilisateur pourra supprimer les alarmes sur chacun des paramètres physiologiques (ex : FC, SPO2, etc).

Si l'utilisateur pourra supprimer l'alarme Audio, paramètre par paramètre.

Si l'utilisateur ne pourra pas supprimer l'alarme Audio, paramètre par paramètre.



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Allow Audio Off

Permet de définir si l'utilisateur pourra suspendre de façon infinie les alarmes pour tous les paramètres (par un appui long de 2s sur la touche Silence/Pause).

Si les utilisateurs pourront suspendre l'ensemble des alarmes.

Si les utilisateurs ne pourront pas suspendre l'ensemble des alarmes.



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Audio Off Reminder

Permet l'émission d'un Bip toutes les trois minutes pour signaler le mode « Audio Off » (suspension infinie des alarmes).

Si le Bip sera actif.

Si le Bip ne sera pas actif.



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

SpO2 High/Low Alarm Delay (seconds)

Permet de définir le délai de déclenchement des alarmes « jaunes » de SpO2.

Vous pouvez sélectionner un délai entre 0 et 30 secondes.



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

SpO2 Desat Alarm Delay (seconds)

Permet de définir le délai
de déclenchement des alarmes
« rouges » de désaturation grave.

L'alarme de désaturation grave est définie
(non configurable) comme inférieure :
. de 10 à la limite basse (en mode adulte
et pédiat),
. de 5 à la limite basse (en mode néonate).



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Arrhythmia TimeOut 1st

Permet de définir la durée de temporisation pour les alarmes d'arythmie cardiaque de 1^{er} niveau

Pour en savoir plus sur la surveillance des troubles du rythme cardiaque, vous pouvez vous reporter au Manuel utilisateur (chapitre "Analyse d'Arythmie").



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Arrhythmia TimeOut 2nd

Permet de définir la durée de temporisation pour les alarmes d'arythmie cardiaque de 2nd niveau.

Pour en savoir plus sur la surveillance des troubles du rythme cardiaque, vous pouvez vous reporter au Manuel utilisateur (chapitre "Analyse d'Arythmie").



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Onglet Paramètres PB

Cliquez librement sur un des sous-menus de l'onglet Paramètres PB pour découvrir ses principaux réglages.



PHILIPS


Efficia CM

Moniteurs

Default NBP Interval

Permet de définir l'intervalle de répétition des prises de tension (Pression Brassard).

Vous pouvez sélectionner un intervalle de répétition automatique entre 1 et 120 minutes. Si vous sélectionnez **Off**, la **Pression Brassard** fonctionnera en mode manuel.

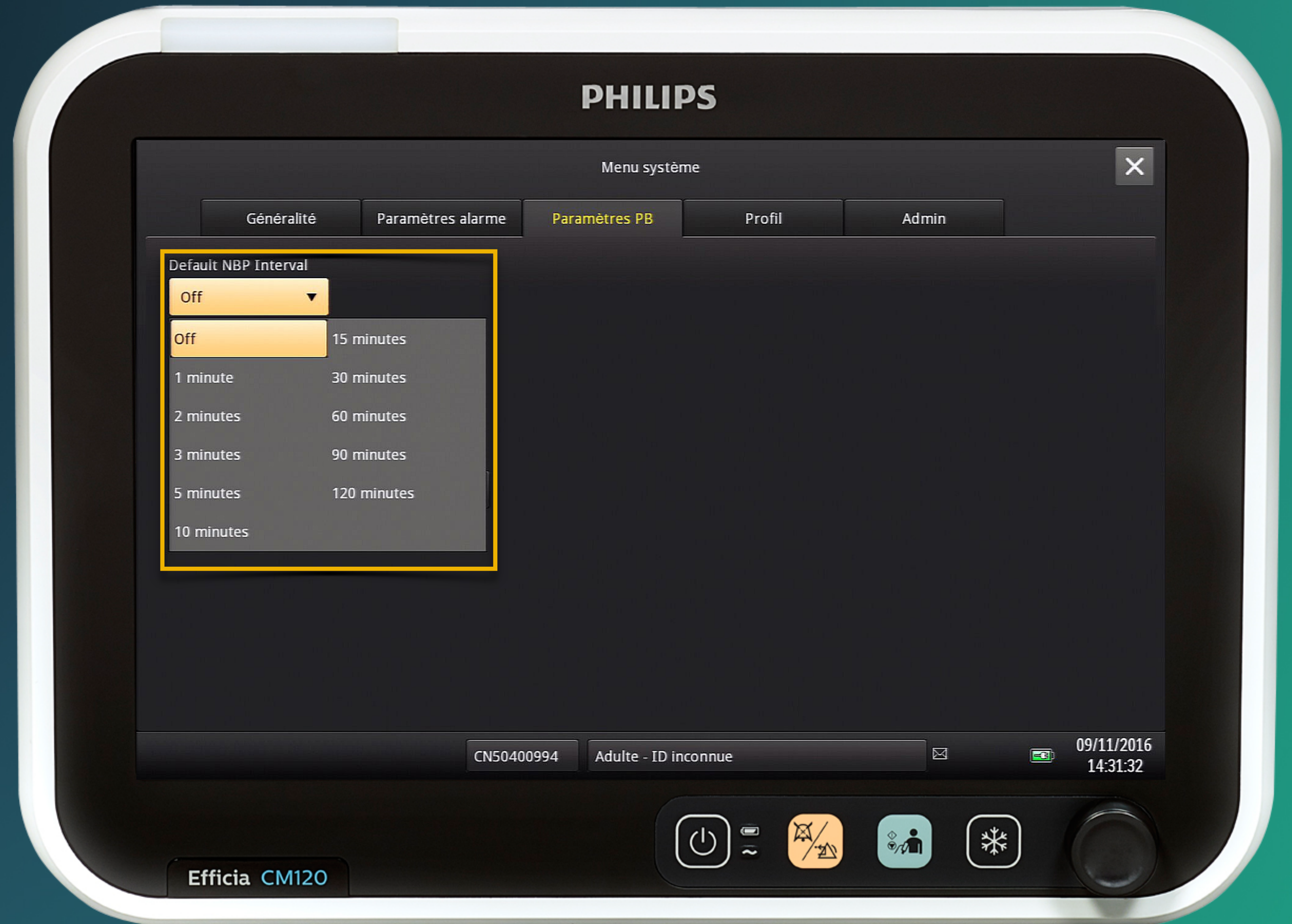

Efficia CM120

PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Align Interval to Clock

Permet de synchroniser les prises de tension.

Par exemple, si vous réglez l'intervalle sur 10 minutes et si vous prenez une mesure de PB à 10h17, le moniteur enregistre la première mesure à 10h17 et les suivantes à 10h20, 10h30, 10h40, etc.



Efficia CM120

PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Default Initial Inflation Pressure (mmHg)

Permet de définir les niveaux d'insuflation initiaux pour les mesures de Pression Brassard pour chaque catégorie patient.




PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Onglet Profil

Cliquez librement sur un des sous-menus de l'onglet Profil pour découvrir ses principaux réglages.

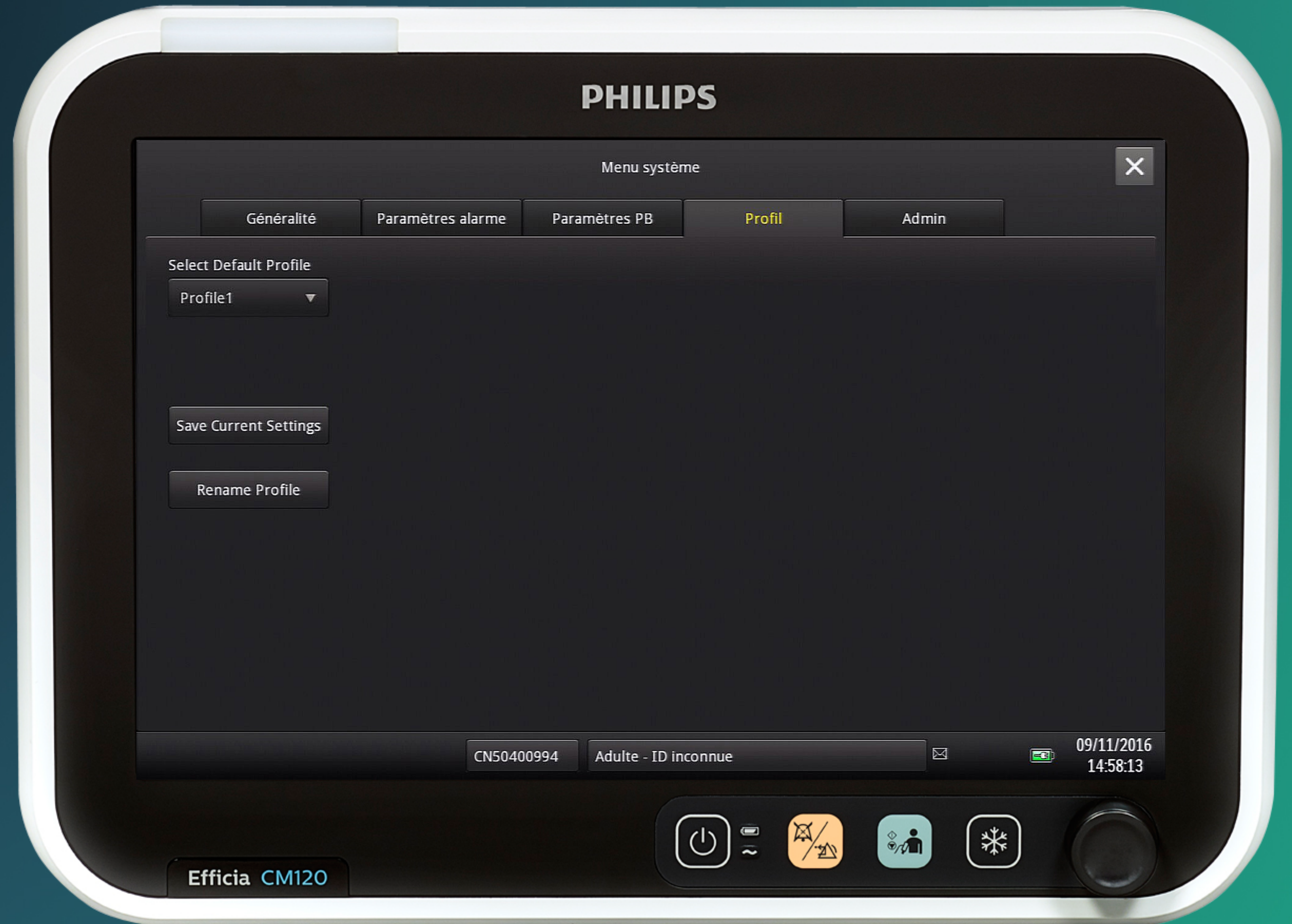


PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Select Default Profile

Permet de sélectionner un profil de surveillance adapté à l'unité de soins.

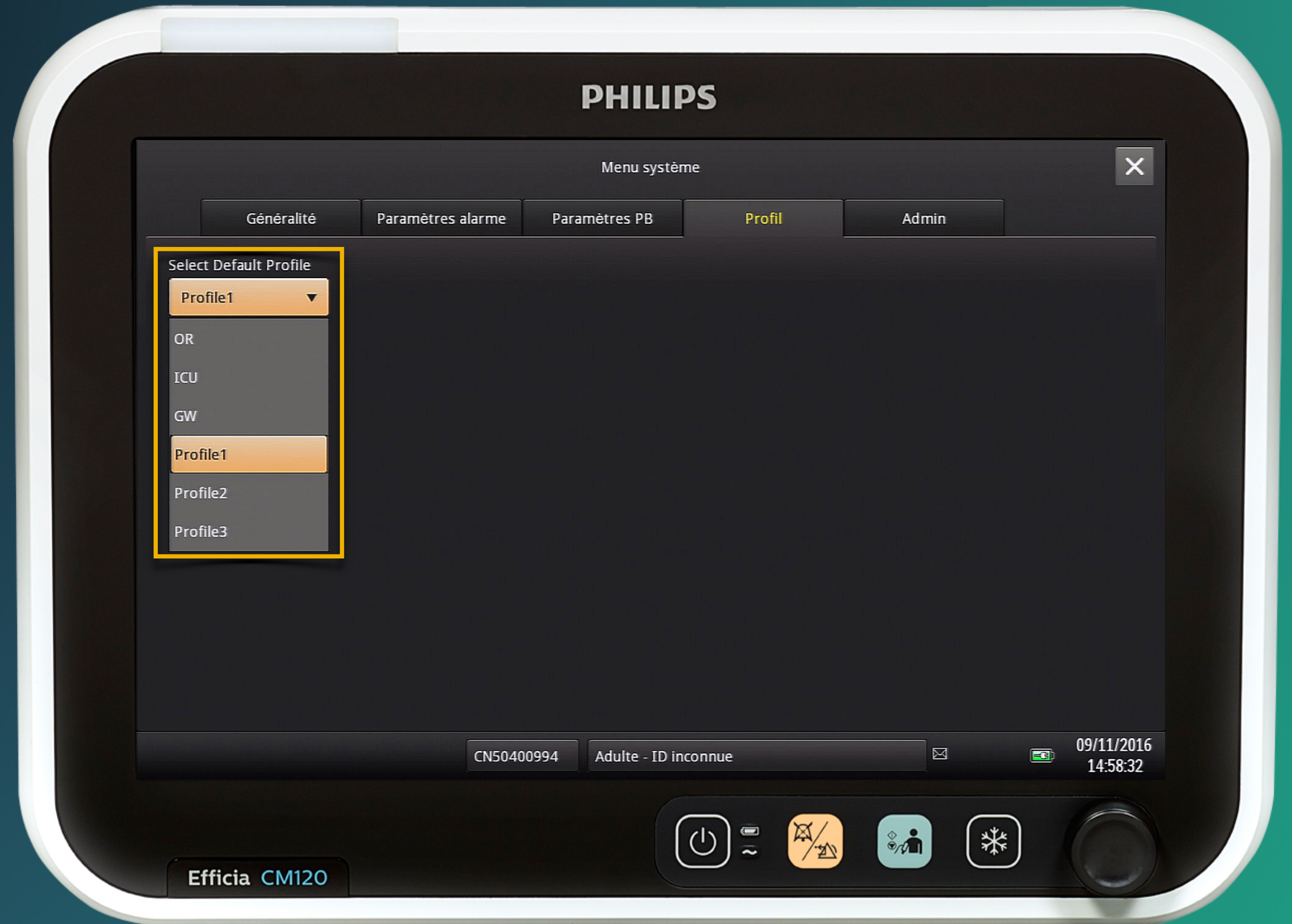

Efficia CM120


PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Save Current Settings

Permet de sauvegarder les réglages en cours dans un Profil personnalisé de votre choix (Profile 1, 2 et 3).

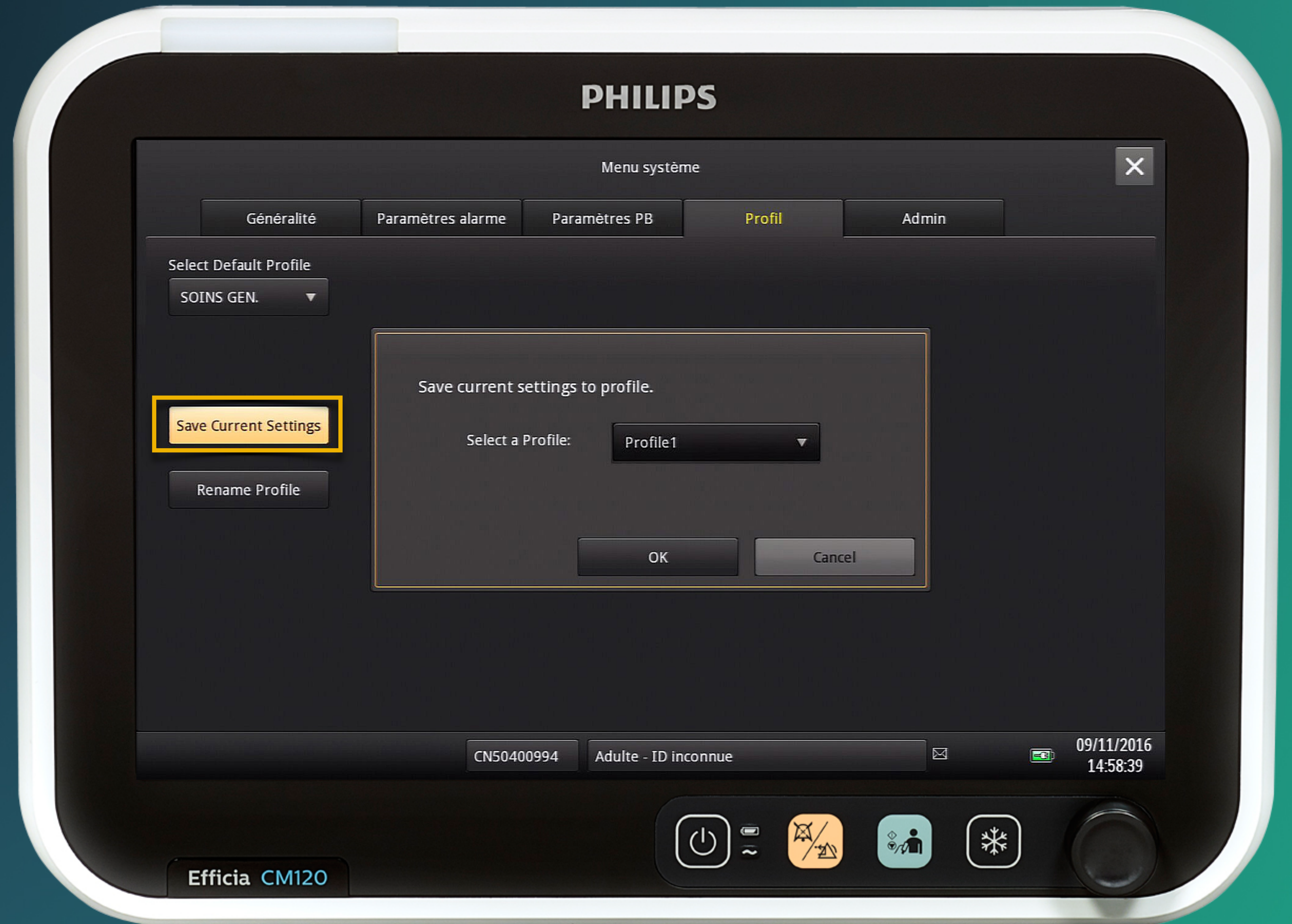


PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Rename Profile

Permet de renommer les profils personnalisés 1, 2 et 3.

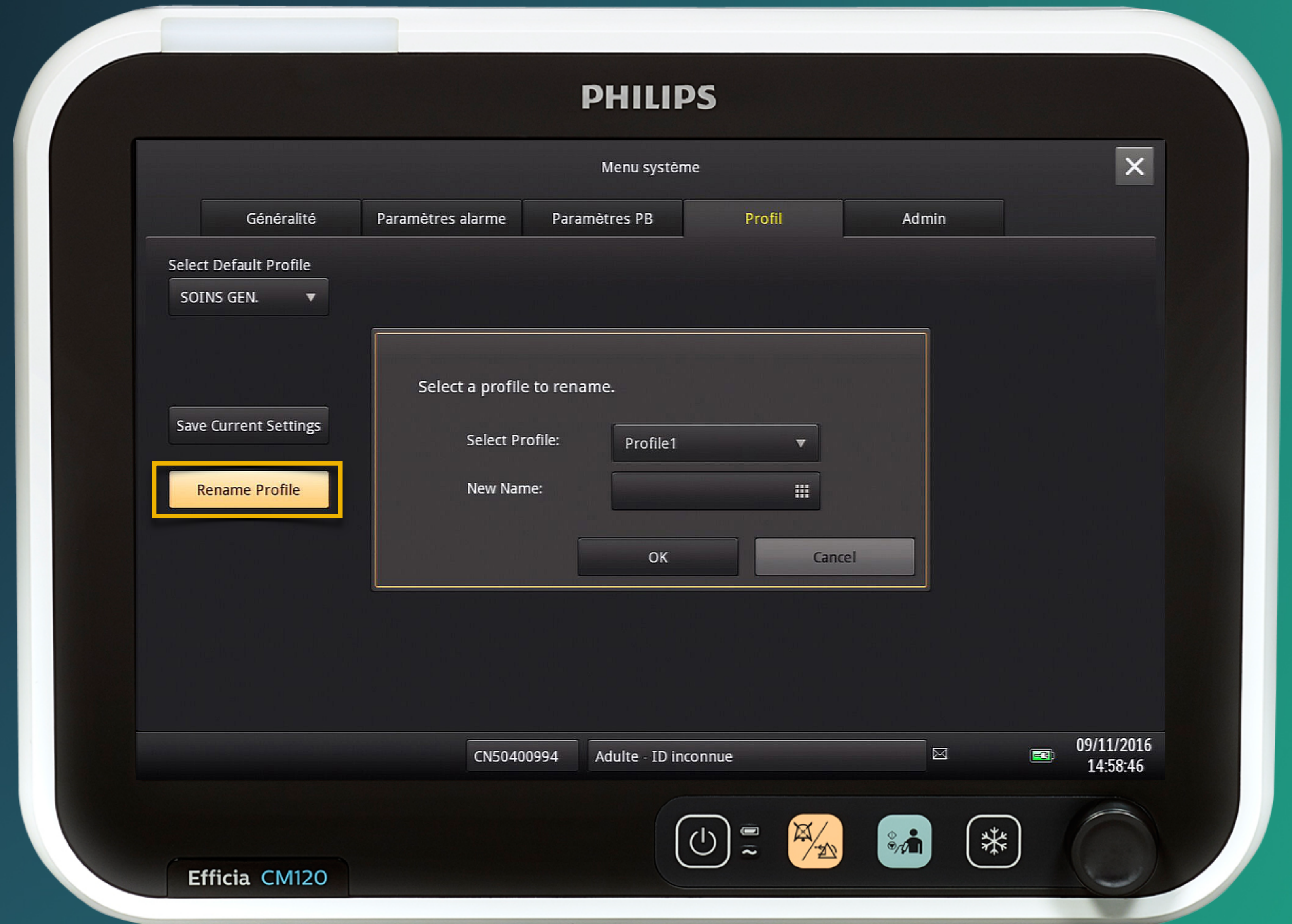

PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Onglet Admin

Cliquez librement sur un des sous-menus de l'onglet Admin pour découvrir ses principaux réglages.



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Language

Permet de sélectionner la langue utilisée.

Les choix sont : Anglais, Français, Italien, Portugais, Japonais, Turc, Allemand, Chinois, Polonais, Grec, Espagnol, Russe.



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

AC Power

Permet de sélectionner la fréquence du courant alternatif utilisée dans votre pays.

En France sélectionnez 50 Hz.



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Trend Display Timeout

Permet de définir la durée du Timeout pour l'affichage de la fenêtre des tendances.



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Demo Mode

Permet d'activer le mode démonstration.

Le moniteur simule des courbes et valeurs numériques. Il vous suffira de décocher la case ou d'éteindre le moniteur, pour revenir dans un mode de surveillance.



PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Diverses Fonctions Interface

Permet de configurer les paramètres d'échanges de données entre le moniteur Efficia, la centrale de surveillance Efficia ou les applications informatiques de votre établissement.

Pour plus de détails, veuillez contacter le Service Clients Philips.



Efficia CM120

PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs


Patient ID Settings

Permet de configurer les paramètres d'identification disponibles dans le menu "Admission Patient".

Enable : paramètre disponible

Required : paramètre obligatoire

Disable : paramètre non disponible

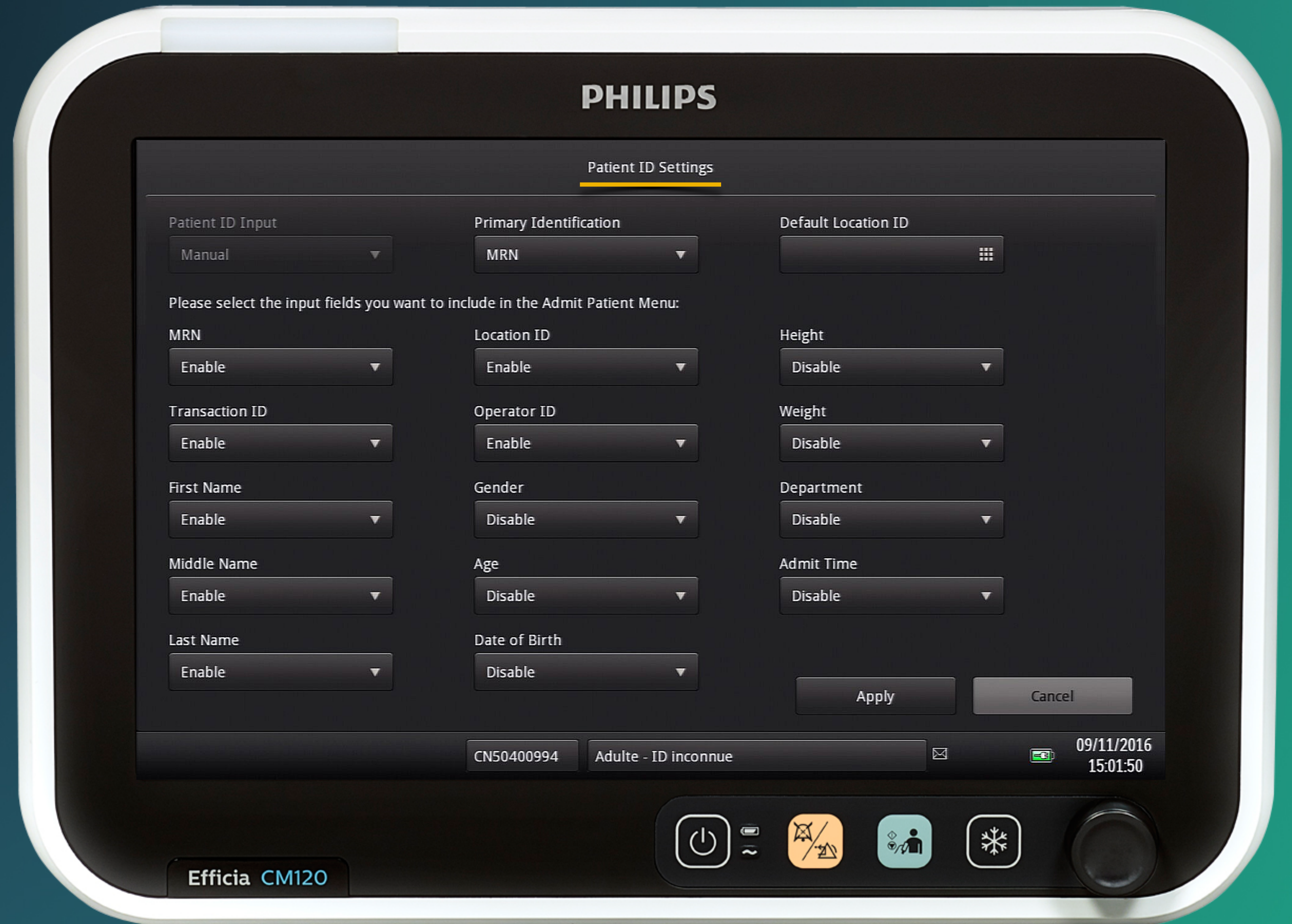

PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs


Date/Time Settings Menu

Permet de configurer les réglages de date et heure.

La case à cocher « **Disable Date/Time Menu** » permet d'autoriser ou non l'accès en mode surveillance aux réglages de date et d'heure.

Time Zone permet de sélectionner le fuseau horaire, pour la France métropolitaine, choisir (GMT+01:00) Europe/Paris.

Pour les fonctions avancées de synchronisation (Synchronize Time, Synchronization Type et SNTP Server Address), veuillez contacter le Service Clients Philips.

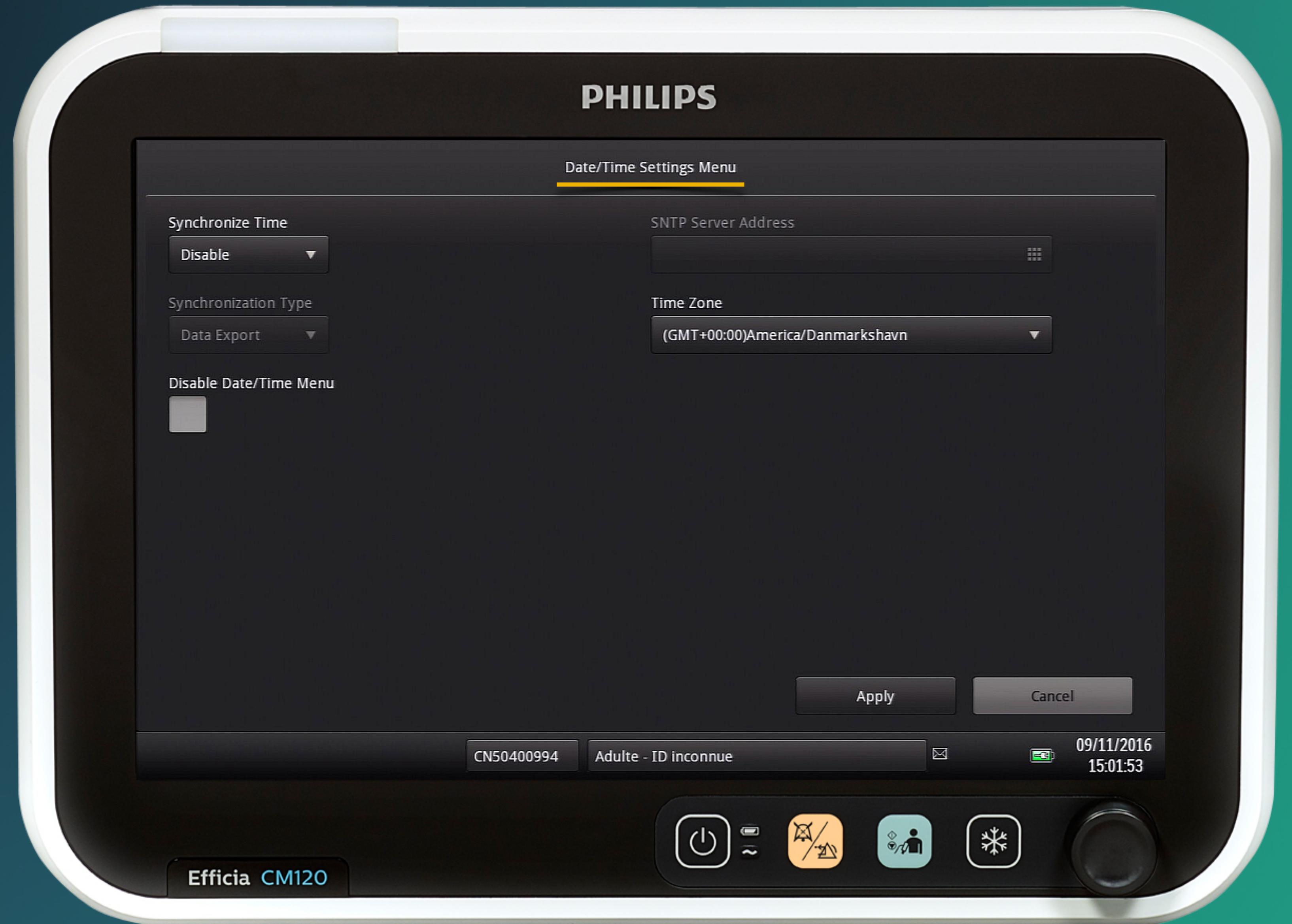

PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Night Mode Settings

Permet de configurer un mode de surveillance nocturne.


Disable : le mode nocturne ne sera pas disponible.

Enable : le mode nocturne sera disponible.

Il vous est également possible de personnaliser ce mode nocturne en réglant la luminosité, le volume d'alarme et le volume du Bip QRS.

Attention :

Pour valider les changements appuyez sur "Apply".

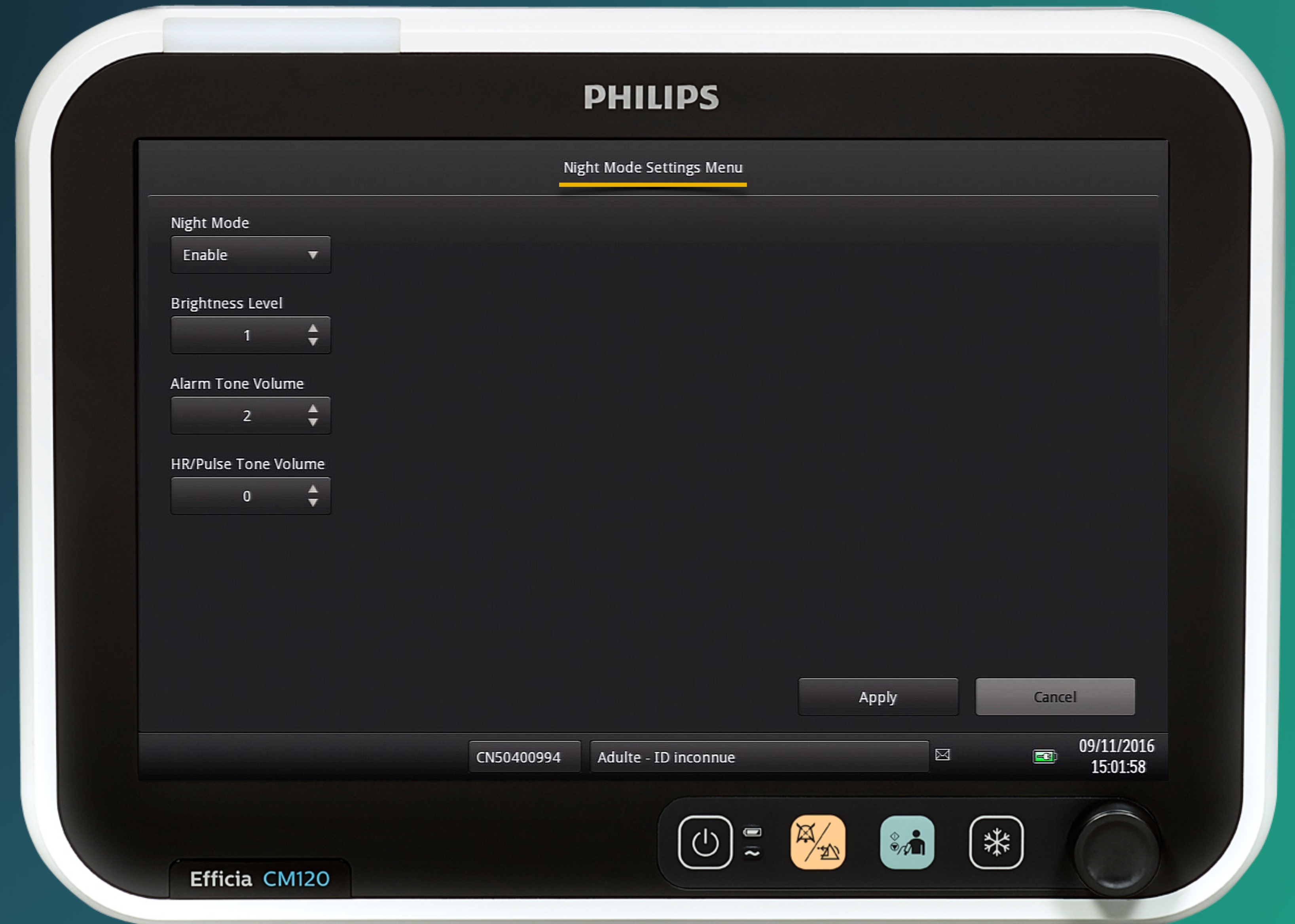

PHILIPS

Efficia CM


Moniteurs

Import Settings

Permet d'importer depuis une clé USB la configuration d'un autre moniteur.

Attention :

Cette configuration doit provenir d'un moniteur strictement identique (modèle, options, version logicielle). Un seul fichier .cfg doit être présent sur la clé USB (à la racine).

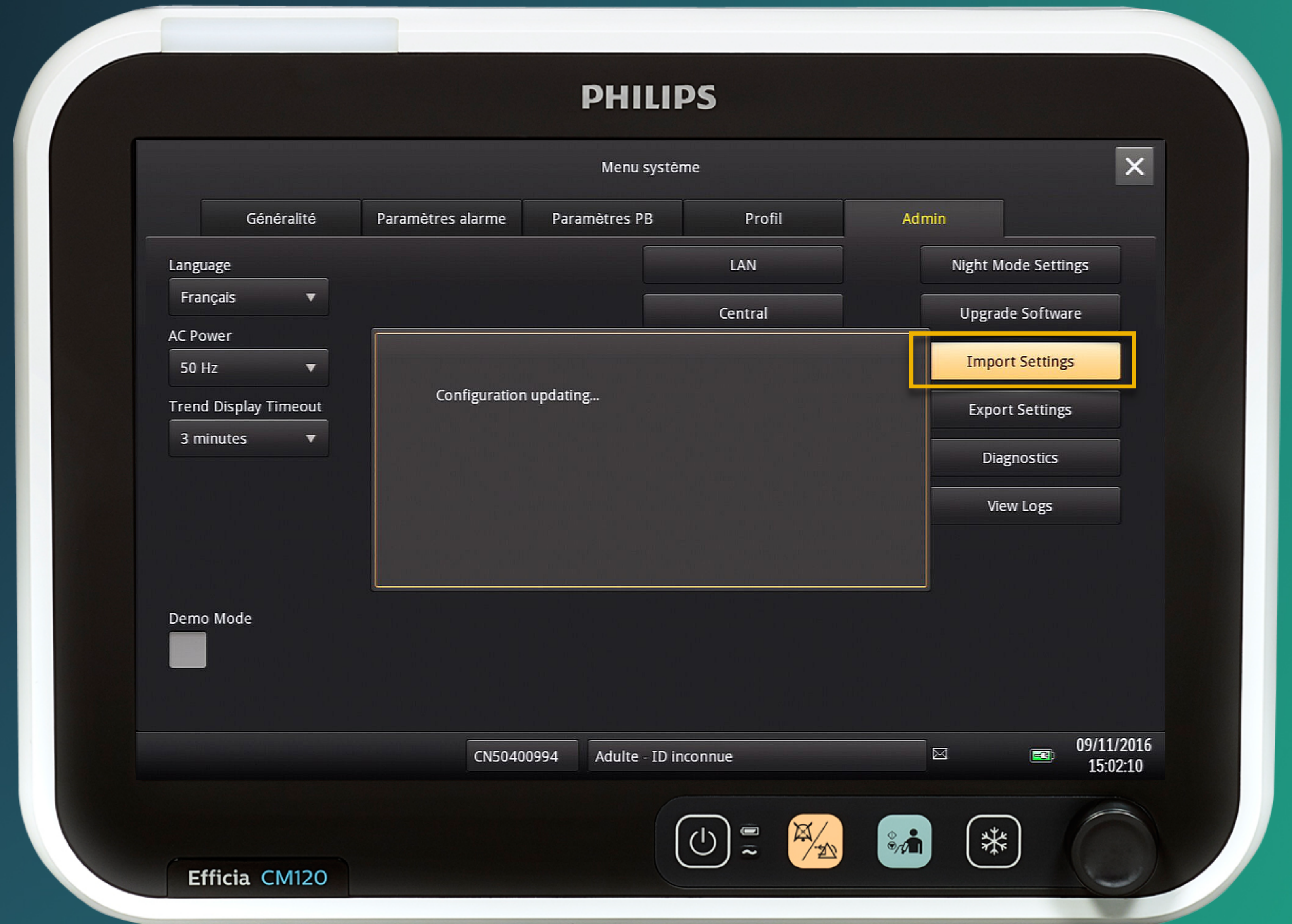

PHILIPS


Efficia CM

Moniteurs

Export Settings

Permet d'exporter sur une clé USB la configuration de votre moniteur (fichier .cfg).

Ce fichier vous permettra :
· d'archiver votre configuration personnalisée
· de copier cette configuration sur d'autres moniteurs (cf. fonction « Import Settings »).

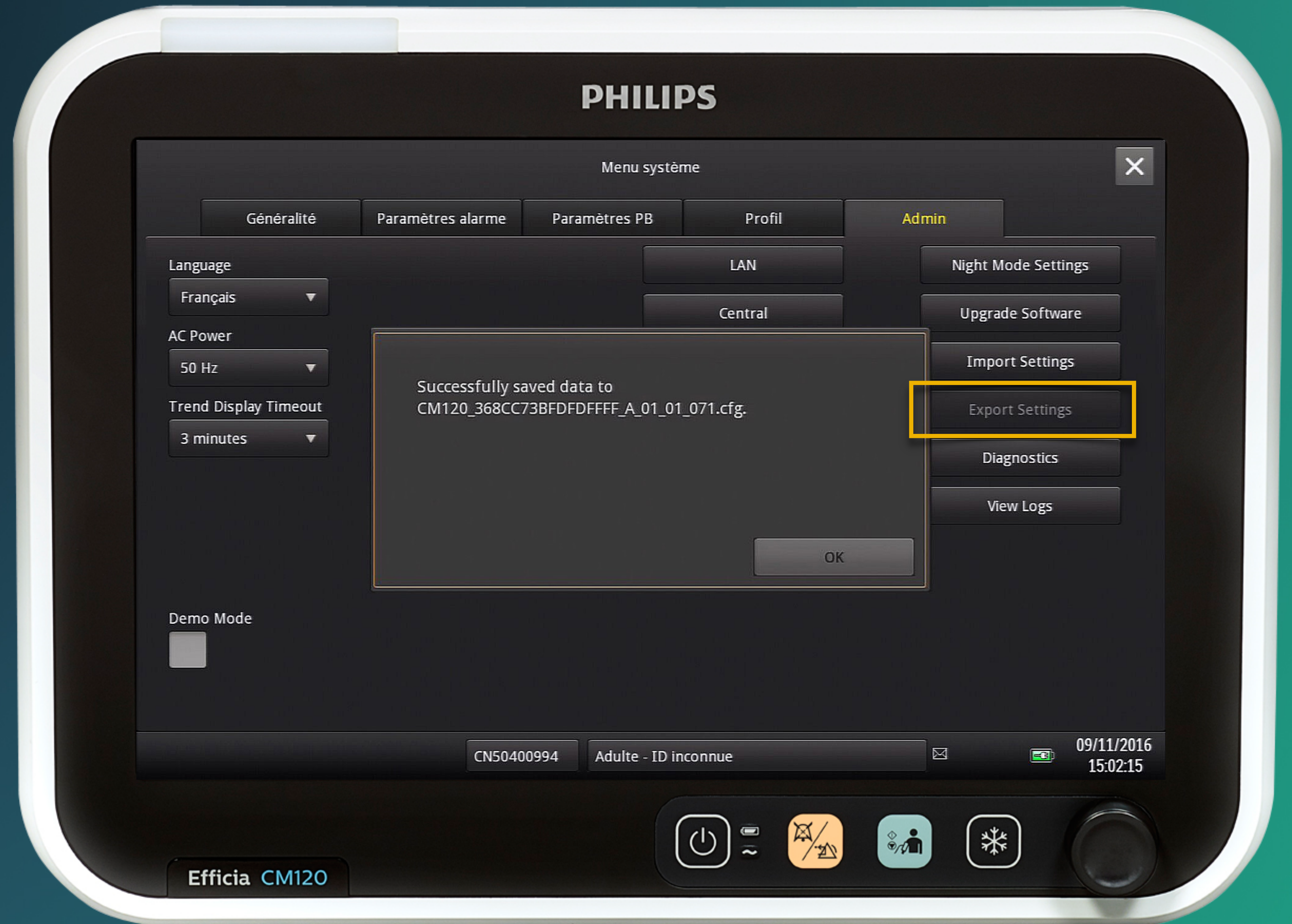

PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs

Diverses Fonctions Maintenance

Permet diverses opérations
de maintenance
(upgrade, diagnostic...).

Pour plus de détails, veuillez contacter
le Service Clients Philips.



A woman with blonde hair, wearing a white lab coat over a blue collared shirt, is sitting at a desk. She has a name tag on her chest and her hands are resting on a computer mouse. The background is a blurred office or hospital setting.

PHILIPS

Efficia CM

Moniteurs



Vos suggestions

psm.communication@philips.com

Dans le cadre de notre amélioration continue, nous sommes très attentifs aux témoignages de **vo**tre expérience utilisateur. N'hésitez pas à partager vos remarques et idées pour améliorer ensemble ce guide.



Efficia CM

Moniteurs

Index

/cliquer sur le thème de votre choix/

La solution de monitoring Efficia CM est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TÜV SUD 0123. Elle est destinée à la surveillance continue des paramètres physiologiques. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Juillet 2017.

Le Menu

Avant-propos

Mise en service

Les 5 étapes de la mise en service

[Présentation du Moniteur](#)

[Installation des batteries](#)

[Installation du papier thermique](#)

[Installation des crochets](#)

[Démarrage du moniteur](#)

Mode Configuration

[Accès au mode configuration](#)

Réglages généraux

Onglet Généralité

[Nom moniteur](#)

[Format date](#)

[Niveau de luminosité](#)

[Paramètres Enreg.](#)

[Configuration](#)

[Arrêter](#)

[Type patient par défaut](#)

[Unités de taille](#)

[Unités de poids](#)

[Activer menu Adm. patient](#)

[Bloquer écran tactile](#)

[Informations moniteur](#)

Onglet Alarme

[Alarm Tone](#)

[Minimum Alarm Tone Volume](#)

[Pause Audio Duration](#)

[Minimum Nurse Call Alarm Priority](#)

[Latch Physiological Alarms](#)

[Allow Alarm Disable](#)

[Allow Audio Off](#)

[Audio Off Reminder](#)

[Spo2 High/Low Alarm Delay](#)

[Spo2 Desta Alarm Delay](#)

[Arrythmia TimeOut 1st](#)

[Arrythmia TimeOut 2nd](#)

Onglet Paramètres PB

[Default NBP Interval](#)

[Align Interval to Clock](#)

[Default Initial Inflation Pressure](#)

Onglet Profil

[Select Default Profile](#)

[Save Current Settings](#)

[Rename Profile](#)

Onglet Admin

[Language](#)

[AC Power](#)

[Trend Display Timeout](#)

[Mode Demo](#)

[Diverses Fonctions Interface](#)

[Patient ID Settings](#)

[Date/Time Settings Menu](#)

[Night Mode Settings](#)

[Import Settings](#)

[Export Settings](#)

[Diverses Fonctions Maintenance](#)

Vos suggestions

