Cómo usar tu nebulizador

Un nebulizador convierte la medicina en líquido en un aerosol para que puedas inhalarla profundamente en tus pulmones. Tucker usa su nebulizador cuando está en su casa con Sami. No olvides de pedirle a un adulto que te ayude a usar y limpiar tu nebulizador.

Prepárate

1 Pon el compresor del nebulizador sobre una mesa.

2 Enchufa el compresor en un tomacorriente.



Conecta un extremo del tubo a la taza de medicina y el otro

extremo al compresor.



Llena la taza de medicina

4 Llena la taza de medicina con tu medicamento.




Enciende el compresor y verifica que por la boquilla esté saliendo un rocío.



Inhala y exhala

Sientese derecho. Pon la boquilla en tu boca e inhala y exhala lentamente.
Cuando se usa una máscara, puedes inhalar y exhalar del mismo modo.

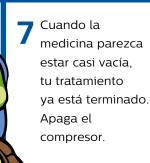



Limpieza su compressor

- Desenchufa tu compresor antes de limpiarlo.
- Inspecciona el filtro una vez por semana y reemplázalo si está sucio.



Limpia una vez al mes el exterior del compresor con un paño húmedo.



Guarda en un sitio seco

Limpieza su nebulizador

Después de cada uso, desconecta el tubo y desarma el nebulizador.



- Limpia con agua tibia jabonosa.
- Enjuaga con agua limpia y deja secar al aire.

Una vez por semana, hervir todas las partes, con excepción de la tubería, en agua con 2 ó 3 gotas de jabón líquido para platos.

por 10 minutos.

© 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Philips Healthcare reserves the right to make changes in specifications and/or to discontinue any product at any time without notice or obligation and will not be liable for any consequences resulting from the use of this publication. CAUTION: US federal law restricts these devices to sale by or on the order of a physician.



Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668
Customer Service
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)
www.philips.com/respironics
EL 02/27/15 MCI 4106587 PN 1121264