

**PHILIPS**

*InnoSpire Go*

Nébuliseur portable  
en maille



Se  
simplifier  
**la vie**

# Privilégier les **bons moments**

Rapide, efficace et simple d'utilisation, le nébuliseur InnoSpire Go est conçu pour réduire la durée de traitement de la BPCO, vous offrant davantage de temps pour privilégier les bons moments avec vos proches.



# Réduit la durée de traitement de 25%\*



## Traitement en 4 minutes\*\*

Un appareil de thérapie efficace pour le traitement de la BPCO utilisant des signaux sonores et visuels pour indiquer la fin du traitement, avant l'arrêt automatique de l'appareil.

## Un silence presque complet

Un petit nébuliseur, portable et discret, à utiliser partout.



## Batterie longue durée intégrée

La batterie rechargeable offre jusqu'à 30 traitements en une seule charge.

## Simple, en deux parties

L'embout buccal, facilement détachable, simplifie l'utilisation, le nettoyage et l'entretien d'InnoSpire Go.\*\*\*

En savoir plus

[www.philips.ch/innospirego-fr](http://www.philips.ch/innospirego-fr)





← Taille réelle →

- \* Par rapport à son prédécesseur Aeroneb Go.
- \*\* Avec 2,5 ml de salbutamol
- \*\*\* Un masque pour adulte est disponible si vous avez des difficultés à utiliser l'embout buccal.

# Simple comme un **jeu d'enfant...**

## 1. Remplissage

Soulevez le couvercle vert et versez le médicament. Fermez le couvercle et asseyez-vous en vous tenant bien droit, prêt pour le traitement.



## 2. Traitement

Appuyez sur le bouton Marche puis inspirez et expirez dans l'embout buccal.\*\*\* InnoSpire Go indiquera la fin du traitement à l'aide de signaux sonores et visuels, puis s'éteindra.



## 3. Nettoyage

Après chaque traitement, retirez l'embout buccal et rincez-le à l'eau chaude. À la fin de chaque journée, lavez-le à l'eau chaude savonneuse et, une fois par semaine, désinfectez-le à l'eau bouillante.



## En savoir plus

[www.philips.ch/innospirego-fr](http://www.philips.ch/innospirego-fr)



\*\* Avec 2,5 ml de salbutamol

\*\*\* Un masque adulte est disponible si vous avez des difficultés à utiliser l'embout buccal.



© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.  
Les spécifications techniques  
sont sujettes à modifications  
sans préavis. Philips Respironics  
et Respironics Respiratory Drug  
Delivery (UK) Ltd sont des  
filiales de Philips.

Respironics Respiratory  
Drug Delivery (UK) Ltd  
Chichester Business Park  
City Fields Way  
Tangmere  
Chichester  
PO20 2FT Royaume-Uni

DS 8/31/17 PN483919  
[www.philips.ch/innospirego-fr](http://www.philips.ch/innospirego-fr)