

Van a cambiar las reglas del juego

Mascarilla nasal Philips Respironics EasyLife con Auto Seal:
una combinación ganadora

Ahora disponible
con un nuevo diseño
de arnés con clips
opcionales y en un
nuevo tamaño petite.

PHILIPS
RESPIRONICS
sense and simplicity

Tecnología Auto Seal revolucionaria

Tecnología exclusiva que va a cambiar las reglas del juego

Ahora mejorada con un nuevo arnés con clips y disponible en un nuevo tamaño petite.



Sello

Nuestra exclusiva almohadilla de sellado interior se mueve con el paciente para cubrir automáticamente toda la zona nasal y crear al instante un sellado de ajuste automático y efectivo.

Nota: La parte inferior de la almohadilla de soporte exterior se ha retirado para mostrar el ajuste correcto de la almohadilla de sellado interior:



Soporte

La almohadilla de soporte exterior permite a la mascarilla descansar de forma delicada y confortable sobre el rostro. La almohadilla de la frente integrada en la almohadilla se ajusta automáticamente, con lo cual se elimina un paso de ajuste tradicional.

Intuitiva

Combinadas, las características de Auto Seal convierten a la EasyLife en nuestra mascarilla más intuitiva. Una mascarilla fácil de colocar y utilizar, que requiere mínimos ajustes.



El arnés dispone de correas ajustables integradas que convergen en un único panel posterior con una tira para la coronilla para mayor estabilidad.





Sólo cuatro partes: armazón de la mascarilla, arnés, almohadilla de soporte exterior y almohadilla de sellado interior

La almohadilla para la frente se ajusta automáticamente (lo que elimina el paso de ajuste tradicional) y requiere una fuerza mínima del arnés.

Los microorificios de exhalación en ángulo logran un funcionamiento más silencioso y alejan el aire de la persona que duerme junto al paciente.

Se incluyen clips opcionales, lo que facilita la retirada de la mascarilla manteniendo el mismo ajuste noche tras noche.

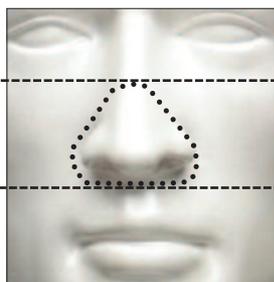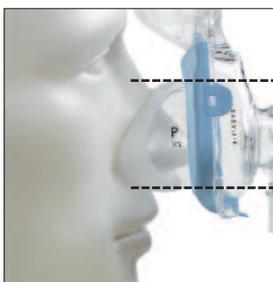

Consejo para la elección del tamaño

A diferencia de las mascarillas tradicionales, EasyLife se ha diseñado para cubrir una superficie más reducida de la nariz. Utilice el medidor de tamaño para escoger el tamaño más pequeño que sea lo suficientemente ancho como para cubrir las fosas nasales, pero sin obstruir la respiración nasal.

Consejo: no elija el tamaño basándose en su experiencia con otras mascarillas nasales.

Instrucciones de ajuste



Ajuste de manera uniforme las correas superiores e inferiores del arnés aplicando la menor fuerza posible sobre el rostro.



Las correas superiores del arnés deben quedar por encima de las orejas, mientras que las inferiores deben quedar por debajo.



Utilice la tira para la coronilla para ajustar la posición del arnés.



Con la presión encendida, corrija cualquier fuga; para ello, vuelva a colocar la mascarilla retirándola de la cara y recolocándola en su lugar.


Consejo para el ajuste

La tecnología Auto Seal de EasyLife se adapta al movimiento y se ha diseñado para proporcionar un ajuste con mayor holgura. Apretar demasiado la mascarilla puede disminuir su rendimiento.

Instrucciones de montaje y desmontaje



1. Retire primero la almohadilla exterior tirando hacia afuera y hacia arriba de las tres lengüetas azules. A continuación, retire la almohadilla interior:

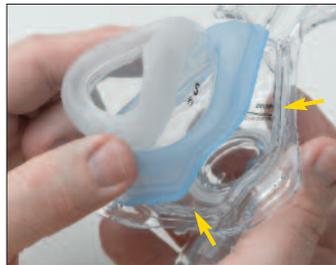

2. Para el montaje, empiece primero por la solapa azul de la almohadilla de sellado interior del armazón de la mascarilla. Asegúrese de que la solapa azul cubra completamente el borde del armazón de la mascarilla.



3. En segundo lugar, coloque la almohadilla de soporte exterior, con las lengüetas mirando hacia abajo, alrededor de la almohadilla interior: Presione las tres lengüetas hasta que queden encajadas; oirá un chasquido.



4. Presione suavemente la almohadilla de la frente contra la ranura de dicha almohadilla en el armazón de la mascarilla. Tire suavemente de la almohadilla interior para asegurarse de que esté bien sujeta.

Información para pedidos

Mascarilla EasyLife	Petite	Pequeño	Mediano	Anchura mediana	Grande
Mascarilla con arnés	1050020	1050021	1050022	1050023	1050024
Mascarilla con arnés, sin orificio de exhalación	1050030	1050031	1050032	1050033	1050034
DuoPack: incluye arnés y dos juegos de almohadillas* del mismo tamaño	1050025	1050026	1050027	1050028	1050029
FitPack: incluye arnés y juegos de almohadillas* en dos tamaños	N/D	1050088 Pequeña y Mediana		1050089 Anchura Mediana y Grande	

Partes de repuesto	Nº de parte
Juego de almohadillas petite*	1050090
Juego de almohadillas pequeñas*	1050091
Juego de almohadillas medianas*	1050092
Juego de almohadillas de anchura mediana*	1050093
Juego de almohadillas grandes*	1050094

Partes de repuesto	Nº de parte
Arnés EasyLife	1050087
Arnés EasyLife, tamaño reducido	1050086
Clips para el arnés (pack de 2)	1050097

* Un juego de almohadillas contiene una almohadilla de sellado interior y una almohadilla de soporte exterior.

**Philips Healthcare forma parte de
Royal Philips Electronics**

Contacte con nosotros en

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Asia

+49 7031 463 2254

Europa, Oriente Medio, África

+49 7031 463 2254

Latinoamérica

+55 11 2125 0744

Estados Unidos

+1 425 487 7000

800 285 5585 (toll free, US only)

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668

Atención al cliente

+1 724 387 4000

800 345 6443 (toll free, US only)

Philips Respironics Sede Internacional

+33 1 47 28 30 82

Philips Respironics Asia Pacífico

+65 6882 5282

www.philips.com/respironics

Respironics, DuoPack, EasyLife y FitPack son marcas registradas de Respironics, Inc. y empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Visítenos en www.philips.com/respironics



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Reservados todos los derechos.

Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

Broudy NA 4/11/11 MCI 4104164 PN 1084598