

PHILIPS

필립스 드림맵퍼

필립스 드림스테이션 사용자를 위한 자가 수면관리 시스템



필립스 슬립케어 고객센터
☎ 080-500-0004

채팅상담  카카오톡

필립스 슬립케어 친구 가입 후 가능
근무시간: 월~금 09:00-18:00 (공휴일 제외)



필립스 슬립케어 고객센터
☎ 080-500-0004

채팅상담  카카오톡

필립스 슬립케어 친구 가입 후 가능
근무시간: 월~금 09:00-18:00 (공휴일 제외)

필립스 모바일 수면관리 어플리케이션,

드림맵퍼

필립스 드림스테이션 양압기 사용자라면
누구나 드림맵퍼를 무료로 이용하실 수 있습니다.



드림맵퍼 소개



드림스테이션 양압기 사용기록 및 치료 세부내용 조회

- ✓ 양압기 사용시간 조회
- ✓ 무호흡 · 저호흡 지수(AHI) 조회
- ✓ 마스크 피팅 점수 조회



드림스테이션 양압기 사용기록 요약보고서 생성


- ✓ 드림스테이션 사용기록 보고서 PDF 저장 가능
- ✓ 드림스테이션 사용기록 보고서 메일 전송 가능
- ✓ 드림스테이션 사용기록 보고서 프린터 출력 가능



수면무호흡증 및 드림스테이션 양압기 교육 영상 제공

- ✓ 수면 무호흡증에 대한 안내 영상 제공
- ✓ 드림스테이션 장비 사용 교육 영상 제공
- ✓ 드림웨어 마스크 착용 교육 영상 제공

드림맵퍼 주요기능

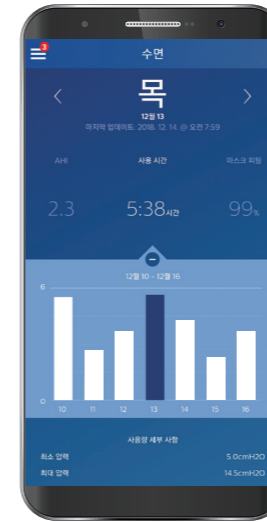

「수면」 탭에 가면
드림스테이션 사용기록 및
치료 세부내용을
조회할 수 있습니다.




「수면」 탭 우측 상단의
버튼(☰)을 누르면 드림스테이션
사용기록 요약보고서를
생성할 수 있습니다.



「학습」 탭에 가면
수면무호흡증 및 드림스테이션
사용 교육 영상을
조회할 수 있습니다.



드림맵퍼 설치하기

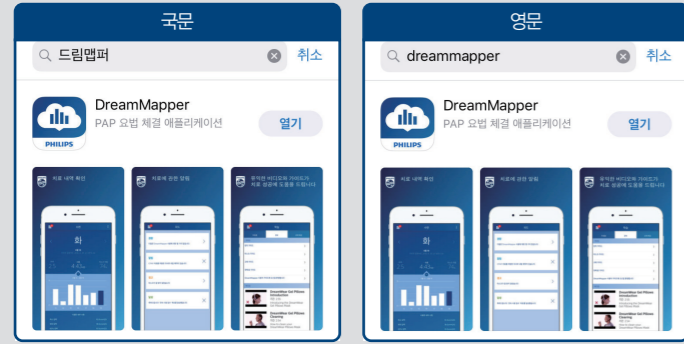

1 모바일 기기에서 '드림맵퍼' 어플리케이션 다운로드

1 앱스토어 또는 구글플레이에 접속합니다.




- 2 검색창에 "드림맵퍼" 또는 "DreamMapper"를 입력합니다.
- 3 드림맵퍼 어플리케이션에서 설치 버튼을 눌러 다운로드합니다.



5 드림맵퍼 '시작가이드' 확인


- 1 선택한 마스크의 착용법을 확인할 수 있습니다.
- 2 수면무호흡증에 대한 아래의 안내 영상을 시청할 수 있습니다.
 - 1) 수면 무호흡증이란?
 - 2) 수면 무호흡증의 치료법

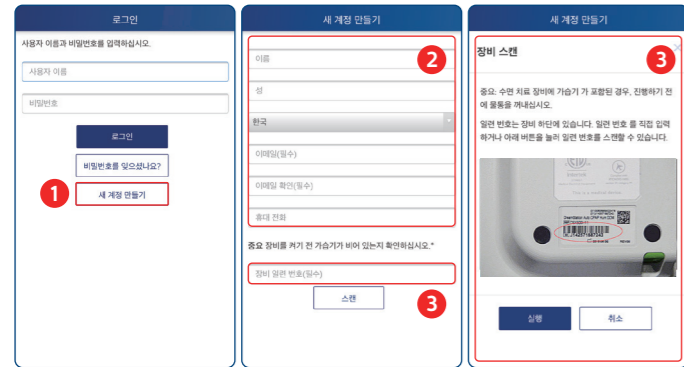

2 드림맵퍼 새 계정 생성하기 : 장비 등록

- 1 "새 계정 만들기"를 누릅니다.
- 2 이름/성을 입력합니다. 국가명 "한국"으로 입력합니다. 이메일 주소와 휴대전화번호를 입력합니다.
- 3 장비 뒷면의 일련번호를 입력합니다.


* 장비일련번호는 드림스테이션 기기하단에 J로 시작하는 바코드를 스캔하거나, 직접 입력할 수 있습니다.

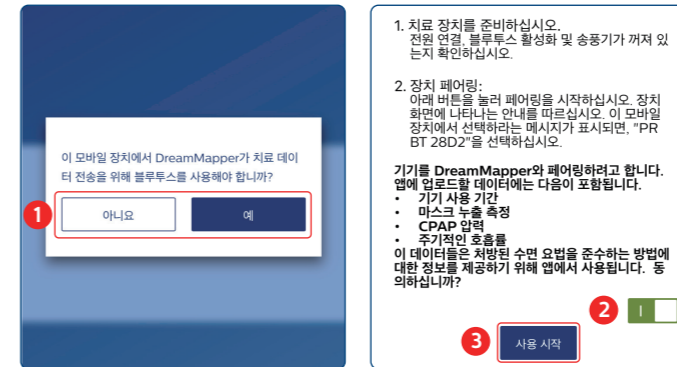

6 블루투스 설정하기 : 블루투스 사용 및 데이터 제공 동의 (필수)

- 1 블루투스 사용 여부에 "예" 버튼을 누릅니다.
- 2 데이터 제공동의 버튼*에 체크합니다.
- 3 "사용시작" 버튼을 누릅니다.


* 버튼을 누르면 녹색으로 변경됩니다.

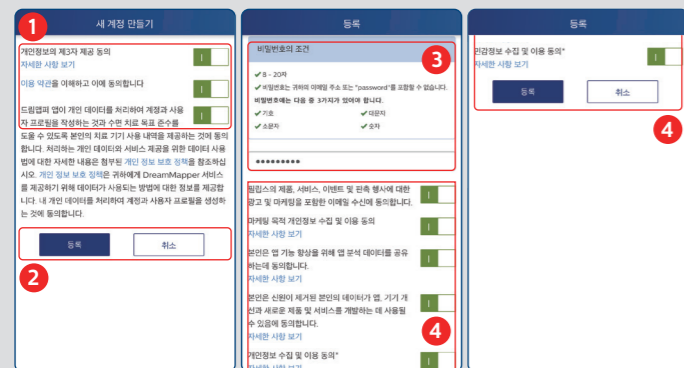

3 드림맵퍼 새 계정 생성하기 : 비밀번호 등록

- 1 개인정보 제공동의 버튼*에 체크합니다.
- 2 "등록" 버튼을 누릅니다.
- 3 비밀번호**를 생성합니다.
- 4 추가 정보 제공동의버튼에 체크 후 "등록" 버튼을 누릅니다.


* 버튼을 누르면 녹색으로 변경됩니다.
** 기호, 대·소문자, 숫자가 포함되어야 합니다.

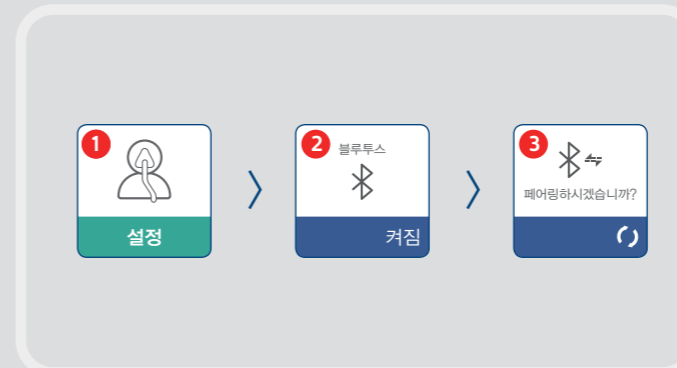

7 블루투스 설정하기 : 드림스테이션 페어링*하기

- 1 드림스테이션에서 조절다이얼을 사용하여 "설정"란에 들어갑니다.
- 2 드림스테이션 "설정"란의 블루투스 화면에서 조절다이얼을 사용하여 "켜짐"으로 변경합니다.
- 3 페어링 화면이 나오면 조절다이얼을 사용하여 "예"로 변경합니다.


* 화면에 보이는 코드 6자리를 모바일 화면에 입력합니다.

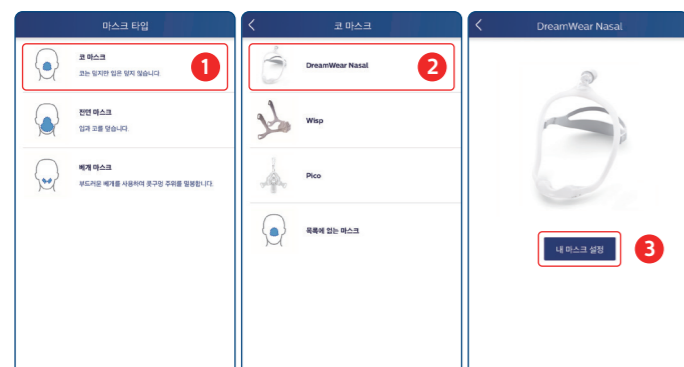

4 내 마스크 설정하기

- 1 사용하는 마스크 타입을 선택합니다.
- 2 사용하는 마스크를 선택합니다.
- 3 "내 마스크 설정" 버튼을 눌러 마스크 설정을 완료합니다.

예) 드림웨어 나잘 : "코마스크"
드림웨어 풀페이스 : "전면 마스크"
드림웨어 겔 필로우 : "베게 마스크"

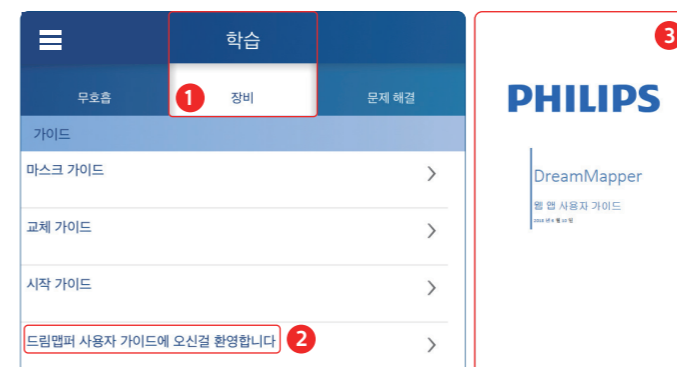

8 드림맵퍼 어플리케이션 설치 완료

- 1 드림맵퍼에서 「학습」 탭 -> 「장비」에 들어갑니다.
- 2 "드림맵퍼 사용자 가이드" 버튼을 누릅니다.
- 3 드림맵퍼 사용자 가이드가 PDF 파일로 제공됩니다.

※ 드림맵퍼 설치 후 사용에 대한 자세한 설명은 한글 사용자 가이드를 통해 확인할 수 있습니다.

