

www.philips.ru/AVENT

Присоединяйтесь к нашим сообществам:

vk.com/philipsavent instagram.com/aventrussia

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Россия:

8-800-200-08-80 (вопросы по продукции Philips Avent)

8-800-200-08-83 (вопросы по грудному вскармливанию) Звонок по России бесплатный





Индивидуальный банк грудного молока c Philips Avent

Philips AVENT стремится к тому, чтобы мамы выбирали грудное вскармливание, так как грудное молоко обладает идеальными для новорожденного свойствами. Оно содержит питательные вещества, укрепляет иммунную систему и помогает формированию многих систем организма. Наша миссия – поддерживать кормление грудным молоком даже в таких ситуациях, когда мама временно не может кормить грудью малыша.

Мы понимаем, что при невозможности организации вскармливания ребенка непосредственно грудью все усилия мамы и медицинских работников должны быть направлены на поддержку и сохранение у нее лактации для кормления ребенка сцеженным грудным молоком. Заранее созданный индивидуальный банк грудного молока может выручить маму в этой ситуации.

Индивидуальный «банк» грудного молока – это заранее сцеженное молоко, которым в любой момент можно накормить малыша, если мамы нет рядом или она временно не может кормить.

В каких ситуациях нужен банк грудного молока?



Помочь новорожденному ребенку

Банк грудного молока может понадобиться, если малыш по каким-либо причинам не может сам сосать грудь.



Визит мамы к врачу

Здоровая мама — здоровый малыш, поэтому помимо визитов к педиатру самой маме необходимо посещать наблюдающего ее врача. Как правило, первый визит приходится делать через месяц после родов.



Болезнь мамы

Иногда так случается, что кормящей маме прописывают медикаменты (например, антибиотики), несовместимые с грудным вскармливанием. Если в этот момент у мамы нет запасов молока, малыша вынуждено переводят на смеси.



Выход на работу или учебу

В случаях, когда профессиональная жизнь мамы требует ее скорейшего возвращения на работу или учебу, заранее сформированный банк молока позволит ей не беспокоиться о благополучии и здоровье малыша.



Занятие любимым хобби

Многие женщины после родов хотят продолжать вести активный образ жизни, ходить на спорт, встречаться с подругами и заниматься любимым делом.

Создать банк c Philips Avent легко!

Нужно выполнить всего несколько действий





Перед созданием банка молока простерилизуйте все приборы для кормления





С помощью двухфазного молокоотcoca Philips Avent сцедите нужное количество молока

Хранение `



Храните молоко в специальных контейнерах или стерильных пакетах для хранения молока, соблюдая температурный режим и срок хранения

Разморозка ч и подогрев ч



Чтобы быстро и безопасно разморозить и подогреть молоко, воспользуйтесь подогревателем Philips Avent

Кормление)



Когда придет время, покормите малыша из бутылочки Philips Avent серии Natural, совместимой с грудным вскармливанием

Стерилизация

Стерилизация — это этап подготовки к созданию банка грудного молока.

Мы рекомендуем вам стерилизовать все приборы, которые вы будете использовать для сцеживания и хранения молока.

Иммунитет малыша еще полностью не сформирован, и встреча с бактериями может вызывать различные заболевания.

Поэтому так важно стерилизовать приборы, в которых хранится грудное молоко, ведь для бактерий грудное молоко — отличная среда для жизни и роста.



SCF284/03

Клинические исследования показали высокую эфективность электрических стерилизаторов **Philips Avent**. Они не только убивают 100% бактерий, которые чаще всего вызывают заболевания малышей, но и сохраняют стерильность всех изделий в течение 24 часов при закрытой крышке стерилизатора*.







Стерилизатор 3в1 называется модульным, потому что вы можете использовать разные модули, в зависимости от того, что вы стерилизуете в данный момент. Мальій контейнер — для мелких предметов (соски, пустышки). В контейнере побольше можно стерилизовать более крупные предметы, такие как детали молокоотсоса и бутылочки.



Сцеживание

Для создания банка и частых сцеживаний подойдет электронный молокоотсос Philips Avent серии Ultra Comfort. Он воссоздает двухфазное естественное сосание груди ребенком.

1. Фаза стимуляции

В режиме стимуляции мотор молокоотсоса создает поверхностный и ритмичный вакуум, что имитирует сосательные движения ребенка в первой фазе кормления.

2. Фаза сцеживания

Молокоотсос создает медленный глубокий вакуум, что соответствует сосательным движениям малыша во второй фазе кормления. При сцеживании вам больше не нужно наклоняться вперед благодаря конструкции корпуса молокоотсоса, его бесшумная работа не потревожит вас и вашего малыша, а специальная лепестковая насадка поможет в стимуляции притока молока благодаря массажным действиям в околососковой области. Не забывайте, что молокоотсос может выручить вас даже там, где нет розетки, т.к. он может работать и от батареек.



Хранение

Используйте чистые контейнеры или одноразовые стерильные пакеты для хранения молока.



Контейнеры для хранения грудного молока Philips Avent

- Герметичные и компактные контейнеры для удобного хранения сцеженного грудного молока в холодильнике или морозильной камере
- Удобные адапторы в комплекте позвлят вам присоединить контейнер к молокоотсосу для сцеживания прямо в контейнер или использовать его для кормления, присоединив соску
- Совместимы с молокоотсосами Philips Avent, сосками серии Anti-Colic и Natural
- Подходят для использования в подогревателе бутылочек, в микроволновой печи, посудомоечной машине и стерилизаторе
- Емкость контейнера 180 мл

Меняет ли грудное молоко свои свойства после разморозки?

Многие исследования показывают, что размороженное грудное молоко по питательной биологической ценности и микробиологической безопасности не уступает вскармливанию из груди.

Даже несмотря на то, что количество некоторых питательных веществ может снижаться, размороженное молоко превосходит по своей ценности любую молочную смесь.

Клинические исследования доказали высокую степень микробиологической безопасности хранения сцеженного материнского молока в контейнерах Philips Avent, при условии соблюдения основных правил сбора, замораживания и размораживания грудного молока.*



 Боровик Т.Э., Лукоянова О.Л., Лазарева А.В., Бокучава Е.Г.
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр эдоровья деfей» Министерства здравоохранения Российской Федерации, «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА ГРУД-НОГО МОДОКА»

Сроки хранения грудного молока

при комнатной температуре 23-25 °C

до 3-4 часов

в холодильнике 2-6 °C

до 24 часов

в морозильной камере -18 °C до 3-6 месяцев (оптимально 3 месяца)

Основные правила хранения грудного молока

- Перед заморозкой охладите молоко в холодильнике в течение 30 минут
- Обязательно подписывайте дату и время на контейнерах для хранения, чтобы следить за сроком годности молока
- Не храните молоко в дверце, старайтесь выбирать самое холодное место в холодильнике, ставьте контейнер глубже на полку холодильника
- Используйте размороженное молоко, помещенное в холодильник в течение 24 часов
- Не замораживайте молоко повторно
- Транспортируйте молоко в термосумках со льдом
- Доливайте грудное молоко к замороженному, только предварительно остудив его в холодильнике в течение 30 минут
- Доливать охлажденное грудное молоко к замороженному можно только в течение 24 часов



SCF603/25 — 25 шт.

Пакеты для хранения грудного молока Philips Avent

- Надежная герметичная двойная застежка-молния, усиленные боковые швы и двухслойный материал для безопасного хранения грудного молока
- Стерильность и гигиеничность перед первым использованием
- Изготовлены из материала, не содержащего бисфенол-А
- Компактные и удобные для хранения в холодильнике или морозильной камере
- Надежное широкое отверстие пакета обеспечивает удобное наполнение и выливание грудного молока
- Удобно отмечать дату и время начала хранения молока
- Емкость пакета 180 мл

Разморозка и подогрев


Разморозить и подогреть молоко можно несколькими способами:

- В холодильнике: при этом нужно не забывать заранее поставить контейнер с молоком, т.к. для разморозки в холодильнике может потребоваться достаточно много времени.
- Под струей горячей воды: вам потребуется около 3 часов на разморозку, не забывайте постоянно поворачивать контейнер с молоком.
- На водяной бане: следите за температурой, желательно, чтобы она не превышала 37 °С.
- Не используйте микроволновую печь для подогрева молока.
- Не нагревайте молоко выше 37 °C.
- Встряхните молоко перед кормлением.
- Перед кормлением проверьте температуру молока.



SCF355/00

Для быстрого размораживания и подогрева молока вы можете использовать подогреватель бутылочек и детского питания Philips Avent. Он помогает сохранить полезные вещества и витамины, подогревает молоко бережно и равномерно, без перегрева, экономит ваше время. Полностью совместим с бутылочками и контейнерами Philips Avent.

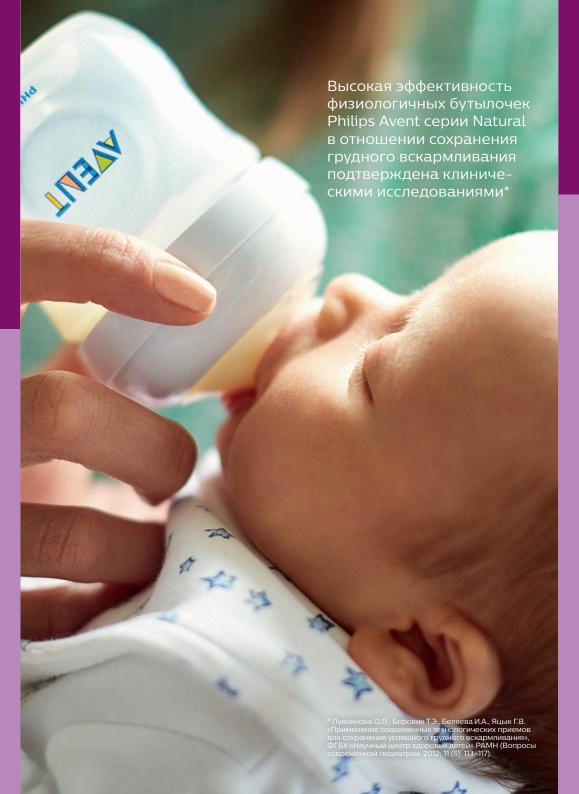

Кормление

Какую бутылочку выбрать для кормления грудным молоком?

Бутылочки Philips Avent серии Natural специально разработаны для совмещения с грудным вскармливанием.



Бутылочки серии Natural идеально сочетаются с грудным вскармливанием.

Благодаря физиологичной соске процесс кормления младенца из бутылочки становится максимально близким к естественному. Достигается это благодаря тому, что основание соски широкое и малыш захватывает соску как материнский сосок, спиралевидные ребра жесткости на соске обеспечивают ей упругость, но при этом ребенок может растягивать соску во время кормления точно так же, как он это делает с материнским соском. Это позволяет снизить риск отказа ребенка от груди после докорма из бутылочки, что так важно при необходимости докорма грудничков.