



- ステータスインジケータ
- 小児用キー挿入口
- 電源ボタン
- オプションボタン
- ショックボタン

・「使用準備完了ランプ」の状態を毎日確認する

緑色のランプが点滅していれば使用可能な状態です。ランプが消灯している場合は、注意が必要です。ビープ音が聞こえる場合は、FR3の電源をオンにし、音声メッセージが開始されたら電源ボタンを押して、FR3のステータスについての情報を確認し、表示される問題の解決方法に従ってください。それでも解決しない場合には、FR3をご購入いただきました販売店へご連絡下さい。



スタンバイモード
(正常時)


こちらが点滅することを毎日確認して下さい。(2~3秒間隔で点滅します)

正常状態	異常あり
ランプ(緑)が点滅している	ランプ(緑)が消灯している

* ユーザー確認テスト

(何か問題が起こったら、まずはこちらを行って下さい)

FR3の電源をオンにし、音声メッセージが開始されたら電源ボタンを押してステータス画面を表示します。ステータス画面の進捗バーが最後まで進む前に「管理モード」ボタンを押して管理モードにします。「管理モード」画面で「ユーザー確認テスト」を選択すると、テストが開始されます。画面メッセージに従って、テストを完了して下さい。次にAEDがスタンバイ状態になることを確認して下さい。

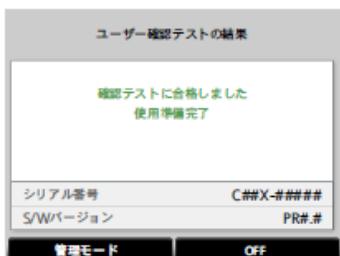

※ テストが不合格の場合は、右記画面のようにエラーコードが表示されますので、そちらを書き留めて下さい。また、シリアル番号も書き留め(機器の背面にも記載されております)ご購入いただきました販売店へご連絡下さい。

