

# Traumhaft einfach, einfach Pico

Philips Respironics Pico – Nasen-Maske

## Anleitung zur Anpassung der Maske



1

Stellen Sie vor dem Anlegen der Maske sicher, dass das Maskenkissen zu Ihrer Nasenbreite passt, ohne die Nasenlöcher zu blockieren.



2

Trennen Sie die Kopfband-Clips, indem Sie sie wie einen Schlüssel aus dem Rahmen herausdrehen.



3

Halten Sie das Maskenkissen sanft in Position über der Nase und ziehen Sie das Kopfband über den Kopf.



4

Bringen Sie die Kopfband-Clips wieder an, indem Sie sie in den Maskenrahmen drücken.  
*Hinweis: Wenn Sie die Clips nicht verwenden möchten, können Sie die Laschen des Kopfbandes durch die Schlitz des Maskenrahmens fädeln.*



5

Ziehen Sie an den Laschen des Kopfbandes, um die oberen und unteren Bänder gleichmäßig einzustellen. Die Maske sollte bequem auf Ihrem Gesicht sitzen. **Wichtig:** Ziehen Sie die Bänder nicht zu fest an. Das Kopfband sollte locker und bequem sitzen.



6

Nehmen Sie verschiedene Schlafhaltungen ein. Bewegen Sie die Maske, bis sie komfortabel sitzt. Bestehen übermäßige Luftleckagen, nehmen Sie im Liegen endgültige Anpassungen vor.

Weitere Informationen zur Anpassung der Maske finden Sie in den mitgelieferten Gebrauchsanweisungen der Maske.

Weitere Informationen finden Sie auf [www.philips.de/pico](http://www.philips.de/pico)

BroudyTK 11/6/14 MCI 4106438 PN 1119731

**PHILIPS**  
RESPIRONICS