

So einfach wie Zähneputzen

1. Vorbereiten

Öffnen Sie einfach die grüne Abdeckung und geben Sie das Medikament hinein. Schließen Sie die Abdeckung wieder und lassen Sie Ihr Kind aufrecht sitzen, um mit der Behandlung zu beginnen.



2. Anwenden

Drücken Sie auf die Einschalttaste und ermutigen Sie Ihr Kind dazu, durch das Mundstück ein- und wieder auszuatmen.**

Der InnoSpire Go gibt hörbare und sichtbare Signale aus, wenn die Behandlung abgeschlossen ist – und schaltet sich anschließend selbst aus.



3. Reinigen

Nehmen Sie das Mundstück nach jeder Behandlung ab und spülen Sie es mit warmem Wasser. Reinigen Sie es jeden Abend in warmem Seifenwasser und desinfizieren Sie es einmal wöchentlich in kochendem Wasser.



Mehr Informationen

www.philips.de/innospire-go



PHILIPS

InnoSpire Go

Tragbarer
Mesh-Vernebler



Kinderleicht durchatmen

* Bei Verwendung von 2,5 ml Salbutamol.
** Für Kinder, die Schwierigkeiten im Umgang mit dem Mundstück haben, ist außerdem eine Maske im Lieferumfang enthalten.

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.
Technische Änderungen sind vorbehalten.
Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) oder ihrer jeweiligen Inhaber.

Version 01.1
Juni 2017
XX XX/XX/XXXX PN483923
www.philips.de/innospire-go

Die Kindheit unbeschwert genießen

Durch sein geringes Gewicht, die unkomplizierte Handhabung und die schnelle, fast lautlose Wirkweise eignet sich der InnoSpire Go Vernebler ideal für die Aerosoltherapie Ihres Kindes. Er ist zu Hause genauso einsetzbar wie auf dem Spielplatz und befreit Ihr Kind und Sie von vielen Einschränkungen und Sorgen.

Wirksame Therapie, einfach griffbereit



Behandlung in 4 Minuten*

Der InnoSpire Go ermöglicht eine wirksame Therapie. Bei Abschluss der Behandlung gibt er hörbare und sichtbare Signale aus – und schaltet sich anschließend selbst ab.



Nahezu geräuschlos

Der kleine, tragbare Vernebler, für den es auch eine zusätzliche Maske gibt, lässt sich überall einfach und wirksam verwenden.



Integrierter langlebiger Akku

Mit dem wiederaufladbaren Akku sind bis zu 30 Behandlungen möglich, bevor dieser aufgeladen werden muss.



Einfacher Aufbau – nur zwei Einzelteile

Dank des aufsetzbaren Mundstücks lässt sich der InnoSpire Go einfach verwenden, reinigen und pflegen.**

Mehr Informationen
www.philips.de/innospire-go



← Tatsächliche Größe →

* Bei Verwendung von 2,5 ml Salbutamol.

** Für Kinder, die Schwierigkeiten im Umgang mit dem Mundstück haben, ist außerdem eine Maske im Lieferumfang enthalten.