



Erfüllt alle Ihre Wünsche

Das Sauerstoffsystem **UltraFill** von Philips Respironics für zu Hause – einzigartige Eigenschaften für die einfache und effektive Behandlung aller Ihrer Sauerstoffpatienten

PHILIPS

RESPIRONICS

sense and simplicity

UltraFill erfüllt alle Anfo



forderungen



UltraFill ist ein modernes Sauerstoffsystem für die Versorgung zu Hause mit einer Kombination aus einem Sauerstoffkonzentrator, einer Füllstation und Sauerstoffflaschen. So passt sich das System den verschiedenen Bedürfnissen der unterschiedlichsten Sauerstoffpatienten an- auch denjenigen, die sehr aktiv sind oder eine kontinuierliche Sauerstoffversorgung benötigen.

Vielfältige Vorteile

Das einzigartige Design von UltraFill sowie seine 200-bar-Flaschen bieten Ihren Patienten eine außerordentlich lang anhaltende Sauerstoffversorgung. UltraFill-Flaschen können bis 200 bar gefüllt werden und enthalten etwa 35 % mehr Sauerstoff als bei einer Füllung bis zu 140 bar. So benötigen Ihre Patienten weniger Flaschen und sind unabhängiger. Darüber hinaus produziert das UltraFill-System Sauerstoff und befüllt zur selben Zeit die Flaschen direkt beim Patienten zu Hause – regelmäßige Sauerstofflieferungen werden somit überflüssig.

Mit dem UltraFill haben Sie die Möglichkeit Ihren bereits vorhandenen Bestand an Konzentratoren EverFlo oder Millennium einzusetzen, indem Sie nur eine kleine Anpassung der dieser vornehmen.

Aktualisieren Sie Ihren Bestand an Konzentratoren der Serien EverFlo, Millennium und Sie werden in der Lage sein, den Bedarf Ihrer Patienten mit unserem Sauerstoffsystem für zuhause zu decken.

Der wartungsfreie UltraFill kann die Servicekosten reduzieren und bietet so zusätzliche Einsparmöglichkeiten. Zudem macht die intuitive Gestaltung von UltraFill die Verwendung für Ihre Patienten zum Kinderspiel.





Die Vorteile gehen noch weiter

Der UltraFill ermöglicht es Ihren Patienten zu Hause die Flaschen zu füllen und gleichzeitig ihre Sauerstofftherapie zu erhalten.¹ Der Patient muss während des Füllvorgangs nicht auf ein anderes Gerät wechseln.


Die 200- bar- Flaschen

Die Möglichkeit, Flaschen bis zu 200 bar zu befüllen, gibt Patienten mit großem Sauerstoffbedarf die Freiheit, länger mobil unterwegs zu sein und die Dinge zu tun, die sie tun möchten.

Die 1- oder 2-Liter-Flaschen von UltraFill sind mit integrierten Druckminderern oder Sparventilen ausgestattet und erfüllen so die Bedürfnisse von Patienten mit hohem Sauerstoffbedarf sowie von Patienten, die einen kontinuierlichen Flow benötigen. Diese leichten Aluminiumflaschen enthalten 35 % mehr Sauerstoff für den Patienten als Flaschen, die bis 140 bar gefüllt sind.

Diese einzigartige Eigenschaft verschafft Ihren Patienten mehr Unabhängigkeit mit langlebigeren und leichteren Flaschen. Somit stellt das System sowohl für Patienten mit kontinuierlichem als auch für Patienten mit impulsgesteuertem Flow eine ideale Lösung dar.

Noch me

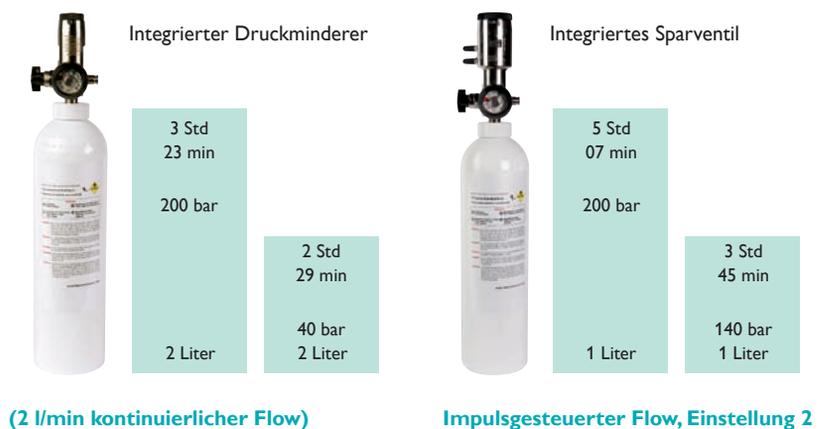

¹ Während des Füllvorgangs stehen bei einem 5-Liter-Konzentrator (EverFlo und Millennium) 3 l Sauerstoff pro Minute zur Verfüg.



ehr Freiheit

Patientenfreundliches Design

- einhändig zu bedienender Flaschenanschluss
- Patient kann das Befüllen beliebig beenden und wieder beginnen
- niedriger Geräuschpegel: 41,3 dBA
- Flaschen können auch nur teilweise gefüllt werden
- geringer Stromverbrauch: 110 W
- Füllstandsanzeige überwacht den Füllstand



Flexibilität. Mobilität. Unabhängigkeit.

Das Sauerstoffsystem UltraFill für gehört zur „EOX- Familie“, einer ganzen Produktfamilie von Philips Respironics für die Sauerstofftherapie, die Ihren Patienten ein sorgenfreies, komfortables Leben ermöglicht, unabhängig von Lieferanten und anderen Sauerstoffquellen.

Technische Daten für UltraFill	
Abmessungen (L x B x H):	229 x 508 x 648 mm
Gewicht:	20,4 kg
Geräuschpegel:	41,3 dBA
Stromverbrauch:	110 Watt
Flaschenfülldruck:	200 bar
durchschnittliche Fülldauer:	1 l: 122 min (2 Std 02 min) 2 l: 244 min (4 Std 04 min)
Sauerstoffabgabesystem-/Regulator typ:	integriert
Sauerstoffzufuhr während des Befüllens:	<3 l/min mit EverFlo oder Millennium M5
Sauerstoffkonzentration:	93 % (+/- 3 %)
kompatible Konzentratoren:	EverFlo, Millennium M5
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung/Transport:	15 bis 95 %, nicht kondensierend
Höhenbereich:	0 bis 2286 m

Flaschenspezifikationen*	1-Liter-Flaschen		2-Liter-Flaschen	
	mit Druckminderer	mit Sparventil	mit Druckminderer	mit Sparventil
O ₂ -Kapazität (l)	214	214	427	427
Höhe (mm)	440,6	474,3	478,6	512,3
Durchmesser (mm)	75	75	102	102
Gewicht leer/voll	1,7 kg / 2,0 kg	1,9 kg / 2,2 kg	2,75 kg / 3,3 kg	2,95 kg / 3,5 kg
Fülldauer	2 Std 02 min	2 Std 02 min	4 Std 04 min	4 Std 04 min
Laufzeit (impulsgesteuerter Flow bei Einstellung 2)	k.A.	5 Std 07 min	k.A.	10 Std 14 min
Laufzeit (2 l/min kontinuierlicher Flow)	1 Std 42 min	1 Std 42 min	3 Std 23 min	3 Std 23 min

Bestellinformationen						
Länder	UltraFill	EverFlo (OPI, UltraFill- kompatibel)	1-Liter-Flasche Druckminderer Sparventil		2-Liter-Flasche Druckminderer Sparventil	
Deutschland	1057124	1039367	1075576	1075577	1075578	1075579

Komplettes UltraFill-System	
Artikelnummer	Beschreibung
1074932	UltraFill-Station, 2. Flaschen und Tragetasche

Zubehör	
Artikelnummer	Beschreibung
1079978	Tragetasche für 1-Liter-Flasche
1079977	Tragetasche für 2-Liter-Flasche
1065696	UltraFill-Transferschläuche

--Gewährleistung	
UltraFill	
	standardmäßig 3 Jahre
Flaschen	
mit Druckminderer	5 Jahre
mit Sparventil	5 Jahre auf die Flasche, 3 Jahre auf das Sparventil

*Eine vollständige Liste aller 200-bar-Sauerstoffflaschen für UltraFill sowie die zugehörigen Daten finden Sie in der UltraFill-Gebrauchsanweisung.



**Philips Healthcare ist ein Unternehmen
der Royal Philips Electronics**

So erreichen Sie uns

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Asien

+49 7031 463 2254

Europa, Mittlerer Osten, Afrika

+49 7031 463 2254

Lateinamerika

+55 11 2125 0744

Nordamerika

+1 425 487 7000

800 285 5585 (toll free, US only)

Philips Respiroics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668

Kundendienst
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)

Philips Respiroics International
+33 1 47 28 30 82

Philips Respiroics Deutschland
+49 8152 93 06 0

Philips Respiroics Schweiz
+41 6 27 45 17 50

www.philips.com/respiroics
www.respiroics.de

Respiroics, UltraFill, EverFlo und Millennium sind Marken von Respiroics, Inc. und verbundener Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Bitte besuchen Sie uns unter <http://www.philips.de/respiroics>



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern oder die Herstellung zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen.

Broudy AE 12/8/11 MCI 4104227 PN 1091071