



© 2016 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Änderungen sind vorbehalten. Alle Marken
sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder den
jeweiligen Eigentümern.

Broudy AM 5/20/16 MCI 4106785 PN 1129173

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 US

Philips Respironics Deutschland
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics Schweiz
+41 6 27 45 17 50

www.philips.de/respironics

PHILIPS

RESPIRONICS

SimplyGo Mini

Die neue Freiheit für Ihre Patienten.

Entwickelt für die Bedürfnisse

aktiver Patienten

von heute



Wir haben den tragbaren Sauerstoffkonzentrator SimplyGo Mini mit vielen attraktiven, einfach zu verstehenden Funktionen entwickelt, damit Sie auf die Bedürfnisse Ihrer mobilen Patienten eingehen und Ihnen ein zuverlässiges, modernes Gerät anbieten können.

Wir bei Philips Respironics sind immer bestrebt qualitativ hochwertige Geräte zu entwickeln. Nun können Sie Ihren Patienten mit SimplyGo Mini auch höchste Qualität in Form eines leichten, tragbaren Sauerstoffkonzentrators anbieten.

Zuverlässigkeit und Qualität

Wenn Sie einem Patienten einen portablen Sauerstoffkonzentrator bereitstellen, müssen Sie wissen, dass dieser zuverlässig und robust ist, damit er Ihr Geschäft in folgenden Punkten unterstützen kann:

- Reduzieren von laufenden Kosten bei Sauerstofflieferungen
- Reduzierung der Wartungskosten
- Einfachere Bestandsverwaltung
- Minimieren von Patientenbeschwerden

SimplyGo Mini wurde den gleichen strengen Tests wie unser SimplyGo unterzogen. SimplyGo Mini wurde realen Bedingungen einschließlich Herunterfallen, Erschütterungen und verschiedenen Temperaturen ausgesetzt, um die verlässliche Funktion im Alltagsgebrauch sicherzustellen.

Erfüllen Sie die Bedürfnisse Ihrer Patienten

Mit bis zu 9 Stunden Akkulaufzeit* und einer Sauerstoffkapazität von 1.000 ml/min bietet der SimplyGo Mini bei einem Gewicht von nur 2,3 kg¹ uneingeschränkte Mobilität. Das bedeutet, dass Sie mehr Patienten die Funktionen und Leistung anbieten können, die sie von einem tragbaren Sauerstoffkonzentrator fordern. Somit können Sie mehr Patienten eine größere Auswahl anbieten, ob es sich um die gewünschte Akkulaufzeit, das Gewicht oder die Sauerstoffkapazität handelt.

*9 Stunden Akkulaufzeit bei Verwendung des erweiterten Akkus bei einer Einstellung von 2, 20 AZ/min

¹SimplyGo Mini mit dem Standard-Akku

Was spricht für den Erwerb des SimplyGo Mini?



Zufriedene Patienten



Potenzielle Erhöhung
des klinischen Vertrauens
und Zunahme von
Empfehlungen



Weniger Anrufe aufgrund
von Ausfällen führt zu
zufriedenen Mitarbeitern



Weniger Lagerhaltung
aufgrund von weniger
Ausfällen



Kostenersparnisse durch
weniger Notrufe und
Kundenfahrten



Keine unnötigen
Notdienstfahrten aufgrund
von Produktausfällen

Einfach ein intelligentes Design

SimplyGo Mini ist der kleinste und leichteste mobile Sauerstoffkonzentrator, der jemals von Philips Respironics entwickelt wurde, und ist dank seiner Funktionen optimal auf Patienten von heute angepasst:

- Ansprechendes und schlankes Design
- Einfach herauszunehmender, langlebiger externer Akku
- geringes Gewicht (2,3 kg)
- Intuitiv zu bedienender Bildschirm
- Strapazierfähige Tragetasche oder Rucksack





Produktspezifikationen

Sauerstoffkonzentrationen ²	87 – 96 % bei allen Einstellungen ² Basierend auf einem Luftdruck von 101 kPa bei 21° C		
Ausgangsdruck	1,4 bar		
Flow-Einstellungen und Bolusmenge	Einstellung	Bolusmenge bei 20 AZ/min	Max. Atemminutenvolumen
	1	11 ml	220 ml/min
	2	22 ml	440 ml/min
	3	33 ml	660 ml/min
	4	44 ml	880 ml/min
	5	50 ml	1.000 ml/min
	+/- 25 % oder 6 ml, je nachdem, welcher Wert höher ist (durchschn. 20 aufeinanderfolgende Impulse) im Nenn-Umgebungsbereich		
Geräuschpegel	40 dBA		

Physikalische Daten:

Größe	Mit Standard-Akku: 23,9 cm x 21,1 cm x 9,1 cm Mit erweitertem Akku: 25,9 cm x 21,1 cm x 9,1 cm		
Gewicht	2,3 kg mit installiertem Standard-Akku 2,7 kg mit installiertem erweitertem Akku		
Benutzeroberfläche	Touchscreen-LCD		

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	5° C bis 35° C		
Relative Luftfeuchtigkeit	15 % bis 93 %		
Höhe	Bis zu 3.048 m		

Wechselstromversorgung

Eingangsleistung	100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz		
Ausgangsleistung	19 V Gleichstrom, 6,3 A max.		
Stromverbrauch	120 W während des Ladevorgangs		

Gleichstromversorgung

Eingangsleistung	12 – 16 V Gleichstrom		
Ausgangsleistung	19 +/- 5 % V Gleichstrom, 6,3 A		

Akustischer Alarm

Geräuschpegel	56 dBA oder höher gemessen bei 1 m		
Alarmtyp	Keine Atmung, niedrige Sauerstoffkonzentration, hohe Atemfrequenz, technischer Fehler, niedrige Akkuleistung, kein Flow, Akku entladen, externer Stromausfall		

Akku

Substanz	Lithium-Ionen 14,4 V Gleichstrom (nominal)		
Akku-Optionen	Standard-Akku, erweiterter Akku (entspricht zwei Standard-Akkus)		
Abmessungen	Standard-Akku: 20,1 cm x 9,1 cm x 2,5 cm Erweiterter Akku: 20,1 cm x 9,1 cm x 4,8 cm		
Gewicht	Standard-Akku: 0,50 kg Erweiterte Batterie 0,95 kg		
Amperestunden pro Standard-Akku	3,4 Ah x 3,6 V x 8 Zellen = 97,9 Wh pro Standard-Akku		
Ladezeit	Standard-Akku: 4 Stunden maximal Erweiterter Akku: 8 Stunden maximal		

Typische Akkulaufzeit bei Einstellung 2, 20 AZ/m³

Standard-Akku	Bis zu 4,5 Stunden		
Erweiterter Akku	Bis zu 9 Stunden		

³Die Akkulaufzeiten basieren auf neuen, vollständig aufgeladenen Akkus in einem neuen SimplyGo Mini-System. Die Akkulaufzeiten sinken mit zunehmendem Alter des Akkus und hängen von Umgebungsbedingungen, Abnutzung im Laufe der Zeit und Betriebszustand des Konzentrators ab.

Bestellinformationen

Gerät	Artikelnummer
SimplyGo Mini mit Standard-Akku enthält: tragbarer Sauerstoffkonzentrator SimplyGo Mini, Tragetasche, ein wiederaufladbarer Standard- Lithium-Ionen-Akku, jeweils ein Netzkabel für Gleich- und Wechselstrom, Zubehörtasche und Bedienungsanleitung	Deutschland: 1113607
Das System SimplyGo Mini mit dem erweitertem Akku enthält: tragbarer Sauerstoffkonzentrator SimplyGo Mini, Tragetasche, ein wiederaufladbarer erweiterter Lithium-Ionen-Akku, jeweils ein Netzkabel für Gleich- und Wechselstrom, Zubehörtasche und Bedienungsanleitung	Deutschland: 1113608



Zubehör	Artikelnummer
Standard-Lithium-Ionen-Akku	1116816
Erweiterter Lithium-Ionen-Akku	1116817
Wechselstromadapter für SimplyGo Mini	1116818
Gleichstromadapter für SimplyGo Mini	1116819
Externes Ladegerät für SimplyGo Mini	1119950

Taschen – Braun	Artikelnummer
SimplyGo Mini-Tragetasche und Gurt, braun	1119897
SimplyGo Mini-Zubehörtasche, braun	1116824
SimplyGo Mini-Rucksack, braun	1116836

Taschen – Schwarz	Artikelnummer
SimplyGo Mini-Tragetasche und Gurt, schwarz	1119928
SimplyGo Mini-Zubehörtasche, schwarz	1119893
SimplyGo Mini-Rucksack, schwarz	1119894

Gewährleistungen	Artikelnummer
3-jährige Garantieverlängerung für die Siebe (kann nur bei Erstbestellung erworben werden)	1122070
2-jährige Garantieverlängerung für die Siebe (kann jederzeit bestellt werden)	1120123

Mehr Informationen

Besuchen Sie www.philips.de/respironics, um weitere Informationen zu SimplyGo Mini zu erhalten.