



ステータスインジケータ
電源ボタン
オプションボタン
ショックボタン

「使用準備完了ランプ」の状態を毎日確認する

・ステータス・インジケータに「砂時計のマーク」が点滅していれば使用可能な状態です。ピープ音が聞こえ、「×」印が点滅または点灯している場合は注意が必要です。
このような場合は、バッテリー装着セルフテストを行ってください。それでも問題が解決しない場合は、ご購入いただきました販売店へご連絡下さい。




スタンバイモード
(正常時)

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

* バッテリー装着セルフテスト

(何か問題が起これたら、まずはこちらを行って下さい)

機器に装着されているバッテリーを一度取り外し、再度挿入してください。
自動的にセルフテストが開始されます。画面メッセージに従って、セルフテストを完了して下さい。
次にAEDがスタンバイ状態になることを確認して下さい。

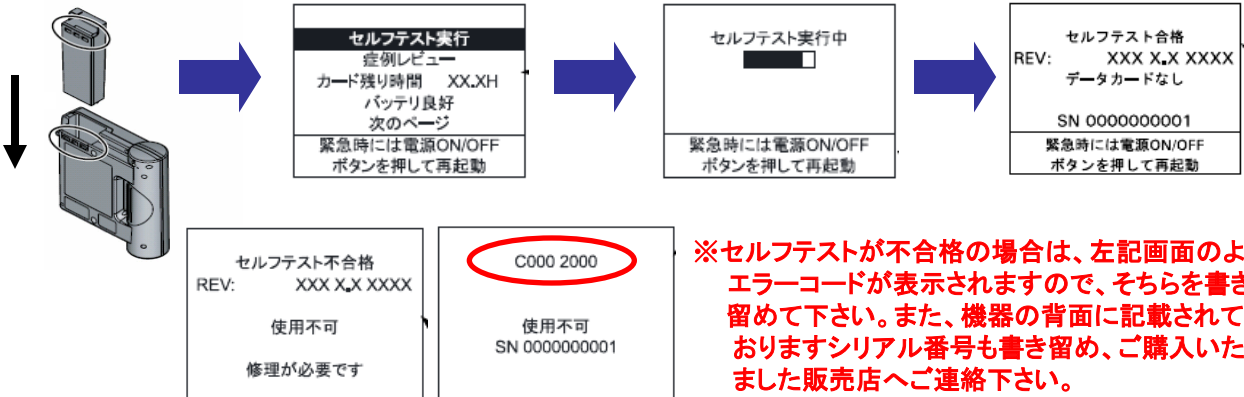

※セルフテストが不合格の場合は、左記画面のようにエラーコードが表示されますので、そちらを書き留めて下さい。また、機器の背面に記載されており、シリアル番号も書き留め、ご購入いただきました販売店へご連絡下さい。