

# Access CT

## Очистка системы

Для очистки поверхностей системы, включая консоль, стол, гентри и дополнительные принадлежности, используйте антисептик, разрешенный к применению руководством. В качестве альтернативы можно использовать раствор хлора и воды в пропорциях в соответствии с рекомендациями ЕРА:

- для стандартной очистки необходимо 500-615 ч./млн. активного хлора
- для очистки от большого количества биологической жидкости необходимо 5 000-6 150 ч./млн. активного хлора



### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

При очистке кнопок и внутренней поверхности гентри следите за тем, чтобы жидкость не попала внутрь.

Кровь и контрастное вещество представляют опасность для здоровья. Примите меры предосторожности при удалении крови или остатков контрастного вещества.



### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Запрещается использовать моющие средства или органические растворители для очистки системы. Высококонцентрированные моющие средства, спирт и органические чистящие средства могут вызвать повреждение покрытия и повлиять на прочность конструкции.