

# Brilliance CT Big Bore

## Очистка и дезинфекция системы

Очистка - это удаление видимых загрязнений (например, органического и неорганического материала) с объектов и поверхностей. Она выполняется вручную или механическим способом с применением воды и моющих или ферментативных средств. Перед дезинфекцией необходимо провести тщательную очистку, так как неорганические и органические материалы, которые остаются на поверхностях приборов, препятствуют эффективности обработки.

Дезинфекция должна проводиться в соответствии с рекомендациями по дезинфекции низкого и среднего уровня, согласно руководству CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) ([http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/disinfection\\_nov\\_2008.pdf](http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/disinfection_nov_2008.pdf)).

Поверхности системы являются некритическими и подлежат воздействию дезинфицирующими средствами низкого и среднего уровня.

Для очистки поверхностей системы, включая консоль, стол, гентри и дополнительные принадлежности, используйте антисептик, разрешенный к применению руководством.

Для очистки и дезинфекции могут использоваться следующие вещества:

- Аэрозольные чистящие средства или салфетки, эквивалентные раствору хлора в концентрации 1:10
- Дезинфицирующие средства или бактерицидные салфетки низкого или среднего уровня
- 3% раствор перекиси водорода
- Этанол
- Десульфированные сжиженные нефтяные газы
- Четвертичный аммониевые соединения
- Бензил-С12-18-алкилдиметил
- Соли с 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он-1,1-диоксид (1:1)
- Дистиллированная вода
- Метиловый спирт
- Раствор хлора в воде в пропорции 1:10

При очистке переднего и заднего кожухов компьютерного томографа прикрывайте микрофоны, чтобы очищающий раствор не попал внутрь.

При очистке кнопок и внутренней поверхности гентри следите за тем, чтобы очищающий раствор не попал внутрь.

Кровь и контрастное вещество представляют опасность для здоровья. Примите меры предосторожности при удалении крови или остатков контрастного вещества.



### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

**Запрещается использовать моющие средства или органические растворители для очистки системы. Высококонцентрированные моющие средства, спирт и органические чистящие средства могут вызвать повреждение покрытия и повлиять на прочность конструкции.**