

MX16 СТ

Очистка системы

Для очистки поверхностей системы, включая консоль, стол, гентри и дополнительные принадлежности, используйте антисептик, разрешенный к применению руководством. В качестве альтернативы можно использовать раствор хлора и воды в пропорциях в соответствии с рекомендациями ЕРА:

- для стандартной очистки необходимо 500-615 ч./млн. активного хлора
- для очистки от большого количества биологической жидкости необходимо 5 000-6 150 ч./млн. активного хлора



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При очистке кнопок и внутренней поверхности гентри следите за тем, чтобы жидкость не попала внутрь.

Кровь и контрастное вещество представляют опасность для здоровья. Примите меры предосторожности при удалении крови или остатков контрастного вещества.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается использовать моющие средства или органические растворители для очистки системы. Высококонцентрированные моющие средства, спирт и органические чистящие средства могут вызвать повреждение покрытия и повлиять на прочность конструкции.