

PHILIPS

InnoSpire Go

Nébuliseur portable
en maille



Se
simplifier
la vie

Plus de temps pour s'amuser

Rapide, efficace et simple d'utilisation, le nébuliseur InnoSpire Go est conçu pour réduire la durée de traitement de l'asthme, afin que votre enfant ait davantage de temps pour s'amuser.



Réduit la durée de traitement de 25%*



Traitement en 4 minutes**

Un appareil de thérapie efficace pour le traitement de l'asthme utilisant des signaux sonores et visuels pour indiquer la fin du traitement – avant l'arrêt automatique de l'appareil.



Un silence presque complet

Un petit nébuliseur, portable et discret, à utiliser partout.



Batterie longue durée intégrée

La batterie rechargeable offre jusqu'à 30 traitements en une seule charge.



Simple, en deux parties

L'embout buccal, facilement détachable, simplifie l'utilisation, le nettoyage et l'entretien d'InnoSpire Go.***

En savoir plus

www.philips.be/asthme





← Taille réelle →

- * Par rapport à son prédécesseur Aeroneb Go.
- ** Avec 2,5 ml de salbutamol
- *** Un masque pour les enfants ayant des difficultés à utiliser l'embout buccal est fourni.

Simple comme un jeu d'enfant...

1. Remplissage

Soulevez le couvercle vert et versez le médicament. Fermez le couvercle et assurez-vous que votre enfant est assis bien droit, prêt pour le traitement.



2. Traitement

Appuyez sur le bouton Marche puis demandez à votre enfant d'inspirer et d'expirer dans l'embout buccal.*** InnoSpire Go indiquera la fin du traitement à l'aide de signaux sonores et visuels, puis s'éteindra.



3. Nettoyage

Après chaque traitement, retirez l'embout buccal et rincez-le à l'eau chaude. À la fin de chaque journée, lavez-le à l'eau chaude savonneuse et, une fois par semaine, désinfectez-le à l'eau bouillante.



En savoir plus

www.philips.be/asthme



** Avec 2,5 ml de salbutamol

*** Un masque pour les enfants ayant des difficultés à utiliser l'embout buccal est fourni.



© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.
Les spécifications techniques
sont sujettes à modifications
sans préavis. Philips Respironics
et Respironics Respiratory Drug
Delivery (UK) Ltd sont des
filiales de Philips.

Respironics Respiratory
Drug Delivery (UK) Ltd
Chichester Business Park
City Fields Way
Tangmere
Chichester
PO20 2FT Royaume-Uni