

Zo eenvoudig als **1, 2, 3...**

1. Vullen

Til het groene deksel op en voeg de medicatie toe. Sluit het deksel en ga rechtop zitten, klaar om de behandeling te starten.



2. Behandeling

Druk op de startknop en adem in en uit door het mondstuk.***
InnoSpire Go zal het einde van de behandeling aangeven met een visueel en geluidssignaal alvorens automatisch uit te schakelen.




3. Reinigen

Na elke behandeling het mondstuk spoelen met warm water. Aan het einde van iedere dag wassen met water en zeep en één keer per week desinfecteren in kokend water.



Meer informatie:

www.philips.com/respironics

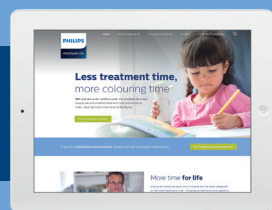

** Met gebruik van 2,5 ml salbutamol

*** Een kindermasker is beschikbaar indien u het moeilijk vindt om het mondstuk te gebruiken.



© 2017 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Philips Respironics and Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd are Philips companies.

Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd
Chichester Business Park
City Fields Way
Tangmere
Chichester
PO20 2FT UK

YL 3/6/17 PN487719
www.philips.com/respironics

PHILIPS

InnoSpire Go

Draagbare
mesh vernevelaar



Meer tijd
in het
dagelijks
leven

Meer tijd voor fijne dingen in het leven

Snel, effectief en eenvoudig te gebruiken. De InnoSpire Go vernevelaar is ontworpen om behandelingen te verkorten, waardoor je meer tijd hebt om te spelen!

Vermindert de behandelingstijd met 25%*



Behandeling in 4 minuten**

Een efficiënte vernevelaar die het einde van de behandeling aangeeft met een visueel en geluidssignaal, alvorens automatisch uit te schakelen.



Geruisloos

Een kleine, draagbare en discrete vernevelaar die overal gebruikt kan worden.



Ingebouwde batterij met lange levensduur


De oplaadbare batterij biedt tot ruim 30 behandelingen tussen elke laadbeurt.



Eenvoudig - slechts twee onderdelen

Het makkelijk afneembare mondstuk maakt de InnoSpire Go eenvoudig in gebruik, schoonmaak en onderhoud.***

Meer
informatie:
www.philips.be/astma
www.philips.nl/astma

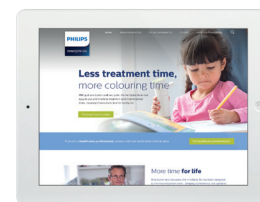

← Daadwerkelijke grootte →

* Versus voorgaand model, Aeroneb Go.

** Met gebruik van 2,5 ml salbutamol

*** Een kindermasker is beschikbaar indien u het moeilijk vindt om het mondstuk te gebruiken.