


SideStream-sumuttimet


Uudelleen- käytettävä

Vaihda kuuden (6) kuukauden käytön jälkeen.

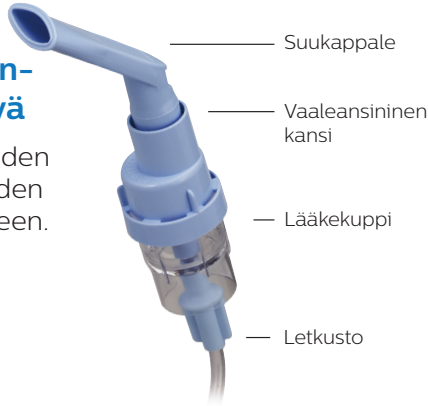


Kertakäyt- töinen

Vaihda kahden (2) viikon käytön jälkeen.

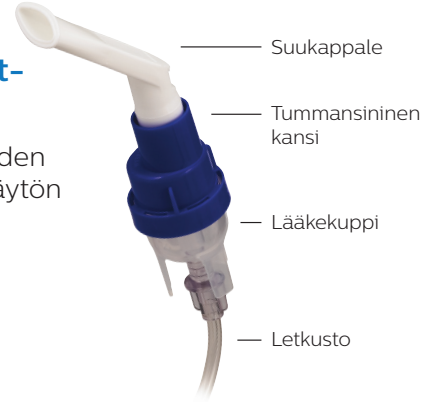


Lue käyttöohjevihkonen ennen SideStreamin ensimmäistä käyttökertaa.


SideStream-sumuttimen käyttäminen

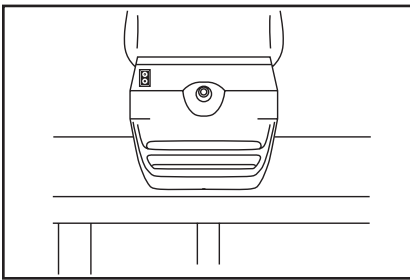


1. Aseta kompressori tukevalle alustalle.

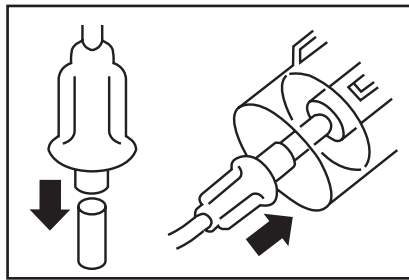


2. Kytke letku kompressoriin ja lääkekuppiin.

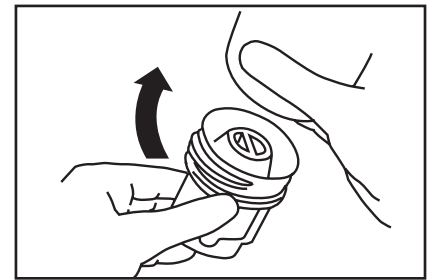


3. Kierrä kansi auki.

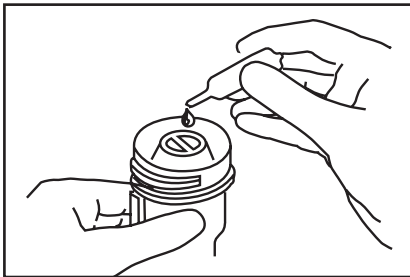


4. Täytä lääkekuppi.

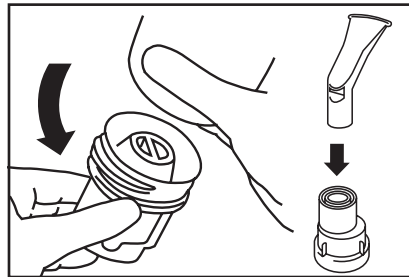


5. Aseta kansi paikalleen. Liitä suukappale.

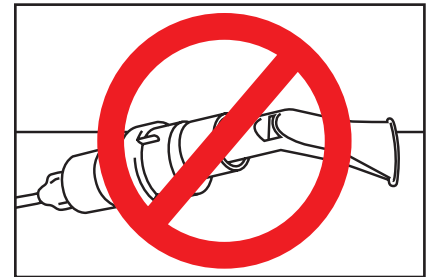


6. Älä kallista SideStreamia.

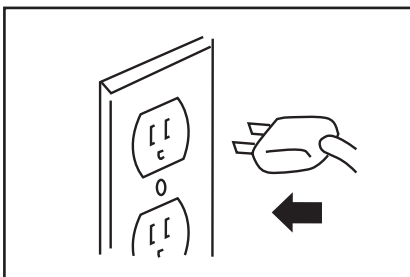

7. Kytke kompressori pistorasiaan.

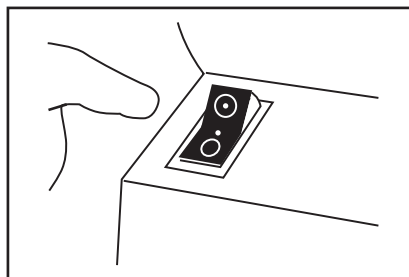

8. Käännä kytkin päälle.

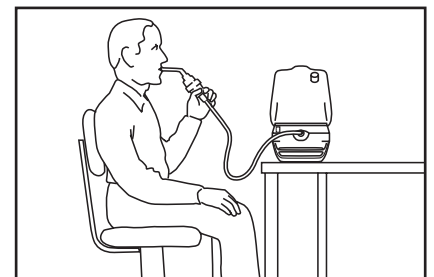


9. Istu pystyasennossa, rentoudu ja hengitä hitaasti sisään ja ulos.


PHILIPS

RESPIRONICS


Jos tarvitset aikuisten tai lasten SideStream-maskin...

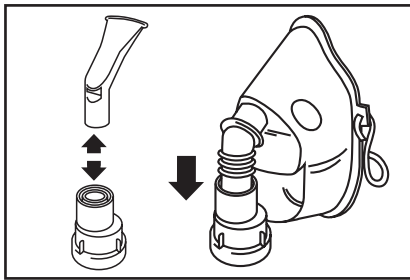

1. Vaihda suukappaleen tilalle maskin sovitin ja maski.

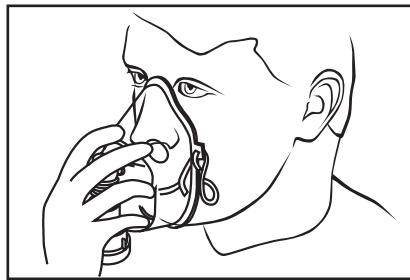


2. Aseta maski nenän ja suun päälle.

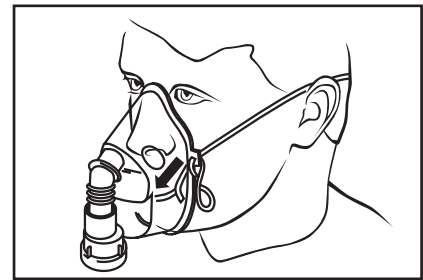


3. Vedä hihna pään yli ja säädä.

Puhdistusohjeet


Jokaisen käyttökerran jälkeen (sekä uudelleenkäytettävä että kertakäyttöinen SideStream)...

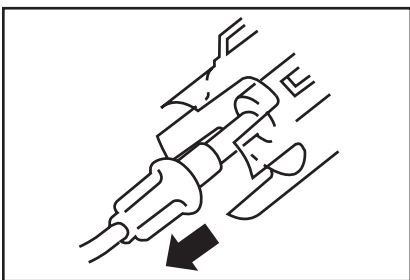

1. Irrota sumutin letkusta.

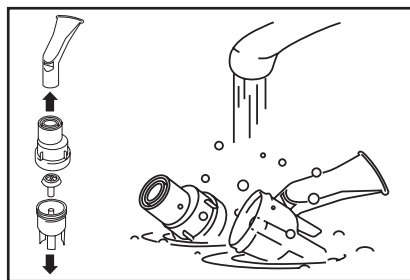


2. Pura kaikki osat ja pese ne lämpimässä saippuvedessä (lukuun ottamatta letkua).

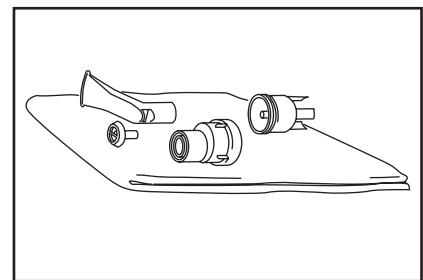


3. Huuhtelee puhtaalla vedellä ja anna kuivua.


Kerran viikossa (vain uudelleenkäytettävä SideStream)...

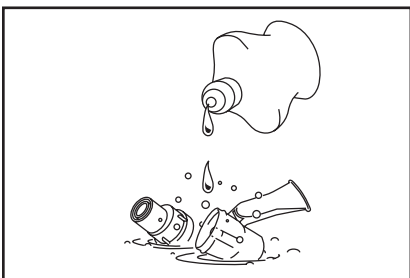

1. Aseta osat (lukuun ottamatta letkua) veteen, jossa on 2–3 tippaa astianpesuainetta.

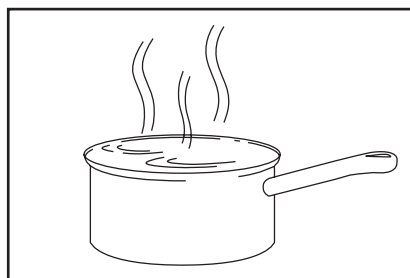

2. Keitä 10 minuutin ajan.

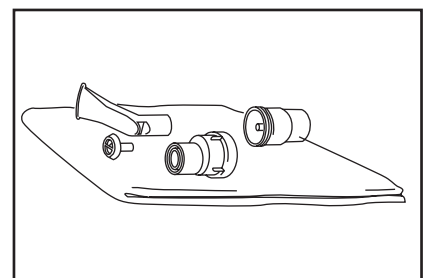

3. Huuhtelee puhtaalla vedellä 2 minuutin ajan ja anna kuivua.

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään. Philips Healthcare varaa oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin ja/tai lopettaa jonkin tuotteen valmistuksen milloin tahansa ilman mitään velvoitetta ja siitä erikseen ilmoittamatta eikä ole vastuussa mistään tämän julkaisun käytöstä johtuvista seurauksista.



Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 Yhdysvallat

www.philips.com/respironics
Luz edoc TK 3/14/16 MCI 4107386