

**PHILIPS**

Healthcare



## シンプリーゴー ミニの使い方

※本書は取扱説明書にかわるものではありません。  
必ず正式な取扱説明書をご覧ください。

**⚠ 火気からは2m以上離れてご使用ください。**

酸素自体が爆発したり、燃えたりはしませんが、燃えているものをさらに燃えやすくする性質があります。

**酸素吸入しながらたばこを吸うことは、健康面からも絶対にやめましょう。カニューレに引火することもあり、大変危険です。**

シンプリーゴー ミニの使い方を動画でご覧いただけます。

<https://youtu.be/XOC4uWRjXFg>

スマートフォン・タブレットから、右のQRコードで動画にアクセスできます。



# 1 各部の名称

前面

背面

患者  
カニューレ  
コネクタ

充電式バッテリー

電源差込口

(AC電源、DC電源)

コントロールパネル



ホームボタン  
ホーム画面に  
アクセスします。

電源ボタン

装置のオンと  
オフを切り替  
えます。

ディスプレー  
画面

付属品



ショルダー付き  
キャリーバッグ



アクセサリ  
バッグ



AC電源アダプタ  
AC電源コード



DC電源  
アダプタ

## ② カニューレの使い方

### カニューレの接続



ご使用前にカニューレを患者カニューレコネクタに接続してください。

酸素フローが妨げられることのないよう、カニューレが挟まれたりねじれたりしていないことを確認してください。





### カニューレの装着

カニューレの方向を確認し、鼻孔に装着します。

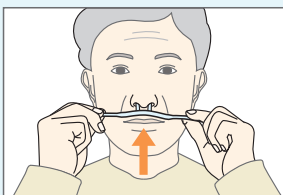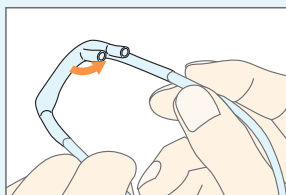

左右の耳にカニューレをかけ、ストッパーを上げます。

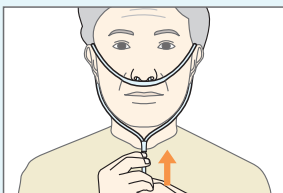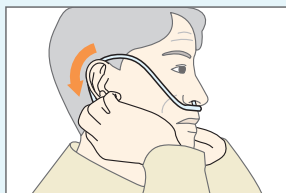

**注記：使用できるチューブの長さは最長3mです。**

**注記：カニューレは弊社指定の製品<sup>※</sup>をご使用ください。**

※アトム酸素鼻孔カニューラ OX-28（スタンダードコネクタータイプ）


医療機器承認番号：21900BZX00686000

製造販売業者：アトムメディカル株式会社

### 3 電源のオン／オフ

#### 電源のオン

電源ボタン⏻を1回押して5秒以内にもう一度押します。  
下記のような画面が表示された後ホーム画面が表示されます。

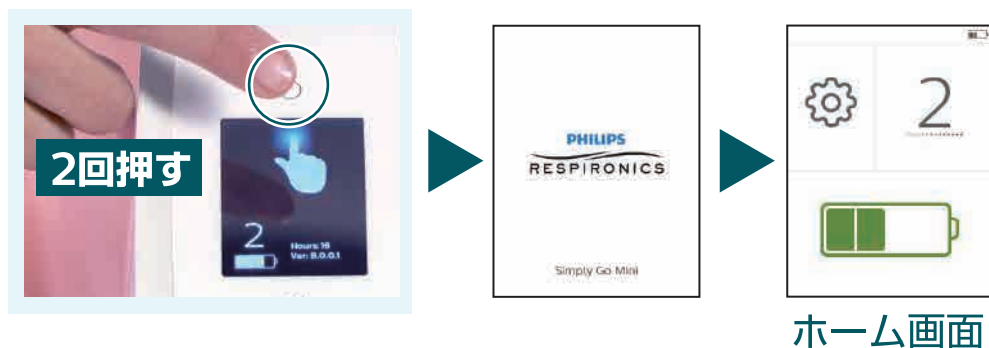

#### 電源のオフ


電源ボタン⏻を1回押します。  
右のような確認画面が表示されます。  
電源ボタンをもう1度押すと、オフになります。

**注記：**もう一度押さないと、  
ホーム画面に戻ります。



## 4 設定の表示と変更

ホーム画面には以下の項目が表示されます。

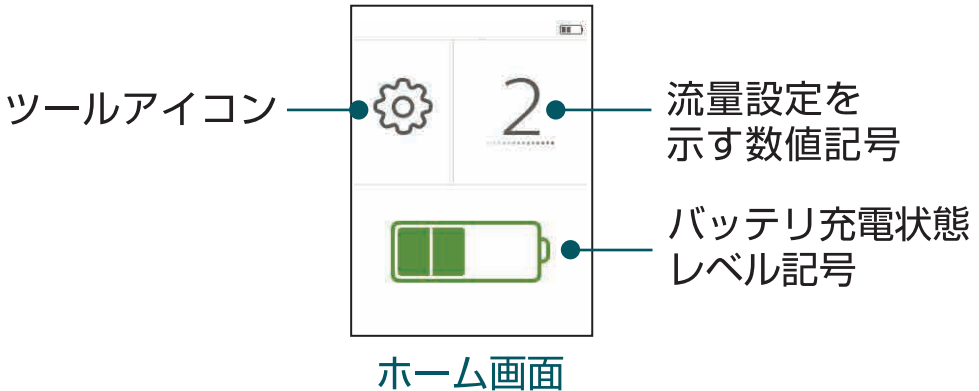

以下の記号がホーム画面に表示されます。


| 記 号                                                                                 | 説 明                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    | <b>ツールアイコン</b><br>ツールメニューにアクセスできます。                          |
|  | <b>パルス記号</b><br>設定値の下に点線が表示され、呼吸の検出と酸素パルスの供給を示します。           |
|  | <b>ウォームアップ記号</b><br>システムが安定するまで表示されます（通常15分程度）酸素は通常通り供給されます。 |
|  | <b>充電状態レベル</b><br>バッテリーに残っている充電量を示します。                       |

## 流量設定の変更

番号に触れて、設定画面にアクセスします。

 または  ボタンを押して、設定を**1～5**まで1つずつ調節してください。

**医師に指示された処方流量を守って設定してください。**

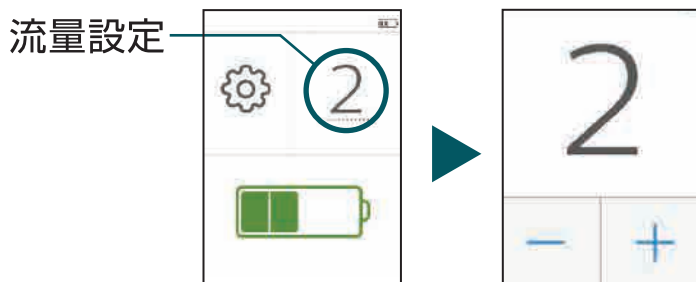

参考) 流量設定換算表


| 設 定     | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| LPM 換 算 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 2.6 | 3.0 |

\*呼吸数**20**回～**40**回の場合

\*I:E = 1:2で算出

## バッテリー容量の確認

バッテリー記号に触れて、以下のバッテリー情報画面にアクセスしてください。

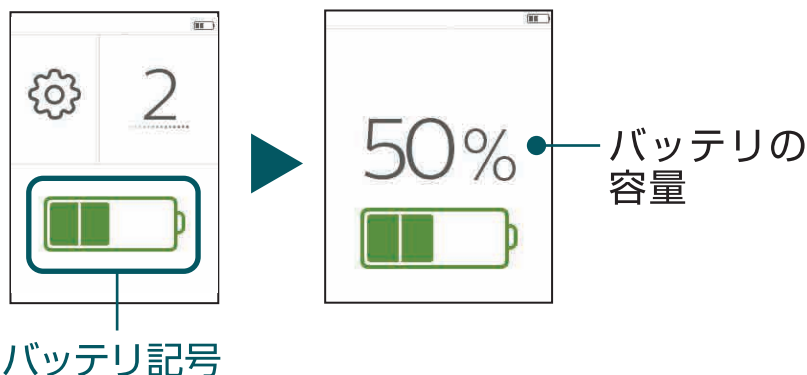

## 5 ご利用の前に

シンプリーゴー ミニは必ず標準バッテリーまたは拡張バッテリー(オプション)を装着してご使用ください。



標準バッテリー



拡張バッテリー(オプション)

### 参考) バッテリー駆動時間

| 設 定     | 1     | 2            | 3    | 4            | 5    |
|---------|-------|--------------|------|--------------|------|
| 標準バッテリー | 6 時間  | 4 時間<br>30 分 | 3 時間 | 2 時間<br>15 分 | 2 時間 |
| 拡張バッテリー | 12 時間 | 9 時間         | 6 時間 | 4 時間<br>30 分 | 4 時間 |

※バッテリーの駆動時間は、バッテリーの使用年数、環境動作条件、使用量に伴って減少します。  
上記は参考値としてご覧ください。

## バッテリーの装着

本装置の電源がオフになっていることを確認してバッテリーを本装置の下部に挿入してください。



## バッテリーの取り外し

バッテリー中央にあるイジェクトボタンを押して取り外してください。



**注意：バッテリーは電源がオフのときのみ取り外し、装置作動時は絶対に取り外さないでください。**

本装置を初めて使用する際は、事前にバッテリーを一定時間連続して初期充電してください。

| バッテリー   | 最低充電時間    |
|---------|-----------|
| 標準バッテリー | 最低 3.5 時間 |
| 拡張バッテリー | 最低 7 時間   |




## バッテリーの充電

AC電源アダプタの出力ケーブルを電源入力コネクタに接続し、電源コードおよび装置上の緑色のマークを位置を合わせて接続してください。①

AC電源コードのプラグをACコンセントに接続します。充電が完了したら、AC電源アダプタを取り外してください。②

緑色のマークの位置を合わせて接続

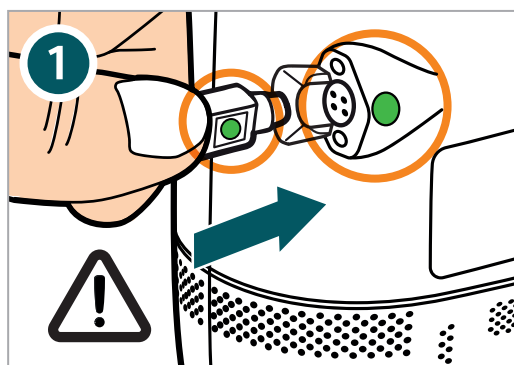

**注記：**装置をAC電源に接続するとすぐに、AC電源アダプタが緑色に点灯します。

**注意：**車(DC電源)で充電する場合、流量設定が4または5ではバッテリーを充電できない場合があります。

充電できているかは、ホーム画面のバッテリー記号 を確認してください。



DC電源

## ⑥ お手入れ

### 本体、標準バッテリー又は拡張バッテリー

電源から外した後、家庭用中性洗剤を浸した湿った布で外面を拭き、水気を拭き取ってください。バッテリーが取り外されている場合は、乾いた布でバッテリーを拭いてください。






### AC／DC電源アダプタおよびコード

電源から外した後、家庭用中性洗剤を浸した湿った布でコードを拭き、水気を拭き取ってください。

### カニューレ

鼻に直接装着する部分は特に汚れがたまりやすい為、こまめに洗ってください。

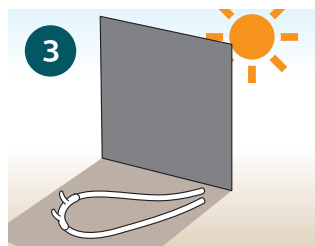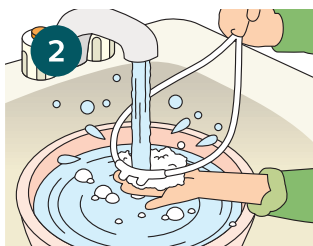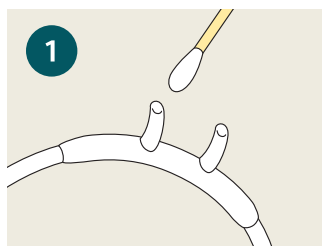





## 注記：


この画面は酸素を濃縮するための部品（シーブベッド）の定期点検を促すお知らせとして表示されることがあります。

**この画面は警告ではありません。**  
使用環境や使用年数によって表示される場合があります。  
この画面が**何度も表示される場合**は、弊社または機器供給会社までご連絡ください。



## 7 アラーム発生時の対処法（1）
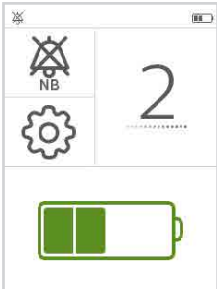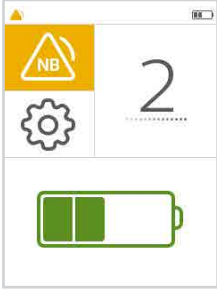
| 画面表示、音声、案内                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 説明と対処法                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ビーブ音（1回）<br/>16秒ごとに<br/>繰り返します</p>    | <h3>呼吸未検出アラーム</h3> <p>呼吸を2分以上検知できない場合に鳴ります。</p> <p>呼吸を15分以上検知できない場合は自動的にシャットダウンします。</p> <h3>対処法</h3> <p>次の3つを確認してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① カニユーレと装置が適切に接続されているか</li> <li>② カニユーレが顔の正しい位置に装着されているか</li> <li>③ カニユーレが折れたり詰まっていないか</li> </ol> |


## 7 アラーム発生時の対処法（2）
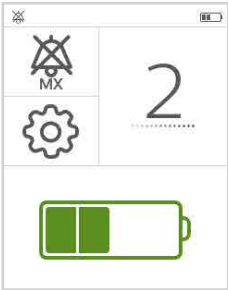
| 画面表示、音声、案内                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 説明と対処法                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ビープ音（1回）<br/>16 秒ごとに<br/>繰り返します</p>    | <h3>呼吸回数上限アラーム</h3> <p>呼吸回数が、装置の最大パルスレートを超えた場合に鳴ります。<br/>※このアラームが鳴っても装置は適切に作動します。</p> <h3>対処法</h3> <p>呼吸数が減少すると自動で消えます。<br/>ゆっくり呼吸するか、30 秒間カニューレを外してください。</p> |


## 7 アラーム発生時の対処法（3）
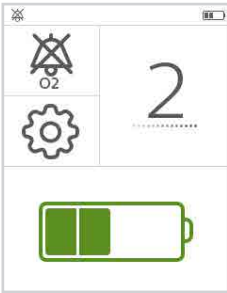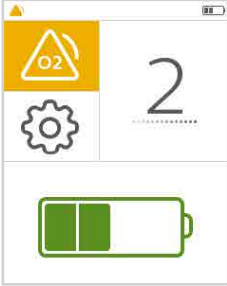
| 画面表示、音声、案内                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 説明と対処法                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ビープ音（1回）<br/>16 秒ごとに<br/>繰り返します</p>    | <h3>O2 濃度下限アラーム</h3> <p>供給する酸素濃度が規定値より低くなっている場合に鳴ります。</p> <h3>対処法</h3> <p>他の酸素供給源に交換して<br/>フィリップス・ジャパン<br/>までご連絡ください。</p> |

## 7 アラーム発生時の対処法（4）


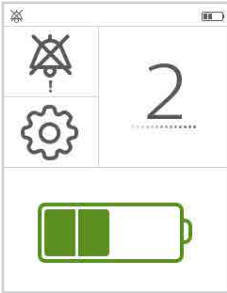
| 画面表示、音声、案内                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 説明と対処法                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ビープ音（1回）<br/>16 秒ごとに<br/>繰り返します</p>    | <h3>システムアラーム</h3> <p>装置に不具合が発生して適切に作動しなくなった場合に鳴ります。</p> <h3>対処法</h3> <p>他の酸素供給源に交換して<br/>フィリップス・ジャパン<br/>までご連絡ください。</p> |

## 7 アラーム発生時の対処法（5）
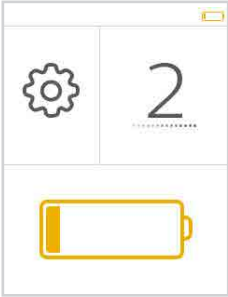
| 画面表示、音声、案内                                                                                                                                                                                                                               | 説明と対処法                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="122 375 338 480">ビープ音（1 回）<br/>16 秒ごとに<br/>繰り返します</p>   | <h3 data-bbox="438 386 906 431">バッテリー残量低下アラーム</h3> <p data-bbox="438 451 1036 557">バッテリーの稼働時間が残り約 10 分になった場合に鳴ります。</p> <h3 data-bbox="438 638 553 683">対処法</h3> <p data-bbox="438 703 973 808">バッテリーを交換するか、電源に接続してください。</p> |




## 7 アラーム発生時の対処法（6）
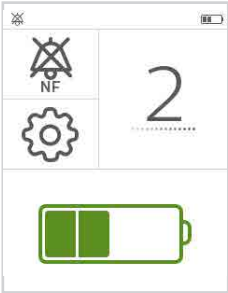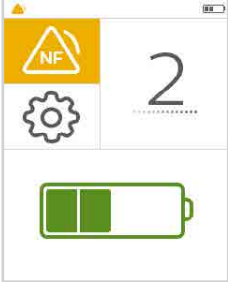
| 画面表示、音声、案内                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 説明と対処法                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ビープ音（1回）<br/>16 秒ごとに<br/>繰り返します</p>    | <h3>フローなしアラーム</h3> <p>カニューレに酸素フローがない場合に鳴ります。</p> <h3>対処法</h3> <p>カニューレにねじれや詰まりが無いか確認してください。</p> |

## 7 アラーム発生時の対処法（7）

| 画面表示、音声、案内                                                                                                                                                                                                                              | 説明と対処法                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="122 375 338 480">ビープ音（1回）<br/>16 秒ごとに<br/>繰り返します</p>   | <p data-bbox="436 388 883 431"><b>外部電源不具合アラーム</b></p> <p data-bbox="436 451 1033 618">外部電源に不具合があり、バッテリーが接続されていない場合に鳴ります。</p> <p data-bbox="436 699 556 743"><b>対処法</b></p> <p data-bbox="436 763 1033 868">電源を交換するか、装置にバッテリーに接続してください。</p> |

## 7 アラーム発生時の対処法（8）
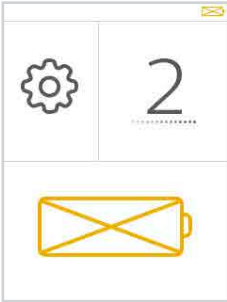
| 画面表示、音声、案内                                                                                                                                                                                                                               | 説明と対処法                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="122 375 338 480">ビープ音（1 回）<br/>16 秒ごとに<br/>繰り返します</p>   | <h3 data-bbox="436 386 827 428">バッテリー切れアラーム</h3> <p data-bbox="436 451 1036 557">バッテリーの稼働時間が残り約 2 分になった場合に鳴ります。</p> <h3 data-bbox="436 638 553 680">対処法</h3> <p data-bbox="436 703 985 808">バッテリーを交換するか、電源に接続してください。</p> |

## 7 アラーム発生時の対処法（9）

| 画面表示、音声、案内                                                                        | 説明と対処法                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>この画面は酸素を濃縮するための部品（シーブベッド）の定期点検を促すお知らせとして表示されることがあります。</p> <p><b>この画面は警告ではありません。</b><br/>使用環境や使用年数によって表示される場合があります。</p> <p>この画面が<b>何度も表示される場合</b>は、弊社または機器供給会社までご連絡ください。</p> |

| 問題                        | 考えられる原因                                  | 対応方法                                                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 装置がオンにならない                | バッテリーが切れている。                             | ACまたはDC電源コードを使用して装置を作動させ(バッテリーを挿入した状態で)、バッテリーの再充電を行ってください。問題が解決しない場合、弊社または機器供給会社に連絡してください。 |
|                           | バッテリーが正しく装着されていない。                       | バッテリーを取り外して、正しく装着し直してください。                                                                 |
|                           | 電源ボタンが2回押されていない。                         | 電源ボタンを2回押してください。                                                                           |
| 装置が酸素供給を開始しない             | 電源がオンになっていない。                            | 電源ボタンを2回押してください。                                                                           |
|                           | カニューレチューブが曲がっている、またはねじれている。              | チューブが酸素アウトレットポートに適切に接続されており、何も詰まっていないことを確認してください。                                          |
|                           | 装置の誤作動。                                  | 弊社または機器供給会社に連絡してください。                                                                      |
| 酸素の濃度が低い                  | 装置がウォームアップ中である。                          | 装置の使用を継続し、装置が指定の濃度の酸素を供給するまで、20分間お待ちください。この状態が続く場合、弊社または機器供給会社に連絡してください。                   |
| アラームが鳴る                   | 装置の確認が必要。                                | 個々のアラームとその対応策については取扱説明書「アラーム表示と画面記号」セクションを参照してください。                                        |
| 黄色のバッテリー状態インジケータが画面に表示される | バッテリーが充電／放電の推奨サイクル数を超えているか、満充電容量が低下している。 | 弊社または機器供給会社に連絡して交換用バッテリーを注文してください。                                                         |
| 黄色のシープ状態インジケータが画面に表示される   | 装置の性能が低下しているか、バッテリー充電能力が低下していることが示されている。 | 弊社または機器供給会社にお問い合わせください。                                                                    |



### 注記：

この画面は酸素を濃縮するための部品（シーブベッド）の定期点検を促すお知らせとして表示されることがあります。

**この画面は警告ではありません。**  
使用環境や使用年数によって表示される場合があります。  
この画面が**何度も表示される場合**は、弊社または機器供給会社までご連絡ください。

# MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# お問合せ

備品の購入や機器のトラブルなど、お問合せは以下にご連絡ください。お問合せの際は、お名前・ご利用の機器名・かかりつけ医療機関名・取扱業者名などを必ずお伝えください。

## 機器のトラブルは24時間対応、安心の技術サポート

平日9:00~17:30 地域営業所・出張所・駐在

全国営業所情報 <http://www.philips.co.jp/SRC-Office>



### 夜間・土休日受付

営業所・出張所・駐在の  
対応日・対応時間外 受付

機器安全センター  
0120-633-881

かかりつけ医療機関名

製造販売業者 **株式会社フィリップス・ジャパン**

〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号 フィリップスビル  
[www.philips.co.jp/healthcare](http://www.philips.co.jp/healthcare)

睡眠・呼吸製品のお問い合わせは地域の営業所・出張所・駐在まで  
※営業所・出張所・駐在の連絡先は以下のURLで公開しています  
[www.philips.co.jp/SRC-Office](http://www.philips.co.jp/SRC-Office)



改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくはお近くの営業所までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

