

# So einfach wie Zähneputzen

## 1. Vorbereiten

Öffnen Sie einfach die grüne Abdeckung und geben Sie das Medikament hinein. Schließen Sie die Abdeckung wieder und setzen Sie sich aufrecht hin, um mit der Behandlung zu beginnen.



## 2. Anwenden

Drücken Sie auf die Einschalttaste und atmen Sie durch das Mundstück ein und wieder aus.\*\* Der InnoSpire Go gibt hörbare und sichtbare Signale aus, wenn die Behandlung abgeschlossen ist – und schaltet sich anschließend selbst aus.



## 3. Reinigen

Nehmen Sie das Mundstück nach jeder Behandlung ab und spülen Sie es mit warmem Wasser. Reinigen Sie es jeden Abend in warmem Seifenwasser und desinfizieren Sie es einmal wöchentlich in kochendem Wasser.



Mehr Informationen

[www.philips.de/innospire-go](http://www.philips.de/innospire-go)



\* Bei Verwendung von 2,5 ml Salbutamol.  
\*\* Wenn Sie Schwierigkeiten im Umgang mit dem Mundstück haben, sind auch Masken erhältlich.



© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.  
Technische Änderungen sind vorbehalten.  
Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) oder ihrer jeweiligen Inhaber.

Version 01.1  
Juni 2017  
XX XX/XX/XXXX PN483917  
[www.philips.de/innospire-go](http://www.philips.de/innospire-go)

**PHILIPS**

*InnoSpire Go*

Tragbarer  
Mesh-Vernebler

# Einfach mehr Freiheit atmen

# Für mehr unbeschwerte Momente

Durch sein geringes Gewicht, die leichte Handhabung und hohe Ausdauer bei schneller Wirkung ist der InnoSpire Go der ideale Alltagsbegleiter für Ihre Aerosoltherapie. Er fügt sich diskret in Ihr Leben ein und schenkt Ihnen mehr Freiheit für die wertvollen Momente, z.B. zu Hause mit Ihrer Familie oder unterwegs auf Reisen.



## Diskrete Therapie, jederzeit griffbereit



### Behandlung in 4 Minuten\*

Der InnoSpire Go ermöglicht eine wirksame Therapie. Bei Abschluss der Behandlung gibt er hörbare und sichtbare Signale aus - und schaltet sich anschließend selbst ab.



### Nahezu geräuschlos

Ein kleiner, tragbarer und unauffälliger Vernebler, der überall verwendet werden kann.



### Integrierter langlebiger Akku

Mit dem wiederaufladbaren Akku sind bis zu 30 Behandlungen möglich, bevor dieser aufgeladen werden muss.



### Einfacher Aufbau – nur zwei Einzelteile

Dank des aufsetzbaren Mundstücks lässt sich der InnoSpire Go einfach verwenden, reinigen und pflegen.\*\*

Mehr Informationen  
[www.philips.de/innospire-go](http://www.philips.de/innospire-go)



← Tatsächliche Größe →

\* Bei Verwendung von 2,5 ml Salbutamol.

\*\* Wenn Sie Schwierigkeiten im Umgang mit dem Mundstück haben, sind auch Masken erhältlich.