

6 A transzducerek tárolása és szállítása

A transzducerek szállítási, napi és hosszú időtartamú tárolásához használja a megfelelő útmutatókat.

Transzducerek szállítása

A használt transzducereket cseppmentes, zárt tartályban kell szállítani, a szennyeződésre figyelmeztető címkével ellátva. A lencsék esetleges sérülésének elkerülése érdekében figyeljen oda, hogy a tartályban a transzducer rögzített állapotban legyen. A szállítás során gondoskodni kell arról, hogy a beteggel érintkező részek ne érintkezzenek olyan részekkel, amelyek nem érintkeznek a beteggel.

Abban az esetben, ha megtisztított és fertőtlenített transzducerek szállítására kerül sor, a szállításhoz használt tartályokat szintén meg kell tisztítani és fertőtleníteni mielőtt a transzducereket a tartályokba helyeznék.

További információkért lásd a következő részt: [„Tárolás szállítás során”, 117. oldal.](#)

Tárolás szállítás során



VIGYÁZAT!

A transzducerek tárolása előtt ellenőrizze, hogy teljesen szárazak-e. Ha a transzducer lencséjét (akusztikus ablakát) meg kell szárítani a tisztítás után, akkor puha, száraz, szálmentes ruhadarabbal finom, felitató mozdulatokkal törölje át vagy itassa fel a nedvességet. Az erőteljes törlés vagy dörzsölés károsíthatja a lencsét.

Ha a transzducerhez tartozik hordtáska, akkor a transzducer szállításához minden esetben ezt használja. A transzducerek szállításkor az alábbi irányelvek szerint tárolhatók megfelelően:

- A hordtáskába való behelyezéshez – elkerülendő a hordtáska bélésének szennyeződését – a transzducer feltétlenül legyen tiszta és fertőtlenített.
- A kábel becsípődését elkerülendő, a transzducert megfelelően helyezze el a táskában.
- A fedél lezárása előtt ellenőrizze, hogy a transzducer valamelyik része nem nyúlik-e ki a táskából.
- A táskát göngyölje buborékfóliába, és az így becsomagolt táskát lássa el kartoncsomagolással.
- A TEE-transzducerek szárának vagy vezérlő mechanizmusának sérüléseit elkerülendő, a transzducer szárát legfeljebb 30 cm-es átmérőjű körív mentén görbítse meg.

Napi és hosszú távú tárolás

A transzducer védelme érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

- Az épp nem használt transzducert mindig transzducertartóban tárolja, a rendszer oldalára vagy biztonságosan rögzített fali tartóra függesztve.
- Győződjön meg arról, hogy a transzducertartók átestek tisztításon a transzducerek tárolása előtt (lásd: „[A rendszer tisztítása és karbantartása](#)”).
- A transzducerek tárolásánál ha van, a kábelt kábelvezető kapsokkal biztosítsa.
- A transzducert szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak vagy közvetlen napfénynek kitett helyen ne tárolja.
- A transzducert a véletlen sérülés megelőzése érdekében más műszerektől külön tárolja.
- A vizsgálófejek tárolása előtt ellenőrizze, hogy teljesen szárazak-e.
- A TEE vizsgálófejek tárolásához a distalis hegynek egyenesnek és védettnek kell lennie.
- A TEE-transzducerek kizárólag szállításkor lehetnek hordtáskában.

www.philips.com/healthcare



Philips Ultrasound, Inc.
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431
USA



Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6
5684 PC Best
The Netherlands

CE 2797



© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Minden jog fenntartva. Tilos a dokumentumot vagy annak részét bármilyen formában, elektromos, mechanikai vagy egyéb úton lemásolni, vagy továbbadni a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásos engedélye nélkül.

Közzétett: Az Egyesült Államokban
4535 621 08501_B /795 * AUG. 2021 - hu-HU