

**PREVIDNO**

Ne nameščajte gela sonde, dokler niste pripravljeni na izvedbo postopka. Ne pustite sonde, da se namaka v gelu.

**PREVIDNO**

Geli, navedeni tukaj, so priporočeni zaradi svoje kemijske združljivosti z materiali, iz katerih je izdelek.

Priporočeni geli so med drugim:

- Aquasonic 100
- Aquasonic Clear
- Carbogel-ULT
- EcoVue
- Scan
- Ultra Phonic

Za dodatne informacije o združljivosti pokličite Philips na telefonsko številko 800-722-9377 (za Severno Ameriko) ali lokalnega predstavnika družbe Philips (izven Severne Amerike).

6 Shranjevanje in prevažanje sond

Upoštevajte ustrezne smernice za shranjevanje sond za prenašanje ter vsakodnevno in dolgoročno shranjevanje.

Prevažanje sond

Uporabljene sonde prevažajte v zaprtih vsebnikih, ki preprečujejo politje, z ustreznim označevanjem glede kontaminacije. Zagotovite, da vsebnik sondo zadrži na mestu, da se ne poškoduje leča. Med prevozom preprečite, da bi deli, ki pridejo v stik z bolnikom, prišli v stik z deli, ki ne pridejo v stik z bolnikom.

Pri prevažanju očiščenih in razkuženih sond zagotovite, da so vsi vsebniki, ki jih uporabljate za prevoz, tudi očiščeni in razkuženi, preden vanje položite čiste sonde.

Za več informacij glejte [»Shranjevanje za prevoz«](#) na strani 113.

Shranjevanje za prevoz



PREVIDNO

Pred shranjevanjem sond se prepričajte, da so povsem suhe. Če je lečo sonde (akustično okno) po čiščenju treba osušiti, uporabite mehko in suho krpo, ki ne pušča vlaken, in mokroto nežno popivnjajte z nje. Z agresivnim brisanjem ali drgnjenjem lahko lečo poškodujete.

Če je sondi priložen kovček za prenašanje, za prenašanje sonde z enega mesta na drugega vedno uporabljajte kovček za prenašanje. Za ustrezno shranjevanje sond med prevozom upoštevajte naslednje smernice:

- Sonda naj bo očiščena in razkužena, preden jo položite v kovček, da preprečite kontaminacijo obloge kovčka za prenašanje.
- Sondo previdno položite v kovček, da preprečite pregibanje kabla.
- Preden zaprete pokrov, se prepričajte, da iz kovčka ne štrlijo deli sonde.
- Kovček zavijte v plastičen material, ki vsebuje žepke zatesnjenega zraka (na primer folija z zračnimi mehurčki), in zaviti kovček zapakirajte v kartonasto škatlo.
- Če želite preprečiti poškodbe gredi ali mehanizma za krmiljenje sond TEE, gibljive gredi sonde ne upogibajte ali navijajte v krog s premerom, manjšim od 0,3 m (1 čevelj).

Vsakodnevno in dolgoročno shranjevanje

Za zaščito sonde upoštevajte naslednje smernice:

- Ko sond ne uporabljate, jih hranite na enem od držal za sonde na boku sistema ali na trdno pritrjenem stojalu na steni.
- Pred shranjevanjem sond se prepričajte, da so držala za sonde čista (glejte poglavje [»Čiščenje in vzdrževanje sistema«](#)).
- Pri shranjevanju sond uporabite sponke za upravljanje kablov, če so na voljo, da pritrdite kabel sonde.
- Sond ne shranjujte pri zelo visokih oz. zelo nizkih temperaturah ali na neposredni sočni svetlobi.
- Sonde shranjujte ločeno od drugih instrumentov, da preprečite škodo na sondah.
- Pred shranjevanjem sond se prepričajte, da so povsem suhe.
- Pred shranjevanjem sond TEE se prepričajte, da je distalna konica ravna in zaščitena.
- Sonde TEE nikoli ne shranjujte v kovčku za prenašanje, razen za namene prevoza.

www.philips.com/healthcare



Philips Ultrasound, Inc.
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431
USA



Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6
5684 PC Best
The Netherlands

CE 2797



© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Vse pravice pridržane. Reprodukcija ali posredovanje po delih ali v celoti, v elektronski, mehanski ali drugi obliki ali na elektronski, mehanski ali drug način, je brez predhodnega pisnega privoljenja nosilca avtorskih pravic prepovedano.

Objavljeno v ZDA
4535 621 08661_B /795 * AVG 2021 - sl-SI