

Để biết thêm về khả năng tương thích, vui lòng liên hệ với Philips theo số 800-722-9377 (nếu bạn ở Bắc Mỹ) hoặc đại diện của Philips tại địa phương bạn (nếu bạn ở ngoài Bắc Mỹ).

6 Bảo quản và vận chuyển đầu dò

Sử dụng các hướng dẫn hợp lý để bảo quản đầu dò phục vụ vận chuyển và bảo quản hàng ngày và lâu dài.

Vận chuyển đầu dò

Vận chuyển đầu dò đã sử dụng trong hộp chứa kín, chống tràn có gắn nhãn bần thích hợp. Để tránh làm hỏng ống kính, hãy đảm bảo rằng hộp chứa giữ cố định đầu dò. Trong khi vận chuyển, tránh để mọi bộ phận tiếp xúc với bệnh nhân tiếp xúc với bộ phận không tiếp xúc với bệnh nhân.

Khi bạn vận chuyển đầu dò đã làm sạch và khử trùng, hãy đảm bảo rằng mọi hộp chứa dùng để vận chuyển cũng được làm sạch và khử trùng trước khi đặt đầu dò sạch vào hộp chứa.

Để biết thêm thông tin, hãy xem [“Bảo quản để vận chuyển” trên trang 113](#).

Bảo quản để vận chuyển



CẨN THẬN

Trước khi bảo quản đầu dò, hãy đảm bảo rằng đầu dò đã khô hoàn toàn. Nếu cần lau khô ống kính của đầu dò (cửa sổ siêu âm) sau khi làm sạch, hãy dùng vải mềm, khô, không xơ vải và thấm nhẹ nhàng. Lau hoặc chà mạnh có thể làm hư hại thấu kính.

Nếu đầu dò của bạn đi kèm với hộp đựng, hãy luôn sử dụng hộp đựng để di chuyển đầu dò từ vị trí này đến vị trí khác. Tuân theo các hướng dẫn sau để bảo quản đầu dò đúng cách khi vận chuyển.

- Đảm bảo rằng đầu dò được làm sạch và khử trùng trước khi đặt vào hộp để tránh làm nhiễm bẩn lớp lót hộp đựng.

- Cẩn thận đặt đầu dò vào trong hộp đựng để tránh làm xoắn dây cáp.
- Trước khi đóng nắp, hãy đảm bảo rằng không phần nào của đầu dò nhô ra ngoài hộp.
- Gói hộp bằng vật liệu nhựa chứa các túi khí bít kín (như vật liệu xốp hơi chẳng hạn), và cho hộp đã được gói này vào trong thùng các-tông cứng.
- Để tránh làm hư hại trực hoặc cơ cấu điều khiển của đầu dò dùng trong siêu âm tim qua thực quản, không được uốn hoặc cuộn trực linh hoạt của đầu dò trong vòng tròn có đường kính nhỏ hơn 0,3 m (1 foot).

Bảo quản hàng ngày và lâu dài

Tuân theo các hướng dẫn sau để bảo vệ đầu dò của bạn:

- Khi không sử dụng đầu dò, bạn luôn phải để đầu dò ở trên giá giữ đầu dò bên cạnh hệ thống của bạn hoặc trên kệ được gắn chắc vào tường.
- Đảm bảo các giá giữ đầu dò luôn sạch sẽ trước khi bảo quản đầu dò (xem phần [“Bảo dưỡng và làm sạch hệ thống”](#)).
- Khi bảo quản đầu dò, dùng kẹp kiểm soát dây cáp, nếu có sẵn, để cố định dây cáp đầu dò.
- Tránh bảo quản đầu dò ở các nơi có nhiệt độ cao hoặc ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào.
- Bảo quản đầu dò tách biệt với các dụng cụ khác để tránh vô ý làm hư hại đầu dò.
- Trước khi bảo quản, hãy đảm bảo rằng đầu dò đã khô hoàn toàn.
- Với các đầu dò dùng trong siêu âm tim qua thực quản, đừng quên bảo vệ và để thẳng mũi dò trước khi bảo quản đầu dò.
- Trừ khi di chuyển, không bao giờ để đầu dò dùng trong siêu âm tim qua thực quản trong hộp đựng.

www.philips.com/healthcare



Philips Ultrasound, Inc.
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431
USA



Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6
5684 PC Best
The Netherlands

CE 2797



© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Mọi quyền được bảo lưu. Cấm tái bản hoặc truyền toàn bộ hoặc một phần, dưới mọi hình thức hoặc mọi cách, điện tử, cơ khí hay cách khác, khi chưa có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền.

Xuất bản tại Hoa Kỳ
4535 621 08711_B /795 * TH8 năm 2021 - vi-VN