

Procédure de nettoyage et de désinfection

systemes iGT



Note : Avant de nettoyer et de désinfecter le matériel, veuillez lire attentivement la section “Nettoyage et désinfection” du “Manuel d’utilisation” de l’équipement Philips afin de garantir la sécurité et l’opérabilité.

Procédure de nettoyage

Systèmes iGT

1. **Pour les surfaces en émail, en acier inoxydable et en aluminium :** essuyer uniquement avec un **chiffon doux humidifié à l’eau avec un détergent neutre**, puis procédez au séchage avec un chiffon doux sec. N’utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, de solvants, de détergents abrasifs ou de produits de polissage. Ne pas utiliser de produits de nettoyage dont la composition n’est pas connue.
2. **Pour les parties chromées :** essuyez avec un **chiffon doux** uniquement. Ne pas utiliser d’agents de polissage abrasifs.
3. **Sangles de maintien du patient**
Les sangles peuvent être nettoyées et stérilisées. Au besoin, suivez les instructions du fabricant pour laver et nettoyer les accessoires de mise en position et maintien du patient. Les sangles du patient peuvent être nettoyées en utilisant des méthodes de nettoyage conventionnelles à l’aide d’une **solution germicide standard ou d’un diluant**. Les sangles peuvent résister à des **températures jusqu’à 148.9 °C**.
Si besoin, elles peuvent être lavées à la machine après des chirurgies conventionnelles. L’autoclave peut être utilisé si la stérilisation est nécessaire.

Procédure de désinfection

Systèmes iGT

Les techniques de nettoyage et de désinfection de l’équipement et des salles d’examen doivent être conformes aux lois et à la réglementation en vigueur en France.

1. **Débranchez l’équipement (y compris les suspensions du moniteur) de leur source d’alimentation** avant toute intervention pour éliminer tout risque d’électrocution.
2. Toutes les pièces de l’équipement, y compris les accessoires et les câbles de connexion, peuvent être **désinfectés au moyen d’un chiffon doux imbibé de désinfectants**. Ne pas utiliser de désinfectants corrosifs ou à base de solvants. Ne pas utiliser de désinfectant dont la composition n’est pas connue.
3. **N’utilisez jamais de pulvérisations désinfectantes inflammables ou sujettes aux explosions**. Les pulvérisations peuvent causer un incendie, des blessures mortelles ou d’autres blessures graves et/ou des dommages à l’équipement.
4. **N’utilisez jamais de produits désinfectants inflammables ou susceptibles d’exploser**.
Les pulvérisations peuvent provoquer un incendie, des blessures corporelles graves/mortelles ou endommager l’équipement. Il n’est pas recommandé de désinfecter la salle d’équipement médical par pulvérisation, car la vapeur peut pénétrer dans l’équipement, causer un court-circuit ou de la corrosion. Lorsque vous utilisez des désinfectants par pulvérisation non inflammables ou non explosifs, **éteignez d’abord l’équipement** et attendez qu’il refroidisse. Cela peut empêcher efficacement la pénétration des aérosols de désinfectant dans l’équipement. L’équipement doit être entièrement recouvert d’une protection plastique avant de désinfecter la pièce à l’aide d’un spray désinfectant. Ne retirez pas la protection plastique tant que la vapeur de désinfectant ne s’est pas complètement dissipée. Désinfectez ensuite l’équipement en suivant la méthode recommandée. Si un vaporisateur a été utilisé, l’opérateur doit s’assurer que la vapeur de désinfectant s’est complètement dissipée avant d’utiliser l’équipement..

