

# Bonnes pratiques d'hygiene

## Ventilateurs de la gamme Hôpital

### Eliminer et remplacer le filtre antibactérien basse résistance

Nos dispositifs à turbine sont équipés d'un filtre anti-poussière pour filtrer l'air ambiant aspiré par la machine. Toutefois, un filtre antimicrobien est indispensable pour garantir la protection du patient. Ce filtre doit être installé :

- Pour les circuits monobranches (V60 et V680) : à l'embouchure du circuit monobranche (air venant de la machine, donc de l'air ambiant), et, pour les patients infectés, au niveau du port expiratoire, pour qu'ils ne contaminent pas l'air ambiant.
- Pour les circuits doubles branches (V680) : aux 2 embouchures du circuit double branche. Si besoin, le bloc expiratoire du ventilateur V680 peut être stérilisé.

### Warning



S'il existe un risque avéré, l'ensemble des pièces touchant le flux patient devront alors être remplacées.