

DreamMapper App Bluetooth Anleitung

Neues Bluetooth-Bedienkonzept



Zahlreiche Änderungen in den Betriebssystemen der großen Smartphone- und Tablet-Hersteller im Markt haben uns veranlasst ein neues Bluetooth-Bedienkonzept in DreamMapper zu integrieren. Während Nutzer bisher eine Kopplung über die Einstellungen des jeweiligen Betriebssystems auf dem Smartphone/Tablet vornahmen, empfehlen wir nun die Kopplungsfunktion in der DreamMapper App.

Wenn Sie die Bluetooth Verbindung neu einrichten, folgen Sie bitte immer den App-Menüoptionen [Einstellungen](#) >> [Therapiegerät](#) >> [Verwendung Bluetooth](#) >> [Bluetooth einrichten](#), um eine Verbindung zwischen App und Gerät herzustellen.

Bluetooth einrichten

1. Bereiten Sie Ihr Therapiegerät vor: Stellen Sie sicher, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen, Bluetooth aktiviert und das Gebläse ausgeschaltet ist.

2. Koppeln Sie Ihre Geräte: Berühren Sie die Taste unten, um die Kopplung zu starten. Befolgen Sie die Anweisungen auf den Bildschirmen Ihrer Geräte. Wählen Sie "PR BT BD74", wenn dieses Mobilfunkgerät Sie auffordert, eine Auswahl zu treffen.

Sie sind dabei, Ihr Gerät mit DreamMapper zu koppeln. Zu den Daten, die zur App hochgeladen werden, gehören:

- Dauer der Geräthenutzung
- Maskenleck-Messungen
- CPAP-Druck
- Frequenz Periodische Atmung

Die Daten werden von der App genutzt, um Sie über Ihre Compliance mit dem verschriebenen Schlaftherapieplan zu informieren. Sind Sie damit einverstanden?



Verwendung starten

Warum funktioniert die Bluetooth Kopplung nicht?

Wenn Sie Probleme bei der Herstellung einer Verbindung zwischen Ihrem Schlaftherapiegerät und der DreamMapper App auf Ihrem Smartphone/ Tablet haben, könnte es an einem der folgenden Punkte liegen:

1. Die Bluetooth Kopplung ist defekt bzw. es kann keine automatische Verbindung zwischen Gerät und Smartphone/Tablet hergestellt werden.

Setzen Sie in diesem Fall die Bluetooth Kopplung neu auf. Dafür muss sowohl im Schlaftherapiegerät (DreamStation: unter [Einstellungen >> Bluetooth >> Paarung löschen](#); DreamStation Go: unter [Mein Gerät >> Bluetooth >> Paarung löschen](#)) als auch im mobilen Endgerät die fehlerhafte Bluetooth Verbindung gelöscht werden. Das Schlaftherapiegerät muss dort aus dem Bluetooth Menü entfernt werden. Dieses sollte mit >>PR BT<< beginnen und darauf eine 4-stellige individuelle Kombination aus Buchstaben und Zahlen folgen, die für die letzten vier Ziffern der Seriennummer steht. Sie erkennen Ihr Schlaftherapiegerät also beispielsweise als >>PR BT D5CE<<. Folgen Sie daraufhin der obenstehenden Anleitung und setzen Sie die Bluetooth Verbindung über die Kopplungsfunktion in der DreamMapper App neu auf.

2. Das Betriebssystem meines Smartphone/Tablets ist nicht auf dem aktuellsten Stand.

Bitte schauen Sie auf Ihrem Smartphone/Tablet in den Einstellungen unter den Informationen zu Ihrem mobilen Endgerät nach, welche Android oder iOS Version installiert ist. Die Nutzung von DreamMapper erfordert iOS 9.0 oder neuer oder Android 5.0 oder höher.*

3. Die DreamMapper App ist nicht auf dem neuesten Stand.

Es empfiehlt sich die neueste Version der DreamMapper App zu nutzen. Aktuell ist dies die Version 2.15*. Da mehrfach im Jahr Aktualisierungen vorgenommen werden, empfiehlt es sich regelmäßig zu prüfen, ob ein Update möglich ist. Die Updates dienen der Verbesserung der App und sind somit nicht nur für die Bluetooth Verbindung relevant, sondern eine regelmäßige Aktualisierung insgesamt empfehlenswert.


4. Bluetooth ist auf dem mobilen Endgerät oder im Schlaftherapiegerät deaktiviert.

Um eine Kopplung zwischen Gerät und Smartphone/Tablet herstellen zu können, muss Bluetooth sowohl im Schlaftherapiegerät als auch auf Ihrem mobilen Endgerät aktiviert sein. Prüfen Sie im Menü der DreamMapper App unter [Einstellungen >> Therapiegerät >> Verwendung Bluetooth](#), ob Bluetooth aktiviert ist. Schauen Sie ebenfalls auf Ihrem mobilen Endgerät nach.


* Diese Angaben beziehen sich auf Werte im September 2018.




Wichtig: Um automatische Updates der Daten in DreamMapper zu gewährleisten, muss unter >>Einstellungen<< in der DreamMapper App >>Autom. Bluetooth-Übertragung<< aktiviert sein.

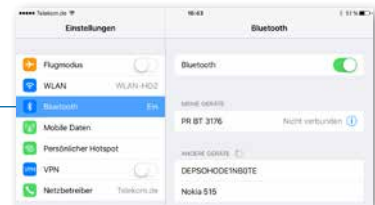

Beispiel: Bluetooth Einstellungen im Menü des iPhone/iPad

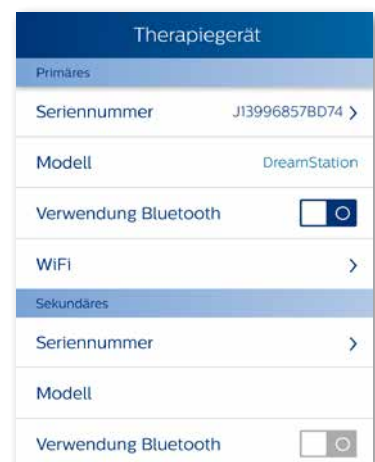

In Ihrem Therapiegerät können Sie unter [Einstellungen >> Bluetooth](#) (DreamStation) bzw. unter [Mein Gerät >> Bluetooth](#) (DreamStation Go) nachsehen, ob Bluetooth aktiviert ist. Sollte dort „Aus“ stehen, drücken Sie bei der DreamStation auf den runden Drehknopf und drehen Sie diesen bis „An“ erscheint. Drücken Sie den Knopf dann erneut, um die Einstellung zu sichern.

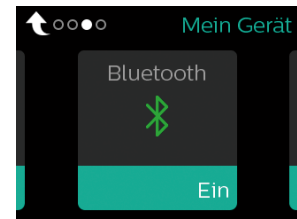

Hinweis zur Bestätigung der Kopplung von Gerät und Smartphone/Tablet

Sobald die Aufforderung zum Herstellen einer Bluetooth-Verbindung erscheint, bestätigen Sie diese durch Auswahl der Option „Ja“ und Drücken des Drehknopfs der DreamStation. Zum Bestätigen der Kopplung bei der DreamStation Go müssen Sie nach rechts oder links wischen und „Ja“ auswählen. Anschließend werden Therapiegerät und Smartphone/Tablet miteinander verbunden. Nachdem die Kopplung initiiert wurde, bleiben Ihnen 30 Sekunden, um die Einrichtung abzuschließen. Nach Ablauf dieser Zeit wird sie automatisch abgebrochen.



Eine ähnliche Aufforderung zum Herstellen einer Bluetooth-Verbindung erhalten Sie ggf. auch auf Ihrem Smartphone/Tablet.

Hinweis zur Datenübertragung und -aktualisierung

Ist [>>Autom. BluetoothÜbertragung<<](#) in DreamMapper aktiviert und eine Bluetooth Verbindung hergestellt, ruft DreamMapper die Daten von Ihrem Therapiegerät ab. Ist dieser Schritt abgeschlossen, können Sie mit der Nutzung von DreamMapper starten.

Hinweis: Sie können nur Therapiedaten ab dem Zeitpunkt der Einrichtung Ihres DreamMapper-Benutzerkontos in der App einsehen. Vorherige Daten sind nicht abrufbar.



Checkliste:

- ✓ Das Schlaftherapiegerät ist am Strom angeschlossen.
- ✓ Das Smartphone/Tablet ist mit dem Internet verbunden.
- ✓ Bluetooth ist auf dem Smartphone/Tablet und im Schlaftherapiegerät aktiviert.
- ✓ Das Smartphone/Tablet befindet sich in Reichweite des Therapiegerätes.
- ✓ Die Bluetooth Verbindung wurde über die Kopplungsfunktion in der DreamMapper App aufgesetzt.
- ✓ Die Kopplung von Gerät und Smartphone/Tablet wurde auf beiden Seiten bestätigt.
- ✓ [>>Autom. Bluetooth-Übertragung<<](#) ist in DreamMapper aktiviert.

© 2018 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, Änderungen an den technischen Daten vorzunehmen und/oder den Vertrieb eines Produktes jederzeit ohne Vorankündigung oder daraus entstehende Verpflichtungen einzustellen und haftet nicht für Folgen, die aus der Verwendung dieser Publikation entstehen.



Philips GmbH Respiroics
Gewerbstraße 17
82211 Herrsching

www.philips.de/dreammapper-app
www.philips.de/dreammapper-bluetooth